



Prieš dezinfekuojant naudojamas instrumentų ploviklis

PRIEŠ DEZINFKUOJANT INSTRUMENTUS

Išsitrinkite plaštakas, kad užtikrintumėte rankų higieną.

Asmens apsaugos priemonės: mūvėkite vienkartines pirštines, dėvėkite chirurginę kaukę, apsauginius akinius, ryšėkite vienkartinę prijuostę.




1

Į švarią talpyklą įpilkite reikiamą kiekį vandens.



2

Atsukite kamštį, kad būtų galima suspausti buteliuką.

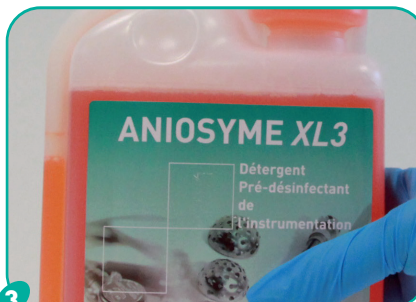


3

Suspauskite buteliuką (iki norimo tūrio), tada ištraukite kamštį.




4

Į mirkymo talpyklą įpylę reikiamą kiekį vandens, supilkite rekomenduojamą dozę.

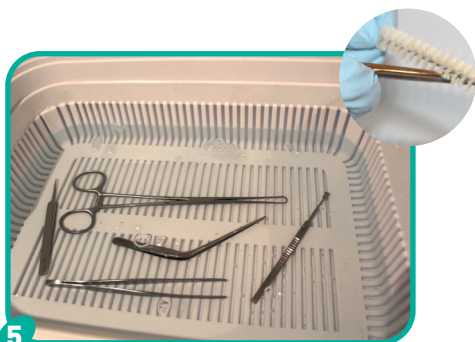

5

Visiškai panardinkite medicines priemones.
Sąlyčio trukmė: nuo 5 minučių.
Jeigu reikia, nušveiskite šepetėliu.

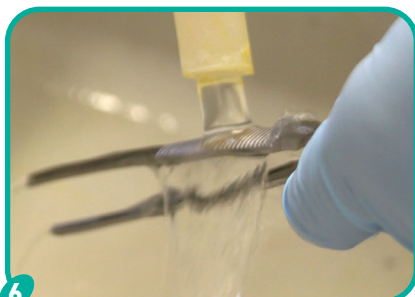

6

Kruopščiai skalaukite medicines priemones vandentiekio vandeniu (geros mikrobiologinės kokybės).
Pereikite į kitą etapą.

Rekomenduojama skiesti



0,5%



Kiti tūriai

Skiedimas (%)	Vandens kiekis (l)	ANIOSYME XL3 talpa 5 (ml)
0.5%	1 litras	5 ml produkto
0.5%	2 litrai	10 ml produkto
0.5%	3 litrai	15 ml produkto
0.5%	4 litrai	20 ml produkto
0.5%	5 litrai	25 ml produkto
0.5%	10 litrai	50 ml produkto
0.5%	20 litrai	100 ml produkto
0.5%	40 litrai	200 ml produkto