

ENDOSKOPO VALYMO IR DEZINFEKAVIMO PROTOKOLAS „ANIOSYME XL3“ IR „ANIOXYDE 1000“

PO APŽIŪROS

NEDELSIANT NAUDOTI DAR KARTĄ



1

Nuvalymas

- Šluoste WIP'ANIOS EXCEL nušluostykite zondą.
- Iš vamzdelių pašalinkite zondą.




2

Sandarumo testas

- Atlikite sandarumo testą.

LAIKYMAS daugiau nei 8 DIENAS

PIRMINĖ DEZINFEKCIJA* ANIOSYME XL3 : 25ml → 5L

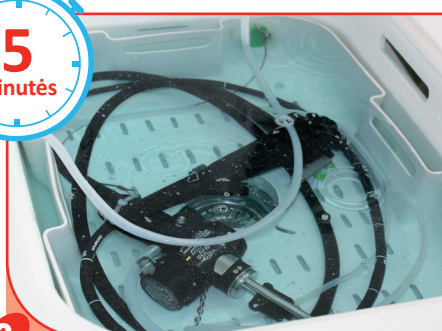

3

Plovimas

- Įmerkite endoskopą.
- Šepetėliu nuvalykite endoskopo kiaurymes.
- Nuvalykite endoskopą valomuoju šepetėliu.
- 5 minutes plaukite siurbliu.

PRIEŠ APDORODAMI KIEKVIENĄ
ENDOSKOPĄ, PAKEISKITE VONELĘ



4


Skalavimas

- Po 30 sekundžių truncančio valymo 2 minutes skalaukite, tada valykite.

PRIEŠ APDORODAMI KIEKVIENĄ
ENDOSKOPĄ, PAKEISKITE VONELĘ

LAIKYMAS daugiau nei 12 val.**


AUKŠTO LYGIO DEZINFEKCIJA ANIOXYDE 1000 : Paruoštas naudoti aktyvinus

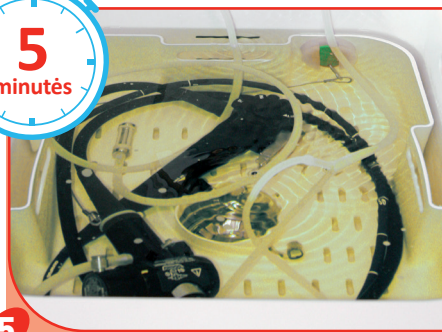

5

Mirkymas

- Įmerkite medicininį prietaisą.
- 5 minutes plaukite siurbliu.
- Juostele patikrinkite vonelę.

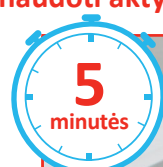


6

Skalaukite filtruotu vandeniu

- Pakeiskite pirštines.
- Valykite 30 sekundžių.
- Endoskopą įmerkite į filtruoto vandens vonelę.
- Skalaukite 5 minutes.
- Dar kartą valykite 30 sekundžių.

DŽIOVINIMAS / LAIKYMAS

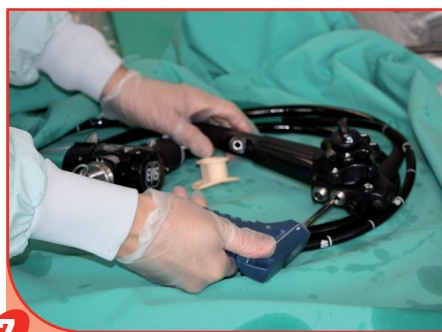

7

Džiovinimas

- Endoskopą padėkite ant švaraus nelaidaus vienkartinio naudojamo paviršiaus.
- Džiovininkite viršų ir išorę.



8

Laikymas

- Endoskopą padėkite šalia, kuo labiau laikydamiesi aseptinių sąlygų.

* Laikantis Prancūzijai skirtų rekomendacijų, pirminę dezinfekciją reikia atlikti du kartus.

** Laikantis 2003-12-17 Prancūzijos aplinkraščio DGS 591, po 12 val. laikymo tarpo rekomenduojama dezinfekuoti dar kartą

REKOMENDACIJOS

- Nusiplaukite rankas ir naudokite kaukę bei švarias vienkartinės pirštines.
- Valymo priemonės (šepetėliai ir endoskopo valymo šepetėliai) turi būti skirti naudoti tik vieną kartą.
- Laikykitės sąlyčio su gaminiu trukmės ir skiedimo nurodymų.
- Tarp naudojimo epizodų nuplaukite, nuvalykite ir dezinfekuokite laboratorinį stalą.
- Aktyvumui patikrinti naudokite patikros juostelę: seanso pradžioje arba po pertraukos atnaujinę aktyvumą, taip pat kas 4 nenutrūkstamos veiklos valandas (daugiau nei 10 endoskopų per dieną)
- „Anioxyde 1000“ vonelę keiskite, jei reakcija su patikros juostele yra neigiama.
- „Anioxyde 1000“ vonelės laikymas: daugiausia 14 dienų (ar vonelė tinkama, patikrinkite patikros juostele).

Laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes • FRANCE
Tél. +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68
www.anios.com