

ERTMIŲ ZONDŲ APDOROJIMAS PO APŽIŪROS*

LAUKIANT KITO PACIENTO

„ANIOSYME XL3“ ir „ANIOXYDE 1000“

1 ETAPAS. PASIRUOŠIMAS GYDYTI

- **Apvalkalo nuėmimas:** atsargiai, nesuplėšdami apvalkalo ir neužkrėsdami zondo, nuimkite apvalkalą.
- **Plaštakų dezinfekavimas:** plaštakas dezinfekuokite hidroalkoholiniu geliu ir apsimaukite naujas pirštines.
- **Zondo nusausinimas:** pašalinkite galimus matomus nešvarumus, zondą nuvalydami vienkartinę servetėlę.

2 ETAPAS. IŠANKSTINĖ DEZINFEKCIJA SU „ANIOSYME XL3“

ANIOSYME XL3 : 25ml → 5L

- 25 ml preparato atskieskite 5 litrais šalto vandens.
- *tuberkuliozės bacilų -> 15 minučių 2%

- Panardinkite visą medicininę priemonę.
- Palaikykite 5 minučių.
- Jeigu reikia, nušveiskite šepetėliu.

- Kruopščiai skalaukite zondą vandentiekio vandeniu.



Priemonę mirkykite bent kartą per dieną arba pamatę nešvarumų.



3 ETAPAS. AUKŠTO LYGIO DEZINFEKCIJA PREPARATU „ANIOXYDE 1000“

ANIOXYDE 1000: Paruoštas naudoti po aktyvinimo

VONELĖS PARUOŠIMAS

MIRKYMAS

SKALAVIMAS / SAUSINIMAS



Gydymo seanso pradžioje arba po pertaukos, taip pat pratęsdami veiklą kas 4 valandas patikros juostele patikrinkite peracto rūgšties koncentraciją.



Vonelėje mirkykite ne daugiau kaip 50 zondų. Vonelės nenaudokite ilgiau kaip 14 dienų.

REKOMENDACIJOS

SPECIALUSIS PROTOKOLAS: zondą nušluostykite servetėle WIP'ANIOS EXCEL.

Jei jis labai nešvarus, naudokite antrą servetėlę, kad ant zondo neliktų jokių matomų nešvarumų.

Jeigu neįmanoma pritaikyti standartinio protokolo arba ant servetėlės nematyti jokių nešvarumų, pagal įprastas invazinių medicininių priemonių apdorojimo procedūras pirmenybę teikite standartiniam valymo ir dezinfekcijos protokolui.

*Pamatinis dokumentas: Aukštosios visuomenės sveikatos tarybos nuomonė dėl ertmių endoskopijos zondų dezinfekcijos.



Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes • FRANCE
Tél. +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

PROTO SONDES ENDOCAVITAIRES-LT2381/1081 avec WIP'ANIOS EXCEL-170612
Nuotraukos sutartyje nenumatytos. Pavojainga: laikykites atsargaus naudojimo nurodymų.

ZONDO APDOROJIMAS PROGRAMOS PABAIGOJE