



- patentuota biologiškai aktyvi medžiaga
- be aldehydų ir ketvirtinių amonio junginių




Health Care



Sekusept® Plus

Kiekvienas medicininės operacijos metu panaudotas instrumentas iš principo laikomas užkrėstu. Kitiems pacientams, o visų pirma medicinos personalui yra labai didelė infekcijų rizika.

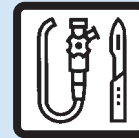

Mūsų laimėjimai

- Platus veikimo spektras. Veikia bakterijas (taip pat ir Tbc), grybelius, virusus (taip pat ir hepatito B (HBV), ŽIV, Adeno, Papova, Vaccinia).
- Sudėtyje esantis gliukoprotaminas nauja, efektyvi, biologiškai aktyvi medžiaga.
- Puikios plaunančios savybės.
- Biologiškai aktyvi antimikrobinė medžiaga iš natūraliai augančių žaliavų.
- Mažai lakus, tirpalas atsparus temperatūrai iki 48°C.
- Sudėtyje yra korozijos inhibitorių.

Jūsų nauda

- Visapusiška medicinos personalo ir pacientų apsauga.
- Sudėtyje nėra aldehydų ir ketvirtinių amonio junginių. Geras medžiagų suderinamumas. Trumpas dezinfekcijos laikas. Praktiški, ekonomiški tirpalai skirti endoskopų dezinfekcijai.
- Nereikia naudoti papildomų ploviklių. Puikus plovimo efektyvumas, netgi plaunant labai nešvarius instrumentus.
- Labai gerai biodegraduoja. Nekenksmingas aplinkai.
- Tinka ultragarso prietaisams; malonaus kvapo.
- Tausoje dezinfekuojamų instrumentų paviršių, neardo metalų ir metalų junginių.


Sudėtis:

biologiškai aktyvios antimikrobinės medžiagos, nejoniniai tenzidai, tirpiklis, kompleksadarys, plovimo savybes stiprinančios medžiagos, korozijos inhibitoriai, dažančios ir aromatinės medžiagos. 100 g yra 25 g biologiškai aktyvaus gliukoprotamino.

Darbo saugos taisyklės:

Medžiaga kenksminga, koncentratas nudegina; saugoti akis, gleivinę ir odą. Preparatui patekus į akis plauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Suterštą preparatu odą tuojau pat plauti dideliu kiekiu vandens. Dirbant su koncentratu, o taip pat su darbinio tirpalu naudoti apsauginius drabužius ir pirštines, o taip pat veido apsaugą. Preparatui išsipylus ant rūbų juos tuojau pat nusirengti. Koncentrato, o taip pat darbinio tirpalo nenaudoti purškiant. Koncentrato nepilti į kanalizaciją. Laikyti šaltoje patalpoje, originaliame įpakavime. Saugotinuo vaikų.

Registruotas Lietuvos Respublikoje remiantis Dezinfekavimo medžiagų, plovimo ir valymo bei kosmetikos priemonių higieninio reglamentavimo ir registravimo ekspertų komisijos nutarimu. Registracijos liudijimas Nr. 627 - 97

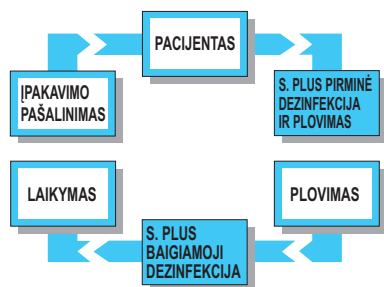

Panaudojimo sritis

Instrumentų iš metalo, plastmasės, gumos, stiklo ir pan. plovimui ir dezinfekcijai. Ypač tinka termolabilių medžiagų plovimui ir dezinfekcijai pvz., anestezijos reikmenys, lankstūs (nešiojami) endoskopai. **Darbinis tirpalas pakartotinai naudojamas 14 parų**

Naudojimo rekomendacijos

Panaudotus instrumentus tuojau pat pamerkti į Sekusept plus tirpalą. Atkreipti dėmesį į tai, kad instrumentai būtų visiškai apsemti tirpalu. Praėjus nurodytam dezinfekcijos laikui instrumentus išimti iš tirpalo ir nuskalauti bent jau geriamu (geriau destiliuotu arba demineralizuotu) vandeniu. Ilgai dezinfekuojant su Sekusept plus galima polikarbonatų, polisulfonų ir organinio stiklo pokyčiai, tačiau jų galima išvengti pakankamai ilgai skalaujant po kiekvienos dezinfekcijos.

Mikrobiologinio tyrimo rezultatai

	Koncentracija (%)	Dezinfekcijos laikas (val., min.)
Instrumentų dezinfekcija	1,5	1 val.
	2,5	30 min.
	4,0	15 min.
Tbc	1,0	30 min.
Instrumentų dezinfekcija ultragarso vonioje	4,0	5 min.

Virusologinio tyrimo rezultatai

Efektyvumas prieš virusus	Koncentracija (%)	Dezinfekcijos laikas (val., min.)
Hepatito-8 virusas	1,5	1 val.
	2,5	30 min.
	4,0	15 min.
ŽIV	1,0	30 min.
Adeno Typ II Papova SV 40 Vaccinia	4,0	5 min.

Sekusept Plus pakuotes

2 l talpos butelis su rankena ir su dozatorium	4 x 2 l	SA 4
6 l talpos plastmasinis bakelis	1 x 6 l	SA 6

Registruotas Lietuvos Respublikoje remiantis Dezinfekavimo medžiagų, plovimo ir valymo bei kosmetikos priemonių higieninio reglamentavimo ir registravimo ekspertų komisijos nutarimu. Registracijos liudijimas Nr. 629 - 97

ECOLAB®

Centrālā:
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street North
St. Paul, Minnesota 55102 - USA
Tel.: +1-651-293-22 33; fax: +1-651-293-20 92

Europa:
Ecolab GmbH
Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40554 Düsseldorf - Deutschland
Tel.: (0211) 9893-0; fax: (0211) 9893-384

Atstovas Lietuvoje UAB Medikona
Code 3475826
Neries kr.18, Kuaunas
tel.: +370 37 361113
fax: +370 37 360108

www.ecolab.com

SA05_DEC_03/LT

