



Papanicolaou EA50

Citoplazmai dažyti



In vitro diagnostikos medicinos priemonė

EMDN : W01030708

BASIC UDI: 080339762W01030708X8

IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746

Katalogo numeris	Vienetų dydis	UDI-DI
05-12019	500 ml	08033976232818
05-12019/L	1 l	08033976232825
05-12019E	2,5 l	08033976232832

Pakuotė

05-12019E

Pirminė talpyklė: baltas buteliukas iš polietilentereftalato (PET). Naudingoji talpa 2,5 litrų. DTPE dangtelis.

Mechaninį poveikį rodantis dangtelis.

Polietilentereftalatas yra termoplastinis poliesterių grupės polimeras. PET yra optimalus deguonies, anglies dioksido ir kitų dujų barjeras. Ši medžiaga labai atspari ultravioletinei spinduliavotei, inertiška daugumai cheminių medžiagų (tirpikliams: ksileniui, limoneniui, skystiems parafinams, alkoholiams, rūgštims, šarmams ir pan.). Tai biologiškai inertiška medžiaga. Ji sudaro gerą vandens ir drėgmės barjerą. Jai būdingas tinkamas kietumas ir mechaninis atsparumas.

Buteliuką patogiu laikyti. Nėra rankenų, todėl reikia mažiau vietos laikant. Nuo lašėjimo apsaugantis dangtelis suteikia galimybę naudoti tiksliai ir švariai.

Antrinė talpyklė: kartoninė dėžutė.

05-12019

Pirminė talpyklė: baltas buteliukas iš didelio tankio polietileno (DTPE). Naudingoji talpa 500 ml. DTPE dangtelis. Mechaninį poveikį rodantis dangtelis.

05-12019/L

Pirminė talpyklė: baltas buteliukas iš didelio tankio polietileno (DTPE). Naudingoji talpa 1 l. DTPE dangtelis. Mechaninį poveikį rodantis dangtelis.

Mechaniniam poveikiui, vandeniui, alkoholiui ir tirpikliams atspari PVC etiketė. Atsparus braižymui, vandeniui ir alkoholiui rašalas.

Tikėtinas tikslas

Gaminys skirtas: ginekologiniams tyrimams, šlapimo citologiniams tyrimams, skrepliams ir bronchų nuoplovoms, kurios tiriamos optiniu mikroskopu.

Naudojimas

Citoplazmos dažymo tirpalas Papanicolaou metodu.

Norint atlikti dažymą, reikia naudoti Papanicolaou reagentus Harrisio hematoksiliną ir Papanicolaou OG6.

Principas Labai atrankus mėlynas branduolių dažiklis Harriso hematoksilinas, sumaišytas su EA50 polichrominiu mišiniu (subtiliu citoplazmos dažikliu), kuris diferencijuoja cianofilines ląsteles nuo eozinofilinių. paskutinis ingredientas yra OG6 tirpalas, dažantis keratinizuotus elementus.

Metodas

- 1) 95° etanolis, 2 min.
- 2) Distiliuotas vanduo, 2 min.
- 3) Harriso hematoksilinas, 1 min.
- 4) Vandentiekio vanduo, 5 min.
- 5) 95° etanolis, 15 sek.
- 6) OG 6, 2 min.
- 7) 95° etanolis, 15 sek. (du kartus)
- 8) EA 50, 5 min.
- 9) 95° etanolis, 15 sek.
- 10) Grynasis etanolis, 30 sek. (du kartus)
- 11) Ksilenas arba „Bio-Clear“, 2 min. (du kartus)

Rezultatai

Branduoliai : mėlynai violetinė
Cianofilinė citoplazma : mėlynai žalia
Eozinofilinė citoplazma : rožinė
Keratinizuota citoplazma : nuo rožinės iki oranžinės

Komponentai	CAS	CE	Index
Sertifikuotas eozinas Y CI 45380	17372-87-1	241-409-6	–
Šviesusis žalis CI 42095	5141-20-8	225-906-5	–
Fosfovolframo rūgštis	12501-23-4	–	–
Etanolis, 95°	64-17-5	200-578-5	603-002-00-5

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje laboratorijoje. Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista.

Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas.

Laikymas Laikyti preparatą 15–30 °C temperatūroje. Laikyti talpykles sandariai uždarytas.

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima naudoti iki tinkamumo datos. Gaminio tinkamumo laikas: 2 metai.

Šalinimas Pavojingas preparatas: vadovaukitės visais valstybės ir regiono aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo.

REDAKCIJOS NR.	PRIEŽASTIS	PERŽIŪROS DATA
001	Reglamento (EU) Nr. 2017/746 koregavimas – IVDR	16/05/2022