

Papanicolaou ir Harriso hematoksilinas



Branduoliams dažyti



In vitro diagnostikos medicinos priemonė

EMDN : W01030708

BASIC UDI: 080339762W01030708X8

IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746

Katalogo numeris	Vienetų dydis	UDI-DI
05-12011	500 ml	08033976232665
05-12011/L	1 l	08033976232672
05-12011E	2,5 l	08033976232689

Pakuotė

05-12011E

Pirminė talpyklė: baltas buteliukas iš polietilentereftalato (PET). Naudingoji talpa 2,5 litrų. DTPE dangtelis.

Mechaninį poveikį rodantis dangtelis.

Polietilentereftalatas yra termoplastinis poliesterių grupės polimeras. PET yra optimalus deguonies, anglies dioksido ir kitų dujų barjeras. Ši medžiaga labai atspari ultravioletinei spinduliuotei, inertiška daugumai cheminių medžiagų (tirpikliams: ksilenui, limonenui, skystiems parafinams, alkoholiams, rūgštims, šarmams ir pan.). Tai biologiškai inertiška medžiaga. Ji sudaro gerą vandens ir drėgmės barjerą. Jai būdingas tinkamas kietumas ir mechaninis atsparumas.

Buteliuką patogų laikyti. Nėra rankenų, todėl reikia mažiau vietos laikant. Nuo lašėjimo apsaugantis dangtelis suteikia galimybę naudoti tiksliai ir švariai.

Antrinė talpyklė: kartoninė dėžutė.

05-12011

Pirminė talpyklė: baltas buteliukas iš didelio tankio polietileno (DTPE). Naudingoji talpa 500 ml. DTPE dangtelis. Mechaninį poveikį rodantis dangtelis.

05-12011/L

Pirminė talpyklė: baltas buteliukas iš didelio tankio polietileno (DTPE). Naudingoji talpa 1 l. DTPE dangtelis. Mechaninį poveikį rodantis dangtelis.

Mechaniniam poveikiui, vandeniui, alkoholiui ir tirpikliams atspari PVC etiketė. Atsparus braižymui, vandeniui ir alkoholiui rašalas.

Tikėtinas tikslas

Gaminys skirtas: ginekologiniams tyrimams, šlapimo citologiniams tyrimams, skrepliams ir bronchų nuoplovoms, kurios tiriamos optiniu mikroskopu.

Naudojimas

Branduolių dažymas Papanicolaou metodu.

Norint atlikti dažymą, reikia naudoti Papanicolaou EA50 ir Papanicolaou OG6 reagentus.

Principas Labai atrankus mėlynas branduolių dažiklis Harriso hematoksilinas, sumaišytas su EA50 polichrominiu mišiniu (subtiliu citoplazmos dažikliu), kuris diferencijuoja cianofilines ląsteles nuo eozinofilinių. paskutinis ingredientas yra OG6 tirpalas, dažantis keratinizuotus elementus.

Metodas

- 1) 95° etanolis, 2 min.
- 2) Distiliuotas vanduo, 1 min.
- 3) Harriso hematoksilinas, 1 min.
- 4) Vandentiekio vanduo, 5 min.
- 5) 95° etanolis, 15 sek.
- 6) OG 6, 2 min.
- 7) 95° etanolis, 15 sek. (du kartus)
- 8) EA 50, 5 min.
- 9) 95° etanolis, 15 sek.
- 10) Grynasis etanolis, 30 sek. (du kartus)
- 11) Ksilenas arba „Bio-Clear“, 2 min. (du kartus)

Rezultatai

Branduoliai : mėlynai violetinė
 Cianofilinė citoplazma : mėlynai žalia
 Eozinofilinė citoplazma : rožinė
 Keratinizuota citoplazma : nuo rožinės iki oranžinės

Komponentai	CAS	CE	Index
Sertifikuotas hematoksilinas	517-28-2	20822373	–
Aluminio sulfatas	7784-31-8	2331350	–
Kalio jodatas	7758-05-6	2318319	–
Acto rūgštis	64-19-7	2005807	607-002-00-6
Stabilizatoriai			

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje laboratorijoje. Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista.

Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas.

Laikymas Laikyti preparatą 15–25 °C temperatūroje. Laikyti talpykles sandariai uždarytas.

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima naudoti iki tinkamumo datos. Gaminio tinkamumo laikas: 2 metai.

Šalinimas Pavojingas preparatas: vadovaukitės visais valstybės ir regiono aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo.

REDAKCIJOS NR.	PRIEŽASTIS	PERŽIŪROS DATA
001	Reglamento (EU) Nr. 2017/746 koregavimas – IVDR	16/05/2022