



Autonomiškai šildantis apklotas

Apklotas pasiekia naudojimui tinkamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko vidutinę 40°C temperatūrą iki 10 valandų.

- Apsaugo nuo hipotermijos chirurginės intervencijos metu (taip pat prieš ir po)
- Paprastas ir greitas paruošimas sutaupo laiko
- Paprasta naudoti prieš operaciją, operacijos metu ir po operacijos efektyviam paciento šildymui
- Lengvai pritaikoma ir daugiau pacientų, nes nereikia papildomos įrangos



Naudojimo taisyklės



1. Atidarykite pakuotę ties tam skirta vieta, esančia viršutiniame kairiajame pakuotės kampe. Išimkite apklotą iš apsauginės išorinės pakuotės, kad BARRIER® EasyWarm® galėtų paveikti oras.



2. Atidarykite ir pilnai išlankstykite BARRIER EasyWarm taip, kad apklotas nebūtų užklotas pats ant savęs. Apklotas sąveikaudamas su oru pasiekia reikiamą temperatūrą vidutiniškai per 30 minučių ir išlaiko ją iki 10 valandų. Apklotas išyla vidutiniškai iki 40°C temperatūros.



3. Apklotą užklokite taip, kad šildančios pagalvėlės būtų nukreiptos į viršų. Ant pagalvėlių viršaus negalima dėti jokio papildomo svorio.



4. Prieš operaciją, po operacijos ir plaštakų/rankų/galvos chirurginių intervencijų metu BARRIER EasyWarm užklokite ant viso paciento kūno.




5. Apatinės abdominalinės ir apatinių galūnių chirurginės intervencijos metu užklokite BARRIER EasyWarm ant viršutinių galūnių ir krūtinės taip, kad iškirpta vieta būtų ties galva.



6. Viršutinės kūno dalies chirurginių intervencijų metu užklokite BARRIER EasyWarm ant apatinės kūno dalies.

Svarbi informacija

- Neužlenkite apklo ant jo paties.
- Nuimkite apklotą nuo paciento prieš rentgeno ir magnetinio rezonanso tyrimą, nes šildančios pagalvėlės yra neperšviečiamos.
- Šildančios pagalvėlės turi būti nukreiptos į viršų.

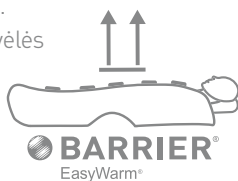

- Rekomenduojama vengti tiesioginio kontakto su oda ties vietomis, kur yra patinimas, sumušimas (mėlynės) ar nušalimas. Pacientų, kurių jautrumas, reakcija ir bendravimas yra sutrikęs, oda turi būti reguliariai pagal ligoninės protokolą stebima.
- Panaudojus, apklotą utilizuokite kartu su įprastomis atliekomis. Galima sudeginti.
- Apklotas turi būti naudojamas su sveikatos priežiūros įstaigos personalo priežiūra.

Atsargumo priemonės

- Apklotas nėra sukurtas naudoti vaikų chirurginių intervencijų metu.
- Nenaudoti apklo, kai numatoma ilgiau trunkanti hipotonija
- Nenaudoti apklo pacientams, kurie turi sunkių periferinių kraujagyslių sutrikimų.

Produkto nr.	Aprašymas
629900	BARRIER EasyWarm autonomiškai šildantis apklotas Produktas: 12 oro suaktyvinamų šildančių pagalvėlių (13cmx10cm), integruotų į kišenes, esančias apklo išorinėje pusėje. Apklo matmenys 152cm x 92 cm. Sudėtis: Keletas sluoksnių SMS (polipropileno). Apklo sluoksniai ir kišenės yra kartu susiūti su poliesterio/medvilnės siūlais. Šildančios pagalvėlės yra pagamintos iš orui pralaidžių maišelių, kuriuose yra aktyvi anglis, molis, druska, vanduo ir geležies milteliai. Pakuotė: Vakuuminis įpakavimas į orui nepralaidų polimero maišą. Polimero maišai yra supakuoti į apsaugines pakuotes ir į transportinę dėžę. TRP: 10 vnt

Daugiau informacijos www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care, J. Galvydžio g. 3, 08236 Vilnius
Tel.: +370 52 745 837

Mölnlycke Health Care, BARRIER® ir EasyWarm® pavadinimai ir logotipai yra globaliai registruoti prekių ženklai ir priklauso Mölnlycke Health Care kompanijai grupei.
© 2012 Mölnlycke Health Care AB. Visos teisės saugomos.

