



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### EASYDES

Dezinfekcijos skystis paviršiams

#### PASKIRTIS

**Easydes** - paruoštas naudoti greito veikimo dezinfekcijos skystis. Paviršiams, įrenginiams bei įrankiams, išskyrus medicinos prietaisus, dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės įmonėse, viešojo maitinimo įstaigose, vaikų ugdymo įstaigose ir visuomeninės paskirties vietose (grožio salonuose, kirpyklose, soliariumuose, baseinuose, sportui skirtose patalpose ir kt.).

Produktas skirtas medicininių prietaisų (MDD, klasė II a) paviršių dezinfekcijai; įvairių plastikinių paviršių bei paviršių odontologų kabinetuose dezinfekcijai. Taip pat naudojamas visų alkoholiui atsparių dangų bei paviršių dezinfekcijai: kontaktuojantys paviršiai, įranga (įskaitant telefono aparatus ir kompiuterio klaviatūras).

#### SUDĖTIS

Sudėtyje yra 55-60% Etanolio (biocidas), <2% Tert.butanolio (denatūratas), <0,5% Ketvirtinių amonio chloridų (biocidas, valymo poveikis), <0,5% Alkilamino (biocidas). pH 10,0

#### SAVYBĖS

**Easydes** – skaidrus dezinfekcijos skystis etanolio pagrindu, sudėtyje turintis valomųjų medžiagų. Produktas turi plataus spektro mikrobiologinį poveikį, veikia į organinius nešvarumus.

**Easydes** efektyviai naikina bakterijas, virusus, grybelius. Efektyviai pašalina purvus ir riebalus. Mikrobiologinis produkto veikimas buvo atliktas Hjelt institute (buvęs Helsinkio Universiteto sveikatos apsaugos skyrius): EN13697 (bakterijos ir grybeliai); EN13713 (baktericidinis poveikis, įtraukiant ir MRSA); EN 1650 (fungicidinis poveikis). Veikimo į virusus tyrimai apima EN 14476 su adenovirusu, BVDV ir vaccinia, bei poveikis prieš norovirusą buvo dokumentuotas (ekspozicijos laikas 30 s).

#### NAUDOJIMO BŪDAS IR DOZUOTĖ

**Easydes** - tai paruoštas naudoti dezinfekcijos tirpalas (neskiedžiamas).

Dozuotė: sudrėkinkite servetėlę su Easydes, atkreipkite dėmesį - įeigu atlienate dezinfekciją, įrangos paviršius turi būti pakankamai sudrėkintas tirpalu. Sudrėkintą paviršių gerai nuvalykite. Paviršių nebūtina nuskalauti.

Dezinfekcija yra atlikta tada, kai skystis išgaruoja ir paviršius tampa sausas.

Ekspozicijos laikas 5 min. Išėja 1 m<sup>2</sup> – apie 50 ml Easydes.



#### DARBŲ SAUGOS NURODYMAI IR SANDĖLIAVIMAS

Atsargiai. Degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, įeigu jie yra ir įeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Laikykite gerai vėdinamoje vėsioje patalpoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio ir degimo šaltinių.

Atitiktis sertifikato Nr. 106615-2011-CE-FIN-NA 4.0, galioja iki 2019-07-16.

Biocido autorizacijos liudijimo Nr.(11.1)-(A-0204PNO561180/A-14-29)-BSV-1306, galioja iki 2018-09-05.

#### PAKUOTĖ

500 ml; 750 ml; 5 l indas; dezinfekcinės servetėlės – pakuotėje 16 vnt.

Gamintojas: KiiltoClean Oy., Suomija  
Platintojas: UAB "Deimena", Lietuva

#### UAB "DEIMENA"

Staniūnų g. 66  
LT-36142 Panevėžys  
tel. (8~45) 433966, 439689  
tel./faks. (8~45) 439695  
El.p. [info@deimena.lt](mailto:info@deimena.lt)  
[www.deimena.lt](http://www.deimena.lt)

#### Skryiai:

Ateities g. 10  
LT-08303 Vilnius  
tel. (8~5) 2697689  
tel./faks. (8~5) 2697926  
[vilnius@deimena.lt](mailto:vilnius@deimena.lt)

Partizanų g. 63M  
LT-50306 Kaunas  
tel. (8~37) 797413  
tel./faks. (8~37) 798644  
[kaunas@deimena.lt](mailto:kaunas@deimena.lt)

Birutės g. 9  
LT-91223 Klaipėda  
tel. (8~46) 325645  
tel./faks. (8~46) 324075  
[klaipeda@deimena.lt](mailto:klaipeda@deimena.lt)

Draugystės pr. 2  
LT-77145 Šiauliai  
tel. (8~41) 399284  
faks. (8~41) 434814  
[siauliai@deimena.lt](mailto:siauliai@deimena.lt)

