



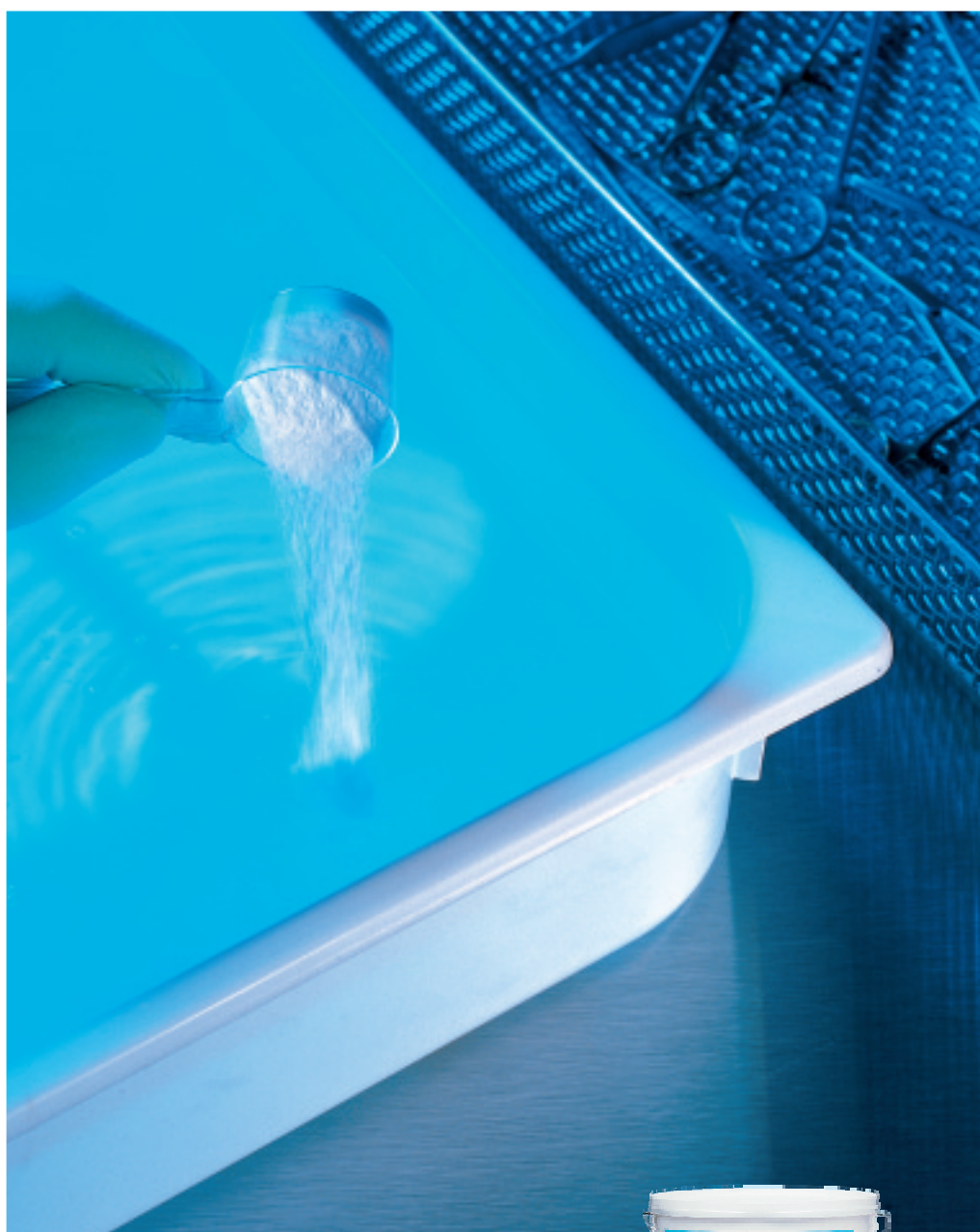

Sekusept® pulver

Chirurginių instrumentų plovimas ir dezinfekcija vienu metu

- be aldehydų
- puikios plaunančios savybės
- bekvapis

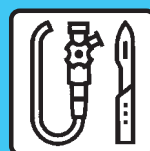

Health Care



Sekusept® pulver

Kiekvieną chirurginės intervencijos metu panaudotą instrumentą reikia traktuoti kaip užkrėstą. Kiti pacientai, o visų pirma ligoninės personalas turi didelę riziką užsikrėsti.



Mūsų laimėjimai	Jūsų nauda
<ul style="list-style-type: none">Preparatas plauna ir tirpina kraują, pūlius, baltymus ir kitas organizmo išskyras	<ul style="list-style-type: none">Panaudojus preparatą retai prireikia instrumentus papildomai nuplauti rankomis
<ul style="list-style-type: none">Veikia bakterijas, grybelius ir virusus, įskaitant hepatitą B ir ŽIV	<ul style="list-style-type: none">Platus veikimo spektras
<ul style="list-style-type: none">Galimybė pridėti aktyvatoriaus	<ul style="list-style-type: none">Su aktyvatoriumi veikia Tbc ir sporas.
<ul style="list-style-type: none">Rekomenduoja Olympus Otical CO. Ltd. endoskopų plovimui ir dezinfekcijai	<ul style="list-style-type: none">Bealdehidinis dezinfekuojantis plaunantis preparatas endoskopams
<ul style="list-style-type: none">Tirpale bekvapis	<ul style="list-style-type: none">Mažai kenksmingas darbo metu
<ul style="list-style-type: none">Turi korozijos inhibitorių	<ul style="list-style-type: none">Metalinius instrumentus saugo nuo korozijos
<ul style="list-style-type: none">Sudėtyje yra paviršiaus aktyvių medžiagų	<ul style="list-style-type: none">Puikios plaunančios savybės
<ul style="list-style-type: none">Gali būti naudojamas ultragarsiniuose plovimo įrenginiuose	<ul style="list-style-type: none">Trumpesnis instrumentų paruošimo laikas
<ul style="list-style-type: none">Preparato veikimo pagrindas yra aktyvūs deguonies atomai. Veikimas pagrįstas aktyvios medžiagos išsiskyrimu iš preparato	<ul style="list-style-type: none">Didelis preparato aktyvumas. Nėra galimybės susidaryti atspariems mikroorganizmams
<ul style="list-style-type: none">Lengvai biodegraduoja	<ul style="list-style-type: none">Natūralios aplinkos apsauga

Sudėtis:

Sekusept milteliai: antimikrobinės aktyviosios medžiagos, tenzidai, fosfatai, karbonatai, korozijos inhibitoriai. 100g veikliosios medžiagos yra: 20g natrio perborato, 15g tetraacetilendiamino (TAED) Sekusept miltelių aktyvatorius: fosforo rūgštis, niotenzidas, korozijos inhibitorius, valomojo veiksmingumo stiprintojas, dažančios medžiagos.

2% tirpalo pagaminimo būdas

I kiekvieną litrą šalto vandens reikia įpilti 20 g Sekusept miltelių (2kg pakuotėje esantis dozavimo šaukštėlis) ir išmaišyti. Norint išplėsti preparato veikimą iki Tbc ir sporų, į kiekvieną litrą taip paruošto tirpalo po 15 min. įpilti aktyvatoriaus. Tokiu būdu aktyvuotas tirpalas maždaug po 30 min. nusidapa mėlyna spalva.

Darbo saugos taisyklės:

Preparatas kenksmingas sveikatai jį suvalgius. Dirginančiai veikia akis ir odą. Neįkvėpti dulkių. Saugoti akis ir odą nuo užteršimo. Patekus į akis tuojau pat perplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis pagalbos į gydytoją. Užterštą odą tuojau pat perplauti dideliu kiekiu vandens. Saugoti nuo drėgmės. Sekusept Pulver nenaudoti aliumininių ir nikeliuotų instrumentų dezinfekcijai. Tam tikslui naudoti Sekusept forte arba Sekusept plus.

Registruotas Lietuvos Respublikoje remiantis Dezinfekavimo medžiagų, plovimo ir valymo bei kosmetikos priemonių higieninio reglamentavimo ir registravimo ekspertų komisijos nutarimu. Registracijos liudijimas Nr. 17258-01

Registruotas Lietuvos Respublikoje remiantis Dezinfekavimo medžiagų, plovimo ir valymo bei kosmetikos priemonių higieninio reglamentavimo ir registravimo ekspertų komisijos nutarimu. Registracijos liudijimas Nr. 629 - 97

Centrala:
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street North
St. Paul, Minnesota 55102 - USA
Tel.: +1-651-293-22 33; fax: +1-651-293-20 92

Europa:
Ecolab GmbH
Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40554 Düsseldorf - Deutschland
Tel.: (0211) 9893-0; fax: (0211) 9893-384

www.ecolab.com

Panaudojimo sritis	Naudojimo rekomendacijos
Medicinių instrumentų, anesteziologinės įrangos, plastiko plovimas ir dezinfekcija.	Po panaudojimo tuojau pat nešvarius instrumentus, anesteziologinę įrangą arba kitus daiktus, skirtus dezinfekuoti preparato tirpale, panardinti į preparato tirpalą. Atkreipti dėmesį, kad daiktai būtų pilnai panardinti į tirpalą ir juo užpildyti. Praėjus dezinfekcijos laikui instrumentus išimti iš tirpalo ir išskalauti destiliuotu, demineralizuotu arba bent jau geriamu vandeniu. Išdžiovinti ir sterilizuoti. Išsami informacija yra inkubatorių dezinfekcijos plane. 2% tirpalą su aktyvatoriumi naudoti pimpliniam ir pagrindiniam endoskopų plovimui, o taip pat dezinfekcijai. Laikytis endoskopų dezinfekcijos plano ir gamintojo rekomendacijų (Olympus Optical). Dezinfekuojamus paviršius plauti preparato tirpalu.
Inkubatorių dezinfekcija	
Endoskopų dezinfekcija	
Paviršių dezinfekcija	
Tirpalą reikia keisti prieš kiekvieną darbo dieną.	

Mikrobiologinio tyrimo rezultatai

	Sekusept miltelių+aktyvatoriaus koncentracija (%)	Dezinfekcijos laikas (val., min.)
Instrumentų dezinfekcija pagal DGHM su M. terrae (1997.04.01)	2,0%+0,5% aktyvatoriaus	15 min.
Instrumentų dezinfekcija ultragarsinėje vonelėje	2,0%+0,5% aktyvatoriaus	15 min.
Paviršių dezinfekcija	0,5% 1,5% 2,0%	4 val 1 val 15 min.

Virusologinio tyrimo rezultatai

Efektivumas prieš virusus	Koncentracija (%)	Dezinfekcijos laikas
Hepatitis B-virusas	2,0	15 min.
ŽIV	2,0	15 min.
Adeno Typ II	2,0	15 min.
Papova SV 40	2,0	15 min.
Vaccinia	2,0	15 min.
Polio	2,0	15 min.

Sekusept Pulver pakuotes

100 g maišeliai	100 x 100 g	SS 100
2 kg plastikinis kibiras	4 x 2 kg	SS 8
10 kg plastikinis kibiras	10 kg	SS 10N
25 kg popierinis maišas	25 kg	SS 25N

ECOLAB®

Atstovas Lietuvoje UAB Medikona
Code 3475826
Neries kr.18, Kuaunas
tel.: +370 37 361113
fax: +370 37 360108

SEK05_DEC_03/LT