

# IMMULITE® 2000/XPi

## Probe Wash Module

### PROBE WASH



Taisyms juosta ymi ankstesns versijos atnaujinim.

### Paskirtis

Skirtas naudoti įprastinei IMMULITE® 2000 / XPi sistemų priežiūrai – padeda sumažinti reagentų pernešimą, sumažindamas baltymų ir lipidų kaupimąsi zonde.

### Reagentai

| Reagentas                                                   | Aprašas                                                                                                                                         | Laikymas                                                                                         | Stabilumas |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IMMULITE® 2000 / XPi Probe Wash Module<br><b>PROBE WASH</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                  |            |
| <b>PROBE WASH CONC</b>                                      | Skystis, kuriame yra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trikalio ortofosfatas</li> <li>• Buferiniai tirpalai/ stabilizatoriai</li> </ul> | 15–28 °C<br>Laikant neatidarytą galima naudoti iki etiketėje nurodytos galiojimo pabaigos datos. | netaikoma  |

**PROBE WASH CONC**: 10 × koncentruotas buferinis tirpalas su plovikliu.

#### Stabilumas prietaise

**PROBE WASH CONC** skiedimas 1:10 santykiu yra stabilus 30 dienų laikant 15–28 °C temperatūroje arba iki **PROBE WASH CONC** galiojimo pabaigos datos.

### Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Skirta tik *in vitro* diagnostikai.

Skirta naudoti profesionalams laboratorijose.

Remiantis ES reglamentu 2017/746, apie bet kokį įvykusį rimtą nepageidaujamą įvykį, susijusį su šiuo prietaisu, reikia pranešti gamintojui bei naudotojo ir (arba) paciento ES valstybės narės kompetentingai institucijai.

Saugos duomenų lapus (MSDS/SDS) galima rasti [siemens-healthineers.com/sds](http://siemens-healthineers.com/sds).



#### Pavojus! **PROBE WASH CONC**

Pavojinga sudedamoji dalis: Trikalio ortofosfatas (3,57 % [w/w]).

**H318**: Smarkiai pažeidžia akis.

**P280**: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. **P305 + P351 + P338**: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. **P310**: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Naudoti tik distiliuotą ar dejonizuotą vandenį.

Vengti bakterinio vandens ir skysčio vamzdelių užteršimo.

Pavojingas arba biologiškai užterštas medžiagas šalinkite vadovaudamiesi įstaigos praktikos taisyklėmis. Visas medžiagas šalinkite saugiu ir priimtiniu būdu bei laikydamiesi visų valstybės reikalavimų.

## Reagentų ruošimas

Adatos ploviklis pateikiamas koncentruotas ir turi būti atskiestas prieš naudojimą.

**1-su-10 skiedimas:** prieš naudojimą supilkite vieno butelio turinį į švarų ploviklio rezervuarą, įpilkite 1 800 ml distiliuoto ar dejonizuoto vandens ir sumaišykite atsargiai vartydami.

## Procedūra

### Tiekiamos medžiagos

| REF    | Turinys                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| L2PWSM | IMMULITE® 2000/XPi Probe Wash Module<br><b>PROBE WASH</b>                      |
|        | IMMULITE® 2000/XPi Probe Wash Concentrate 2 × 200 ml<br><b>PROBE WASH CONC</b> |

### Būtinios, bet netiekiamos medžiagos

| Elementas                       | Aprašas                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| –                               | Distiliuotas arba dejonizuotasis vanduo be konservantų                                                       |
| Prietaisai <sup>a</sup> , pvz.: | <ul style="list-style-type: none"> <li>IMMULITE® 2000 sistema</li> <li>IMMULITE® 2000 XPi sistema</li> </ul> |

<sup>a</sup> Analizatorių prieinamumas įvairiose šalyse gali skirtis.

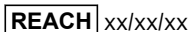
## Techninė pagalba

Už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų kreipkitės į nacionalinį platintoją.

Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH kokybės sistema sertifikuota pagal ISO 13485.

## Simbolių apibrėžimai

Gaminio etiketėse gali būti toliau pateiktų simbolių.

|                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | Nenaudoti pakartotinai                                                                                  |     | Sunaudoti iki                                    |
|    | Partijos kodas                                                                                          |     | Katalogo numeris                                 |
|    | Perspėjimas, žr. kartu pateiktus dokumentus                                                             |     | Gamintojas                                       |
|    | Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje                                                                 |     | Turinio pakanka atlikti <n> tyrimų               |
|    | Biologinis pavojus                                                                                      |     | <i>In Vitro</i> diagnostikos medicinos įrenginys |
|    | Temperatūros apribojimas                                                                                |     | Žr. naudojimo instrukcijas                       |
|    | Nesterilu                                                                                               |     | CE ženklas                                       |
|    | CE ženklas su notifikuotosios įstaigos ID numeriu.<br>Notifikuotosios įstaigos ID numeris gali skirtis. |    | Sudėtis                                          |
|    | Tirpinimo tūris                                                                                         |    | Lygis                                            |
|   | Saugoti nuo saulės šviesos ir karščio                                                                   |   | Įspėjimas                                        |
|  | Pavojus                                                                                                 |  | Receptinė priemonė (tik JAV)                     |
|  | Prietaiso identifikavimo (UDI) brūkšninis kodas                                                         |  | REACH leidimo numeris                            |

## Teisinė informacija

IMMULITE yra Siemens Healthineers prekinis ženklas.

Visi kiti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

© Siemens Healthineers, 2010–2021. Visos teisės saugomos.

### Siemens Healthineers Headquarters

Siemens Healthcare GmbH  
Henkestraße 127  
91052 Erlangen  
Germany  
Phone: +49 9131 84-0  
siemens-healthineers.com



### Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76  
35041 Marburg  
Germany  
siemens-healthineers.com