

IMMULITE® 2000/XPi

Probe Cleaning Kit

PROBE CLEAN



Taisyms juosta ymi ankstesns versijos atnaujinim.

Paskirtis

Skirtas naudoti kasdienei IMMULITE® 2000 / XPi sistemų priežiūrai – padeda sumažinti reagentų pernešimą, sumažindamas baltymų ir lipidų kaupimąsi zonuose.

Reagentai

Reagentas	Aprašas	Laikymas	Stabilumas
IMMULITE® 2000/XPi Probe Cleaning Kit PROBE CLEAN			
PROBE CLEAN SOL	Paruoštas naudoti skystis, kurį sudaro: • Natrio hipochlorito tirpalas (< 4,4 %)	15–28 °C Laikant neatidarytą galima naudoti iki etiketėje nurodytos galiojimo pabaigos datos.	netaikoma
WEDGE			netaikoma

Išėmę valymui reikalingą medžiagą, nedelsdami uždėkite dangtelį ant **PROBE CLEAN SOL** buteliuko (juodo plastikinio buteliuko) ir sandariai užsukite.

WEDGE: atidarykite daugkartinį pleištą.

WEDGE reikalingas tik zondo valymo procedūrai, kai naudojama 5.3b ir senesnė programinės įrangos versija.

Ispėjimai ir atsargumo priemonės

Skirta tik *in vitro* diagnostikai.

Skirta naudoti profesionalams laboratorijose.

Remiantis ES reglamentu 2017/746, apie bet kokį įvykusį rimtą nepageidaujamą įvykį, susijusį su šiuo prietaisu, reikia pranešti gamintojui bei naudotojo ir (arba) paciento ES valstybės narės kompetentingai institucijai.

Saugos duomenų lapus (MSDS/SDS) galima rasti [siemens-healthineers.com/sds](https://www.siemens-healthineers.com/sds).

**Pavojus! PROBE CLEAN SOL**

Pavojinga sudedamoji dalis: Natrio hipochlorito tirpalas (4 % [w/w]).

H290: Gali ėsdinti metalus. **H314:** Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. **H400:** Labai toksiška vandens organizmams. **H411:** Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. **P234:** Laikyti tik originalioje talpykloje. **P264:** Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. **P273:** Saugoti, kad nepatektų į aplinką. **P301 + P330 + P331:** PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. **P303 + P361 + P353:** PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. **P305 + P351 + P338:** PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. **P310:** Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. **P390:** Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. **P391:** Surinkti ištekęsias medžiagas. **P501:** Turinį ir talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius, regioninius ir nacionalinius reikalavimus.

Šarminė medžiaga. Sudėtyje yra chlorkalkių. Vengti patekimo į akis, ant odos ir drabužių. Kruopščiai praplauti po panaudojimo. Nepraryti. Reikalinga normali atvirų patalpų ventilacija.

Nenaudoti adatos valymo tirpalo (LPMS) vietoje Adatos ploviklio (L2PWS2).

Pavojingas arba biologiškai užterštas medžiagas šalinkite vadovaudamiesi įstaigos praktikos taisyklėmis. Visas medžiagas šalinkite saugiu ir priimtiniu būdu bei laikydamiesi visų valstybės reikalavimų.

Procedūra

Tiekiamos medžiagos

REF	Turinys
L2KPM	IMMULITE® 2000/XPi Probe Cleaning Kit
	PROBE CLEAN
	Adatos valymo tirpalas (LPMS) 100 ml
	PROBE CLEAN SOL
	Adatos valymo indelis (L2PCW) 1 dal.
	WEDGE
	Adatos valymo barkodas ^a 30 dal.

^a Brūkšniniai kodai skirti naudoti tik IMMULITE® 2000 XPi sistemoje.

Būtinios, bet netiekiamos medžiagos

Elementas	Aprašas
–	Distiliuotas arba dejonizuotasis vanduo be konservantų
–	2 ml pipetė
–	12 × 75 mm mėgintuvėlis
Prietaisai ^b , pvz.:	- IMMULITE® 2000 sistema - IMMULITE® 2000 XPi sistema

^b Analizatorių prieinamumas įvairiose šalyse gali skirtis.

Kasdieninio valymo procedūra

PASTABA. Ši procedūra taikoma 5.4 ir naujesnės versijos programinei įrangai.

- Įpilkite 1,5 ml adatos valymo tirpalo į 12 × 75 mm mėgintuvėlį.
- Įstatykite mėgintuvėlį į bet kurio padėklo poziciją 1. Įdėkite mėginių padėklą į mėginių karuselės poziciją 1.
- Dukart spragtelėkite **Diagnostics** piktogramą.
- Paspauskite **Condensed Run Program** mygtuką.

5. Paspauskite **Daily Probe Cleaning**, paspauskite **RUN** ir sekite pranešimus.
6. Pasibaigus 10 minučių procedūrai paspauskite **Exit**.
7. Paspauskite **Quit**.
8. Išimkite mėgintuvėlį ir išpilkite likusį tirpalą.
9. Dukart spustelėkite **IMMULITE 2000** arba **IMMULITE 2000 XPi** piktogramą, kad būtų tęsiamas įprastas darbas.

PASTABA. Ši procedūra taikoma 6.0 ir naujesnės versijos programinei įrangai, kai naudojama „AutoStart“ funkcija tik IMMULITE® 2000 XPi sistemoje.

Prieš kiekvieną nustatytą ar rankinę AutoStart procedūrą:

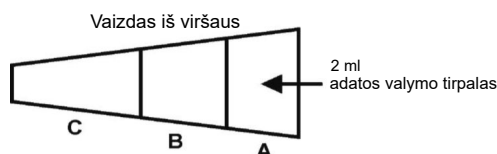
1. Įpilkite 1,5 ml adatos valymo tirpalo į 12 × 75 mm mėgintuvėlį.
2. Užklijuokite adatos valymo brūkšninį kodą ant mėgintuvėlio ir įstatykite jį į mėginių padėklą. Tada padėklas gali būti įkeltas į bet kurią mėginių karuselės poziciją.

Pasibaigus AutoStart:

3. Paspauskite **OK**, kad grįžti į vartotojo programą.
4. Iškelkite mėginių padėklą, išimkite mėgintuvėlį ir išpilkite likusį skystį.
5. Šiuo metu galite tęsti normalų darbą.

PASTABA. Ši procedūra taikoma 5.3b ir senesnės versijos programinei įrangai.

1. Įpilkite 2 ml adatos plovimo tirpalo į adatos plovimo indelio A skyrelį (žr. Paveikslėlį).



2. Įpilkite 2 ml adatos valymo tirpalo į 12 × 75 mm mėgintuvėlį.
3. Įdėkite adatos valymo indelį į reagentų karuselės poziciją 1.
4. Įstatykite mėgintuvėlį į bet kurio padėklo poziciją 1. Įdėkite mėginių padėklą į mėginių karuselės poziciją 1.
5. Dukart spragtelėkite **Diagnostics** piktogramą.
6. Paspauskite **Condensed Run Program** mygtuką.
7. Paspauskite **Daily Probe Cleaning**, paspauskite **RUN** ir sekite pranešimus.
8. Pasibaigus 10 minučių procedūrai paspauskite **Exit**.
9. Paspauskite **Quit**.
10. Išimkite adatos valymo indelį, išpilkite indelyje likusį tirpalą ir išskalaukite jį su distiliuotu ar dejonizuotu vandeniu. Įdėkite indelį atgal į rinkinio dėžutę.
11. Dukart spustelėkite **IMMULITE 2000** arba **IMMULITE 2000 XPi** piktogramą, kad būtų tęsiamas įprastas darbas.

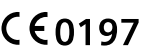
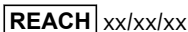
Techninė pagalba

Jei esate ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, kreipkitės į nacionalinį platintoją.

Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH kokybės sistema sertifikuota pagal ISO 13485.

Simbolių apibrėžimai

Gaminio etiketėse gali būti toliau pateiktų simbolių.

	Nenaudoti pakartotinai		Sunaudoti iki
	Partijos kodas		Katalogo numeris
	Perspėjimas, žr. kartu pateiktus dokumentus		Gamintojas
	Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje		Turinio pakanka atlikti <n> tyrimų
	Biologinis pavojus		<i>In Vitro</i> diagnostikos medicinos įrenginys
	Temperatūros apribojimas		Žr. naudojimo instrukcijas
	Nesterilu		CE ženklas
	CE ženklas su notifikuotosios įstaigos ID numeriu. Notifikuotosios įstaigos ID numeris gali skirtis.		Sudėtis
	Tirpinimo tūris		Lygis
	Saugoti nuo saulės šviesos ir karščio		Įspėjimas
	Pavojus		Receptinė priemonė (tik JAV)
	Prietaiso identifikavimo (UDI) brūkšninis kodas		REACH leidimo numeris

Teisinė informacija

IMMULITE yra Siemens Healthineers prekinis ženklas.

Visi kiti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

© Siemens Healthineers, 2010–2021. Visos teisės saugomos.

Siemens Healthineers Headquarters

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com



Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76
35041 Marburg
Germany
siemens-healthineers.com