

7% BSA

ORTHO™ 7% BSA

REF

6844285
6986722

Reagentai

ORTHO™ 7% BSA yra galvijų serumo, neorganinių druskų ir konservantų vandeninis tirpalas.

Reaktyvūs ingredientai

Nėra

Kiti ingredientai

7% galvijų serumo albuminas, neorganinės druskos ir konservantai

Ispėjimai ir atsargumo priemonės

ISPĖJIMAS Nors šie produktai yra galvijų kilmės, su jais reikia elgtis laikantis tų pačių atsargumo priemonių, kaip ir su bet kuriuo kitu krauju ar iš kraujo gautu produktu.

ISPĖJIMAS Šio vaisto pakuotėje (buteliuko kamštelyje) yra sauso natūralaus kaučiuko (latekso), kuris kai kuriems žmonėms gali sukelti alergines reakcijas.

Laikymas

Laikymas ir stabilumas

Reagentas	Laikymo sąlygos	Stabilumas
Uždarytas	Saldytas $\leq -18^{\circ}\text{C}$	Iki galiojimo pabaigos
	Saldytuve $2-8^{\circ}\text{C}$	Iki galiojimo pabaigos
Atidarytas	Saldytuve $2-8^{\circ}\text{C}$	≤ 28 dienos, jei sandariai užkimšta

Ispėjima Nenaudokite akivaizdžiai pažeisto gaminio arba gaminio su nepilnai uždaryta pakuote. Produktas turi būti skaidrus, šiek tiek geltonas arba gelsvai rudas skystis, be kietųjų dalelių.

Pateikta medžiaga

12 buteliukų (po 5 ml) ORTHO™ 7% BSA (Produkto kodas 6844285)

15 buteliukų (12 mL kiekvieno) iš ORTHO™ 7% BSA (Produkto kodas 6986722)

Simbolių žodynėlis

The following symbols may have been used in the labeling of this product.

	Do Not Reuse		Contains Sufficient for "n" Tests		Fragile, Handle with Care.
	Use by or Expiration Date (Year-Month-Day)		<i>In vitro</i> Diagnostic Medical Device		Keep Dry
	Batch Code or Lot Number		Upper Limit of Temperature		This end up
	Serial Number		Lower Limit of Temperature		Do Not Use if Damaged
	Catalog Number or Product Code		Temperature Limitation		Cassettes/Cards
	Caution		Consult instructions for use		CONC Concentration
	Date of Manufacture		Biological Risks		Der Grüne Punkt (the Green Dot). Manufacturer follows certain packaging material waste disposal management regulations.
	Manufacturer		Health Hazards		
	Authorized Representative in the European Community				

Peržiūros istorija

Peržiūros data	Versija	Techninių pakeitimų aprašymas *
2022-03-25	3.0	Techninis turinys nekeičiamas. Pakeistas IFU versijos numeris, kad būtų išlaikyta suderinamumas po to, kai į PT IFU buvo įtraukta informacija apie Brazilijos platintoją.
2015-08-31	2.0	- Teikiamos medžiagos: pridėtas naujas produkto kodas (6986722) - Simbolių žodynėlis: pridėtas pasauliniu mastu suderintas simbolis, kad būtų laikomasi klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo (CLP) reglamentų.
2014-07-10	1.0	Pradinė versija.

* Pakeitimo brūkšneliai rodo teksto techninio pakeitimo vietą, palyginti su ankstesne dokumento versija..



Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
100 Indigo Creek Drive
Rochester, NY 14626

Ortho Clinical Diagnostics