



Autonomiškai šildantis apklotas

Apklotas pasiekia naudojimui tinkamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko vidutinę 44°C temperatūrą iki 10 valandų. Odos temperatūra po apklotu pakyla iki 42°C.

- Apsaugo nuo hipotermijos chirurginės intervencijos metu (taip pat prieš ir po)
- Paprastas ir greitas paruošimas sutaupo laiko
- Paprasta naudoti prieš operaciją, operacijos metu ir po operacijos efektyviam paciento šildymui
- Lengvai pritaikoma ir daugiau pacientų, nes nereikia papildomos įrangos
- Dėl inovatyvaus dizaino apklotą galima padalinti į dvi dalis ir atskirai uždengti viršutinę ar apatinę kūno dalį.



Naudojimo instrukcijos – Nebuvo vertimo patikrinkit



1. Atidarykite pakuotę ties tam skirta vieta, esančia viršutiniame kairiajame pakuotės kampe. Išimkite apklotą iš apsauginės išorinės pakuotės, kad BARRIER® EasyWarm®+ galėtų paveikti oras.



2. Atidarykite ir pilnai išlankstykite BARRIER EasyWarm+ taip, kad apklotas nebūtų užklotas pats ant savęs. Apklotas sąveikaudamas su oru pasiekia reikiamą temperatūrą vidutiniškai per 30 minučių ir išlaiko ją iki 10 valandų. Apklotas įšyla vidutiniškai iki 44°C. Odos temperatūra po apklotu pakyla iki 42°C.



3. EasyWarm+ užklomite taip, kad šildančios pagalvėlės būtų nukreiptos į viršų ir balta apklo pusė būtų ant paciento.



4. Prieš operaciją, po operacijos ir plaštakų/rankų/galvos chirurginių intervencijų metu BARRIER EasyWarm+ užklomite ant kūno.



5. Apatinės abdominalinės ir apatinių galūnių chirurginės intervencijos metu atskirkite BARRIER EasyWarm+ į dvi dalis ir užklomite viršutinę dalį ant rankų ir krūtinės.



6. Viršutinės kūno dalies chirurginių intervencijų metu atskirkite BARRIER EasyWarm+ į dvi dalis ir apatinę užklomite ant klubų ir kojų.



7. Abdominalinės chirurginės intervencijos metu atskirkite BARRIER EasyWarm+ į dvi dalis, viršutinę užklomite ant rankų ir krūtinės, o apatinę dalį užklomite klubų ir kojų.



8. Apklo viršutinė ir apatinė dalys gali būti lengvai atskirtos ir vėl sujungtos su velcro sistema. Apatinė dalis gali būti padalinta į papildomas dvi dalis, perskiriant ties pažymėta linija. Dėl šių savybių apklotą galima pritaikyti skirtingoms paciento pozicijoms.

Svarbi informacija

- Neužlenkite apklo ant jo paties
- Nuimkite apklotą nuo paciento prieš rentgeno ir magnetinio rezonanso tyrimus, nes šildančios pagalvėlės yra neperšviečiamos.
- Šildančios pagalvėlės turi būti nukreiptos į viršų.



- Rekomenduojama vengti tiesioginio kontakto su oda ties vietomis, kur yra patinimas, sumušimas (mėlynės) ar nušalimas. Pacientų, kurių jautrumas, reakcija ir bendravimas yra sutrikęs, oda turi būti reguliariai pagal ligoninės protokolą stebima.
- Panaudojus, apklotą utilizuokite su įprastomis atliekomis. Galima sudeginti.
- Apklotas turi būti naudojamas su sveikatos priežiūros įstaigos personalo priežiūra.

Atsargumo priemonės

- Apklotas yra aktyvi terapinė priemonė ir turi būti naudojamas pagal instrukcijas, siekiant išvengti galimų terminių pažeidimų.
- Nenaudokite apklo hiperbarinei medicinai.
- Apklotas nėra sukurtas naudoti vaikų chirurginių intervencijų metu.

Produkto Nr.	Aprašymas
629910	BARRIER EasyWarm+ aktyvus autonomiškai šildantis apklotas Produktas: 12 oro suaktyvinamų šildančių pagalvėlių (13cmx10cm), integruotų į kišenės, esančias išorinėje pusėje. Apklo matmenys 110/150cx 200 cm. Sudėtis: keletas sluoksnių SMS (polipropileno). Apklo sluoksniai ir kišenės yra kartu susiūti su poliesterio/medvilnės siūlais. Šildančios pagalvėlės yra pagamintos iš orui pralaidžių maišelių, kuriuose yra aktyvi anglis, molis, druska, vanduo ir geležies milteliai. Pakuotė: Vakuuminis įpakavimas į orui nepralaidų polimero maišą. Polimero maišai yra supakuoti į apsaugines pakuotes ir į transportinę dėžę. TRP: 7 vnt.

Chirurginės paciento pozicijos

Apklotas BARRIER EasyWarm+ yra sukurtas taip, kad būtų lankstus ir tiktų skirtingoms chirurginėms intervencijoms. Žemiau pateikti galimi apkloto panaudojimo būdai dažniausiai atliekamų chirurginių intervencijų metu.



Abdominalinė chirurgija



Laparoskopinė chirurgija



Kelio chirurgija



Pečių chirurgija



Pečių chirurgija



Nugaros chirurgija



Urologinė/ginekologinė chirurgija



Urologinė/ginekologinė chirurgija



Urologinė/ginekologinė



Klubų chirurgija



Klubų chirurgija



ENT chirurgija



Daugiau informacijos www.molnlycke.com

Molnlycke Health Care, J. Galvydžio g. 3, 08236 Vilnius. Tel. +370 52 745 837

Molnlycke Health Care, BARRIER® ir EasyWarm®+ pavadinimai ir logotipai yra globaliai registruoti prekių ženklai ir priklauso Molnlycke Health Care kompanijų grupei.

© 2012 Molnlycke Health Care AB. Visos teisės saugomos.

