

EndoClot Adhesive

Ilgo veikimo lipnus polimeras hemostazei ir žaizdų apsaugai

Savybės:

- Hidrofilinis ir lipnus
- Sufiformuojantis gelis
- Ilgo veikimo
- Atsparus rūgštims

Privalumai:

- Stabdo kraujavimą
- Užsandarina žaizdas
- Sumažina pakartotinio kraujavimo riziką
- Apsaugo gleivinę

Kas yra EndoClot Adhesive?

EndoClot Adhesive tai sistema kontroliuojanti kraujavimą ir apsauganti gleivinę virškinamojo trakto procedūrų metu. Ją sudaro aplikatorius sujungtas su oro kompresoriumi, kuris efektyviai ir saugiai užpurškia hemostazines daleles ant žaizdos. Šios dalelės yra žinomos kaip prilimpantys hemostaziniai polimerai (Adhesive Hemostatic Polymers - AHP). Jos greitai suformuoja apsauginį gelio barjerą kraujavimo kontrolei ir užsandarina pažeidimą.

Kada naudojamas?

- Po EMR/ESD procedūrų
- Kraujuojančios opos atveju

Naudojimo technika

- Įjungus oro kompresorių, kateteris įkišamas į darbinį endoskopo kanalą, jo galas nustatomas 1-2cm nuo žaizdos vietos.
- Ant žaizdos išpurškiamas reikiamas dalelių kiekis sustabdyti kraujavimą ir apsaugoti žaizdą.
- Išjungus kompresorių, kateteris ištraukiamas iš endoskopo.

SPECIFIKACIJOS

EndoClot Adhesive			
Kodas	AHP dalelės	Kateterio ilgis	Pakuotė
ECA2303	3g	2300 mm	1 rink./dež. ar 5 rink./dež.
EA230	---	2300 mm	1 rink./dež. ar 5 rink./dež.

EndoClot Plus Co., Ltd

Unit 101, B8 Building, 218 Xinghu Street, Suzhou Industrial Park, Kinija
info@endoclot.com | www.endoclot.com

©2017 EndoClot Plus, Inc. All rights reserved.

EndoClot® Adhesive is patent pending in the US and other countries.

Vertimas Tisingas
Laura Jankušienė

2018.06.01