

Glass Liner yra šviesoje kietėjanti, rentgeno kontrastiška, ertmių dengimo (izoliacinė-pamušalinė) medžiaga.

Glass Liner pasižymi ypač dideliu tvirtumu spaudimui ir gera adhezija prie dentino.

Medžiaga naudojama po visų rūšių plombavimo medžiagomis ir šviesoje kietėjančiais kompozitais, išskiria fluoridus.

Techniniai duomenys:

Atsparumas spaudimui 200 MPa

Kietinamas sluoksnis (gylis) 5mm

Naudojimo rekomendacija:

Prieš preparato naudojimą nuvalykite danties paviršių, pašalinkite valymo priemonės likučius su vandens srove, nusausinkite suspausto oro srove.

Pirmąjį medžiagos sluoksnį denkite nestoresnį kaip 1mm. Norėdami padengti storesnį sluoksnį tai darykite sutvirtėjus ankstesniam sluoksniui.

Šis preparatas yra lengvai ir greitai kietinamas šviesa.

Polimerizacijos laikas 20 s.

Medžiagos perteklius pašalinamas medžiagai pilnai sukietėjus mechaniniu rotaciniu instrumentu (grąžteliai, deimantiniai šlifavimo diskeliai).

Laikymo sąlygos:

Medžiagą laikyti vėsioje patalpoje ne aukštesnėje kaip 20 °C temperatūroje , saugoti nuo šviesos

Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 3 metai.

Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės.

Nenaudokite medžiagos pasibaigus galiojimo terminui.

Pakuotė:

Išleidžiama švirkštuose

1 x 2ml ir aplikaciniai antgaliukai

CE sertifikato numeris 0482

Gamintojas:

Willmann & Pein GmbH (WP-Dental)

Schusterring 35
25355 Barmstedt

Tel.: (+49) 4123 - 9228-0

Fax.: (+49) 4123 - 9228-49

E-Mail: info@wp-dental.de

Igaliotas atstovas Lietuvoje:

UAB „Ortida“

Kalniečių g. 185-2, LT-50152 Kaunas

Tel.: +370 37 249211 Fax.: +370 37 249233

E.p.: ortida@ortida.lt

www.ortida.lt