

*Plasmasė Bazinis plokštelėms
Meadway HC*

Meadway supercure vartojimo instrukcijos

Maišymo proporcijos:

1. Apie 5 ar 10ml Heat Cure skysčio įpilti į maišymui skirtą indą ir apibarstyti Supercure milteliais per 30-40s. 2/3 kartus suduoti per indo šoną ir tuomet pašalinti miltelių perteklių atsargiai apverčiant maišymo indeli. Po to masę maišyti 45-60sek.
2. Standartiniai plokšteliai naudojama maždaug 23,4mg miltelių ir 10ml skysčio.
3. Kitais atvejais naudojama proporcija – 3,5 dalys miltelių su 1 dalimi Meadway Universal Heat Cure skysčio.

Masė sutirštės per 20 – 21min, esant 21⁰C.

Medžiagos pakavimas

Tešlos konsistencijos medžiaga sudedama į kiuvetes ir uždengiama polietileno gabalu. Uždaromas dangtelis ir lėtai spaudžiama presu. Po to dangtelis atidaromas, nuimamas polietilenas, aštriu įrankiu nupjaunamas ir pašalinamas perteklius, kuris netilpo į formą.

Vėl uždaromas dangtelis ir spaudžiama presu galutinai, tuomet įveržiame į lanką.

Medžiagos išėmimas:

Kiuvetės patalpinamos į šaltą arba šiltą vandenį, kuris lėtai užvirinamas, ne greičiau, kaip per 7 – 10min ir verdama apie 20min. Būtina įsitikinti, kad formos apsemtos bent 5 – 7cm vandens.

Esant labai tirštai masei galima taikyti kitą polimerizacijos metodą: Suspausta kiuvete patalpinama į verdantį vandenį ir paliekama 20min vėsti, po to vėl kaitinama kol užverda ir verdama ant silpnos ugnies dar apie 10min.