

VITASIL LIGHT

(instrukcija vartotojui)

Tai tikslaus atspaudų medžiaga, kurios pagrindą sudaro A-silikonas. Turi hidrofilinių savybių, gerai išlaiko formą.

Paskirtis

Antras sluoksnis dviejų sluosnių atspaudų technikoje, karinėms, tiltams, įklotams ir užklotams, kartu su Vitasil Putty A.

Klasifikavimas

Atitinka šiuos reikalavimus: ISO 4823 : 2000; tipas 3; dantų atspaudų elastomerinė medžiaga.

Dėmesio !

Nenaudokite latekso pirštinių. Rekomenduojamos PVC arba polietileno pirštinės. Nenaudokite su standartinėmis (kondensacijos reakcijos tipo) silikoninėmis atspaudų medžiagomis.

Atspaudų ėmimas

Medžiaga supakuota automatinio sumaišymo kasetėje. Pirmą kartą naudojant kasetę nuimkite gamyklinį dangtelį ir uždėkite sumaišymo antgaliuką. Naudojant aplikatorių medžiaga savaime sumaišoma ir išspaudžiama tiesiai į atspaudinį šaukštą ant pirmojo sluoksnio ir/arba tiesiai ant dantų. Baigus darbą sumaišymo antgaliuko nenuimkite, jis tarnaus kaip dangtelis iki sekančio panaudojimo. Nuplaukite atspaudą po tekančio vandens srove (apie 15 sekundžių).

Pastaba: pirmas ir antras atspaudų sluoksnis turi gerai sukibti. Todėl antrąjį sluoksnį turite nuimti ne vėliau kaip 30 min. nuo pirmojo sluoksnio nuėmimo.

Dezinfekavimas

Tinka įprastiniai tam naudojami skiediniai, įsitikinkite, kad skiedinys tinkamas A-silikono dezinfekavimui. Dezinfekuodami atspaudą laikykitės dezinfekcinės medžiagos naudojimosi instrukcijos rekomendacijų. Baigus dezinfekciją atspaudą nuplaukite po tekančio vandens srove (apie 15 sekundžių) ir nudžiovinkite.

Įėjimas

Atspaudą laikykite normaliose kambario sąlygose (iki 25 laipsnių C). Atspaudą galima pilti po 30 min. išėjus iš burnos. Kitų laiko apribojimų nėra.

Elektrinis metalo padengimas

Atspaudai gali būti padengti variu arba sidabru.

Galiojimo laikas

3 metai - laikant prie 15-25 laipsnių C.

Techniniai duomenys:

Maišymo laikas: 30 sek.

Visas darbo laikas: 2 min 15s (su maišymu).

Kietėjimo laikas: 4 min. 30s (su maišymu).

Rekomenduojamas laikymas burnoje: 3 min.

Dydžio pasikeitimas po 24 val.: mažiau kaip 0,4%.

Suspaudimas: mažiau kaip 0,4%.

Suspaudimo įtampa: 3-4,2%.

Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė - prailgina šiuos laikus.



Glušnių g. 27, LT - 80200 Bubiai, Šiaulių raj., Lietuva



VITASIL PUTTY A
(instrukcija vartotojui)

Tai tikslaus atspaudo medžiaga, kurios pagrindą sudaro A-silikonas. Turi hidrofilinių savybių, gerai išlaiko formą. Lengvai sumaišoma ir nelipni.

Paskirtis

Pirmas sluoksnis dviejų sluoksnių atspaudų technikoje karūnėlių, tiltų, įklotų bei užklotų gamybai, kartu su korekicine mase Vitasil Light

Klasifikavimas

Atitinka šiuos reikalavimus: ISO 4823 : 2000; tipas 0; elastomerinė dantų atspaudų medžiaga

Dėmesio !

Nenaudokite latekso pirštinių. Rekomenduojamos PVC arba polietileno pirštinės. Nenaudokite su standartinėmis (kondensacijos reakcijos tipo) silikoninėmis atspaudų medžiagomis. Nesukeiskite indelių dangtelių ir šaukštelių.

Maišymas

Imkite vienodus abiejų pastų kiekius (prie kambario temperatūros ir normalaus drėgnumo). Bazinę pastą imkite spalvotu šaukšteliu, o katalitinę - baltu. Minkykite medžiagą pirštais bent 45 sek., kol spalva pasidarys homogeniška.

Pastaba: po naudojimo tuoj pat uždarykite indelius.

Atspaudų ėmimas

Tinka visi atspaudiniai šaukštai, jei naudojate neperforuotus šaukštus, rekomenduojama naudoti ploną, lygų ADHESIVE sluoksnį. Paruošta suminkyta medžiaga dedama į paruoštą atspaudinį šaukštą. Pilną šauštą dėkite į burną ne vėliau kaip po 2 min. nuo maišymo pradžios. Padėtį išlaikyti bent 3 min. Tada šaukštą galima išimti. Nuplaukite atspaudą po tekančio vandens srove (apie 15 sekundžių).

Dezinfekavimas

Tinka įprastiniai tam naudojami skiediniai, įsitikinkite, kad skiedinys tinkamas A-silikono dezinfekavimui. Dezinfekuodami atspaudą laikykitės dezinfekcinės medžiagos naudojimosi instrukcijos rekomendacijų. Baigus dezinfekciją atspaudą nuplaukite po tekančio vandens srove (apie 15 sekundžių) ir nudžiovinkite.

Elektrinis padengimas metalu

Atspaudą galima padengti variu arba sidabru.

Liejimas

Atspaudą laikyti normalioje kambario temperatūroje (iki 25 laipsnių C). Atspaudą galima pilti po 30 min. išėmus iš burnos. Kitų laiko apribojimų nėra.

Galiojimo laikas

3 metai laikant prie 15- 25 laipsnių C temperatūros.

Techniniai duomenys:

Maišymo laikas	30 s
Visas darbo laikas (su maišymu)	1 min. 30 s
Kietėjimo laikas	4 min. 30s
Rekomenduojamas laikymas burnoje	3 min. 30s
Dydžio pasikeitimas po 24 val.	< 0.5 %
Suspaudimas	< 0.7 %
Suspaudimo įtampa	1,5-2,1 %
Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė - prailgina šiuos laikus.	



Gluosnių g. 27, LT - 80200 Bubiai, Šiaulių raj., Lietuva

