

Naudojimo instrukcija

PAVADINIMAS: OptiLube™

SUDĖTIS: kiekvienas 100 g turi:

- Glicerinas 0.80% • PEG 15.4%
- 4-Hydroxybenzoic acid esteriai 0.0308%
- Natrio hidroksidas 0.24% • Išvalytas vanduo 82.73%

NAUDOJIMAS: Naudoti kaip liubrikantą

KONTRAINDIKACIJOS: Jautrumas glicerinui

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

MAIŠELIAMS: Išimkite maišelį iš dėžutės, nuplėškite vieną galą ir uždėkite.

TŪTELĖMS: Nuimkite dangtelį ir nulupkite foliją nuo tūtelės galo, ir užtepkite OptiLube™ suteptąjį gelį ant instrumento ar odos, po naudojimo uždarykite.

REKOMENDUOJAMAS PANAUDOJIMAS:

OptiLube™ suteptantis gelis yra saugus ir efektyvus profesionalus ir asmeninis liubrikantas, rekomenduojamas:

- Kateterių įvedimui
- Endoskopijai • Sekso metu
- Prezervatyvų suteptimui • Klizmai/plovimui
- Rektaliniams termometrams • Ginekologinei apžiūrai
- Bendroms ligoninės procedūroms • Rankiniams ir instrumentiniams tyrimams.

OptiLube™ yra nekenksmingas žmogaus audiniams ir negadina guminių, metalinių prietaisų, instrumentų ir natūralių ar sintetinių tekstilijų. OptiLube™ nėra kontraceptikas.

ŠALUTINIAI EFEKTAI IR SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Atsargumo priemonės: Jei produktas pažeistas ar sandarinimas atidarytas, sterilumas negarantuojamas.

Įspėjimai: Jei atsiranda sudirginimas, nutraukite naudojimą ir pasikonsultuokite su gydytoju. Venkite kontakto su akimis. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

IDENTIFIKACIJA: Sterilus, permatomas, vandenyje tirpus gelis, neriebus ir lengvas.

PAKUOTĖS:

Tūtelės: 5g, 42g, 82g, 113g

Maišeliai: 2.7g, 5g

SAUGOJIMO INSTRUKCIJOS:

Laikykite tarp 5 - 30°C.

Gamintojas:

Optimum Medical Solutions 12/2013 • Versión 4.0 12/2013 • versão 4.0

47 Park Square East, Leeds, LS1 2NL, UK

Tel.: +44 (0) 8456 435 479

Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk

www.optimummedical.co.uk

