



IRiS šoninis optinis
pluoštas
Naudojimo instrukcija

Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, atidžiai
perskaitykite ir laikykitės instrukcijos
Saugokite ją, nes gali prireikti ateityje

PERSPĖJIMAS:
UŽSPRINGIMO PAVOJUS – Mažos dalys
Netinka iki 3 metų vaikams.



experia
innovation in every sense

Sveikiname įsigijus IRiS Šoninį optinį pluoštą!

Mūsų IRiS Šoninis optinis pluoštas pagamintas iš saugaus šviesolaidžio, galima pasirinkti iš įvairių dydžių. Jis gali būti iš anksto integruotas į Burbulų Vamzdžio minkštasuolį arba minkštą kvadratinį baldą.

→ 3 parametro b) 1 punktą

Mūsų IRiS Šoniniame optiniame pluošte naudojama naujausia technologija kartu su iRiS LED šviesos šaltiniu su optiniu pluoštu (2m 150 sruogų). Tai naudotojams leidžia sukurti stimuliuojančias, interaktyvias, įvairius pojūčius aktyvuojančias aplinkas, o su mūsų naująja NEMOKAMA iRiS+ programėle savo iRiS+ LED Šviesolaidį bevieliu ryšiu galėsite valdyti su iPad, iPhone arba iPod Touch*.

→ 3 parametro b) 2-3 punktai

IRiS Šoninis optinis pluoštas yra IRiS Imtuvas ir gali būti valdomas su neribotu skaičiumi IRiS Siųstuvų.

→ 3 parametro b) 5 punktą

IRiS Šoninis optinis pluoštas turi 30mm jungtį, kuri leidžia jį prijungti prie bet kokio šviesos šaltinio, pasyvaus, interaktyvaus, IRiS ar kito formato.

Šviesolaidžio naudojimas yra saugus ir labai paprastas. Šviesolaidyje nėra jokių elektrinių elementų. Vis dėl to yra keli su sauga susiję dalykai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti.

→ 3 parametro b) 4 punktą

Prieš įrengiant ir naudojant šį įrenginį prašome būtinai atidžiai perskaityti šią instrukciją ir jos laikytis, Prašome saugoti šį naudojimo vadovą, nes jo gali prireikti ateityje.

Sauga

Prieš naudojant reikią atlikti rizikos įvertinimą su kiekvienu žmogumi, kuris naudosis IRiS Šoniniu optiniu pluoštu.

Visada pasirūpinkite, kad IRiS Šoninis optinis pluoštas nebūtų dedamas į burną.

Pasirūpinkite, kad IRiS Šoninį optinį pluoštą naudojantis asmuo būtų visą laiką prižiūrimas.

Neleiskite apšvietimo apvynioti aplink žmogaus kaklą.

Naudojimo pradžia

1. Paprasčiausiai suraskite šviesolaidžio jungtį ir užveržkite,
2. Įjunkite šviesos šaltinį.

Valymas ir priežiūra

IRiS Šoninis optinis pluoštas turi būti valomas bent kartą per savaitę, tirpalu arba šiltu vandeniu ir neabrazyviniu valikliu (turėtų tikt nedidelis kiekis plovimo skysčio). Pamirkykite šviesolaidą tirpale ir nuvalykite audeklu tada leiskite jam natūraliai nudžiūti. Jungties (metalinio šviesolaidžio galo) nemerkite į tirpalą. Priklausomai nuo naudojimo, gali prireikti valyti dažniau. IRiS Šoninis optinis pluoštas turi būti atpainiotas ir ištiesintas bent kartą per savaitę, kad užtikrinti jo optimalų stovį.

Problemų sprendimas

K. Šoninis optinis pluoštas nešviečia.

A1. Ar jis prijungtas prie šviesos šaltinio? Jeigu taip,

A2. Ar Šviesolaidinis šviesos šaltinis įjungtas? Jeigu taip,

A3. Jeigu Šviesolaidinis šviesos šaltinis yra interaktyvus, ar jis buvo aktyvuotas? Jeigu taip,

A4. Ar veikia Šviesolaidinio šviesos šaltinio lempa? Jeigu taip,

A5. Susisiekite su mumis.

Kontaktinė informacija

JAV rašykite e-paštu support@experia-usa.com.

JK ir visose kitose pasaulio šalyse rašykite e-paštu support@experia-innovations.co.uk.

Telefonas: 0044 (0) 845 644 0977.

Atkreipkite dėmesį: e-paštas yra mūsų komandos pageidaujama komunikavimo priemonė ir jai teikiama didesnė svarba nei telefono skambučiams.

KLAUSIMAI IR IDĖJOS?

Jeigu turite minčių kaip pagerinti šį produktą arba norite realizuoti savo produktų idėjas, prašome susisiekti e-paštu: ideas@experia-innovations.co.uk.

Visos idėjos pateikiamos mūsų OT, technikos ir finansų skyriui ir jeigu visos procedūros tinkamai praeinamos, mes su jumis susisieksime dėl tolimesnio idėjos aptarimo.

Mes nepažadame sukurti kiekvieno produkto, bet jeigu tai puiki idėja, mes pasistengsime!

Jungtinėje Karalystėje su pasididžiavimu pagamino:

Experia

Lydia Pinkham House, 3 Spring Hill Road, Barnsley, South Yorkshire, UK, S72 7BQ



© Autorinės teisės 2010 Experia. Visos teisės saugomos Experia. Experia yra registruotas prekinis ženklas.

Vertingą turiną:

[Signature]

Direktorius
Henrikas Kasperavičius