

IRiS vibracijos valdiklis

Naudojimo instrukcija

Kad pasiektumėte optimalių rezultatų,
prašome atidžiai perskaityti ir vadovautis
instrukcijomis.

Prašome išsaugoti jas ateičiai.

ĮSPĖJIMAS:

PAVOJUS UŽSPRINGTI – smulkios detalės
Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus.

Nuo 3 m.

Sveikiname įsigijus „IRiS“ vibracijos valdiklį!

„IRiS“ vibracijos valdiklis sukurtas tiems žmonėms, kurie turi specialiųjų poreikių, ir, jei naudojamas laikantis šių rekomendacijų, mokys ir džiugins daug metų!

„IRiS“ vibracijos valdiklis puikiai tinka žmonėms, kurių stambiosios ir smulkiosios motorikos judesiai silpni. Lengvai papurtykite valdiklį – pasikeis „IRiS“ LED burbulų vamzdžio ir IRiS LED optinio pluošto šviesos šaltinio spalvos.

Pasirūpinkite, kad turėtumėte šiuo prietaisu valdomą „IRiS“ komponentą.

„IRiS“ vibracijos valdiklis – tai ypatingai jautrus „IRiS“ valdiklis, kuris švelniai vibruoja arba energingai juda įvairiomis kryptimis. Su šiuo „IRiS“ vibracijos valdikliu valdykite bet kurį „IRiS“ komponentą.

Prieš montuojant ar naudojantis prietaisu, prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai.

Paisykite visų ant prietaiso ir šioje instrukcijoje nurodytų įspėjimų. Jei šį prietaisą gavęs naudotojas įtaria, kad yra defektų ir (arba) reikalingas remontas, nes prietaisas neveikia ar yra sugadintas, prašome nedelsiant susisiekti su gamintoju. Turėkite omenyje, kad neteisingai sumontavus ir (arba) netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojant prietaisą, naudotojas gali susižaloti, mirti arba patirti nepageidaujamų reakcijų. Šį prietaisą turi montuoti ir (arba) naudoti kvalifikuotas specialistas. Nesilaikant šių atsargumo priemonių arba konkrečių šioje instrukcijoje nurodytų įspėjimų, pažeidžiami prietaiso konstrukcijos, gamybos ir naudojimo pagal paskirtį saugos standartai.

Savybės

- Suderinamas su „IRiS“ belaidžiais prietaisais
- Paprasta naudotis
- 4 veikimo režimai
- Reguliuojamas jautrumas vibracijoms
- 2 metų gamintojo garantija („Collect and Return“)

7 parametro 2 punktas

5 parametro e) 2 punktas

5 parametro e) 3 punktas

Pakuotės turinys

1 x „IRiS“ vibracijos valdiklis
1 x 9 V transformatorius
1 x baterijų įkroviklis

5 parametro e) 4 punktas

Pradžia

1. „IRiS“ vibracijos valdiklis, aktyvintas vibravimu arba judesiu, valdo „IRiS“ komponentus.
2. „IRiS“ vibracijos valdiklio jautrumas reguliuojamas.
3. Jungiklis ant prietaiso – jo dešinėje.
4. Nuspręskite, kurį „IRiS“ komponentą norite valdyti prietaisu ir susiekite prietaisą su juo, žr. skyrių „Susiejimas su „IRiS“ valdikliais“.
5. Dabar prietaisas paruoštas naudojimui. Įjunkite „IRiS“ vibracijos valdiklį, ir komponentas reaguos.

Susiejimas su „IRiS“ komponentais

Kad galėtumėte naudotis „IRiS“ vibracijos valdikliu, turėsite susieti jį su savo „IRiS“ komponentais. Ši procedūra padalyta į 2 dalis: tiems, kurie neturi „IRiS“ „centrinio valdymo pulto“ ir tiems, kurie turi.

Be „IRiS“ „centrinio valdymo pulto“

Ant kiekvieno „IRiS“ komponento yra mygtukas, vadinamas susiejimo mygtuku. Kad „IRiS“ vibracijos valdiklis veiktų kartu su komponentu, pirmiausiai įjunkite „IRiS“ vibracijos valdiklį, tuomet suraskite ir paspauskite ant komponento esantį susiejimo mygtuką. Po to turėsite atlikti judesį, aktyvuojantį „IRiS“ vibracijos valdiklį per 5 sekundes. Teisingai susiejus, „IRiS“ komponento spalva pasikeis kaskart atlikus judesį.

Su „IRiS“ „centrinio valdymo pultu“

Kad „IRiS“ vibracijos valdiklis veiktų kartu su komponentu, pirmiausiai įjunkite „IRiS“ vibracijos valdiklį, tuomet nuspręskite, kurį prietaisą norite valdyti, suraskite ir paspauskite jo susiejimo mygtuką ant „IRiS“ „centrinio valdymo pulto“. Po to turėsite atlikti judesį, aktyvuojantį „IRiS“ vibracijos valdiklį per 5 sekundes. Teisingai susiejus, „IRiS“ komponento spalva pasikeis kaskart atlikus judesį.

Valymas ir priežiūra

Prietaisas valomas drėgna minkšta šluoste. Įsisenėjusioms dėmėms išvalyti galima naudoti neabrazyvinę valymo priemonę. Pasirūpinkite, kad į prietaisą nepatektų skysčio.

Prietaisas sukurtas naudoti žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių, tačiau tai NEREIŠKIA, kad jis nesulaužomas. Turite pasirūpinti, kad jo nenumestų, nemėtytų, ant jo neliptų, nepanardintų į vandenį ir pan.

Trikčių šalinimas

Kl. Prietaisas neveikia.

A1. Ar jis įjungtas? Jei taip,

A2. ar susietas su „IRiS“ komponentu? Jei taip,

A3. „IRiS“ valdiklio baterija visiškai įkrauta? Jei taip, prašome susisiekti su mumis.

Kontaktinė informacija

JAV el. paštu: support@experia-usa.com

Kanadoje el. paštu: support@experia-canada.com

JK ir likusiai pasaulio daliai: support@experia-innovations.co.uk

Tel. Nr. 0044 (0) 845 644 0977.

Prašome atkreipti dėmesį: mūsų pagalbos komanda pirmenybę teikia bendravimui el. paštu, o ne telefonu.

TURITE KLAUSIMŲ IR SUMANYMŲ?

Jei turite sumanymą, kaip patobulinti šį gaminį, arba norite pamatyti, kaip įgyvendinamas Jūsų sumanymas, prašome rašyti el. paštu: ideas@experia-innovations.co.uk.

Visi sumanymai pateikiami mūsų OT, technikos ir finansų departamentui ir, jei atitinka visas procedūras, mes susisieksime su Jumis, kad aptartume Jūsų sumanymą.

Negalime pažadėti, kad tobulinsime kiekvieną gaminį, bet jei tai puikus sumanymas, pamėginsime!

Su pasididžiavimu pagaminta JK:

„Experia“, Lydia Pinkham House, 3 Spring Hill Road, Park Springs, Barnsley, Pietų Jorkšyras, S72 7BQ.



© „Experia“, 2010–2011, visos teisės saugomos. „Experia“ yra registruotas prekės ženklas.

Vertingą turtiną:

[Signature]

Direktorius
Henrikas Kasparavičius