

iWASH™ and miniiWASH™

Išimtinai ALCOR® ESR analizatoriams



REF

112-12-001
112-12-003

iWASH for iSED ESR Analyzer, 4 x 500 mL
miniiWASH for miniiSED ESR Analyzer, 4 x 250 mL

CE

IVD

PASKIRTIS

ALCOR Scientific Inc. iWASH tirpalas skirtas naudoti su iSED ESR analizatoriumi, o miniiWASH tirpalas skirtas naudoti su miniiSED ESR analizatoriumi, kaip šių analizatorių plovimo tirpalai.

SANTRAUKA IR PRINCIPAS

iWASH / miniiWASH naudojamas savaiminiam įrenginio išsivalymui po to, kai jis buvo nenaudojamas penkiolika (15) minučių po paskutinio bandinio. Procesas trunka maždaug vieną (1) minutę. Baigę bandymą galima tęsti kaip įprasta. iWASH/miniiWASH partijos numeris ir galiojimo laikas yra nurodyti ant dėžutės ir buteliuko dugno.

SUDĖTIS

Sudėtis: I tipo itin grynas vanduo

Butelis: didelio tankio polietilenas (HDPE)

LAIKYMAS IR STABILUMAS

Šis produktas yra stabilus iki galiojimo datos, nurodytos ant dėžutės.

Laikymo temperatūra nuo +5°C iki +40°C.

PROCEDŪRA

Išsamią procedūrą rasite iSED naudotojo vadove (112-09-043) arba miniiSED naudotojo vadove (1017-09-001).

1. Atjunkite LUER jungtį nuo iWASH/miniiWASH filtro dangtelio.
2. Iš analizatoriaus išimkite tuščią iWASH/miniiWASH buteliuką.
3. Nuimkite sandarinimo dangtelį nuo naujo iWASH/miniiWASH buteliuko.
4. Atsukite filtro dangtelį nuo tuščio buteliuko ir priveržkite jį ant naujo iWASH/miniiWASH buteliuko.
5. Įdėkite naują buteliuką į analizatorių. Tvirtai vėl prijunkite LUER jungtį prie filtro dangtelio. iSED® ventiliacijos anga turi būti viršuje, kad būtų išvengta nuotėkio. MiniiSED® ventiliacijos anga turi būti vertikaliai.

Dėl papildomos literatūros, kalbos, klausimų, susijusių su aukščiau pateikta informacija, susisieki su mūsų techninės pagalbos skyriumi. Įmonės atstovai gali jums padėti nuo pirmadienio iki penktadienio 8:30 – 17:00. Su jais galite susisiekti paskambinę numeriu 1.800.495.5270 (JAV) arba +1.401.737.3774

Jeigu jums reikia skubios techninės pagalbos, pasinaudokite balso pašto pranašumais, kuriuos reguliariai konsultuos mūsų techninės priežiūros inžinieriai.



ALCOR Scientific Inc.
20 Thurber Boulevard

(Phone) 800.495.5270 ☐ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM

Australian Sponsor
Emergo Australia
Level 20 Tower II

201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000
Australia

Smithfield, Rhode
Island 02917 USA
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague

Darling Park The Netherlands