





Susipažinimas su analizatoriumi 2

Analizatoriaus apžvalga

Vaizdas iš priekio

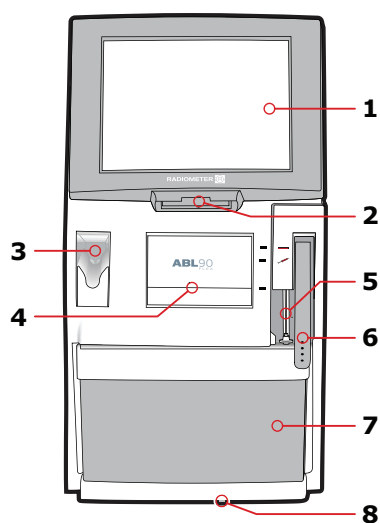

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| 1 | Jutiklinis ekranas | 5 | Iėjimo tarpinės laikiklis |
| 2 | Brūkšinių kodų skaitytuvas | 6 | Ileidimo rankena |
| 3 | Mėginių maišytuvas (<i>safePICO</i> mėginiams) | 7 | Tirpalų paketas |
| 4 | Jutiklių kasetės skyrius | 8 | Baterijos indikatoriaus lemputė |

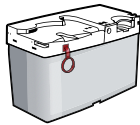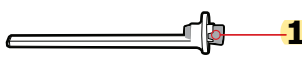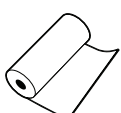Naudojimo reikmenys	Aprašymas
Tirpalų paketas 	Jame yra paketai su AK ir kalibravimo medžiaga, skalavimo tirpalu, dujų mišiniu ir uždari indai skystoms bei krešulių atliekoms laikyti
Įėjimo tarpinės laikiklis 	Laiko įėjimo tarpinę (1). Tai, kur jūs dedate mėginių paėmimo prietaisą mėginiui įsiurbti.
Spausdinimo popierius 	Popierius, skirtas terminiams spausdintuvams

Informacijos apie įdėtus naudojimo reikmenis peržiūra


1. Spustelėkite **Meniu > Analizatoriaus būseną > Naudojimo reikmenys**. Rodoma apžvalga.
2. Pasirinkite parinktį ir vykdykite jos veiksmus.

Parinktis	Veiksmai
Norėdami matyti daugiau duomenų apie tirpalų paketą	Spustelėkite Būsena > Tirpalų paketas
Norėdami matyti daugiau duomenų apie jutiklių kasetę	Spustelėkite Būsena > Jutiklių kasetę

Ar analizatorius paruoštas naudoti?


Trys svarbios sąlygos

Analizatorius yra paruoštas naudoti, kai įvykdytos šios trys sąlygos.


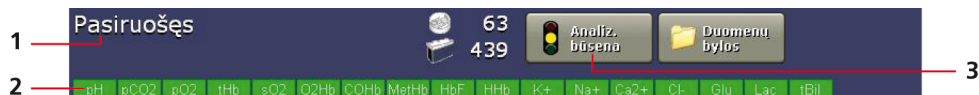


1. Įsitikinkite, kad analizatorius yra **Pasiruošęs**.
2. Parametrų, kurių rezultatus norite gauti, skirtukų spalva yra žalia arba geltona.
3. Šviesoforo spalva ant mygtuko **Analizatoriaus būseną** yra žalia arba geltona.

7. Laikykite įėjimo modulį, kaip parodyta, suspauskite pirštus ir patraukite į dešinę.

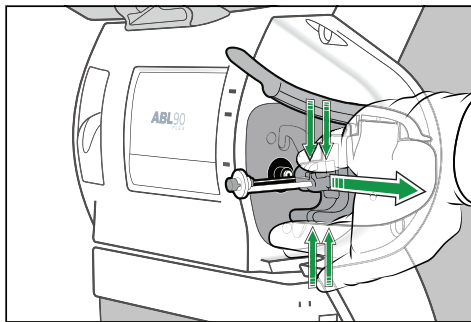

8. Spustelėkite mygtuką **Veiksmas atliktas** keturis kartus.
 9. Kai analizatorius nurodys, laikykite naują įėjimo modulį, kaip parodyta, suspauskite pirštus ir paspauskite įėjimo jungties galą, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.

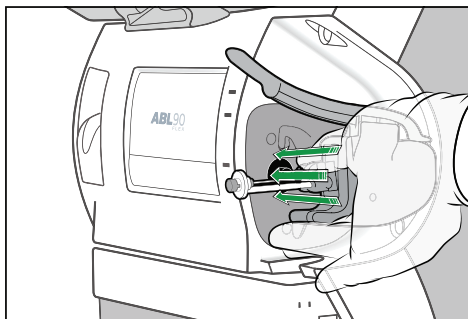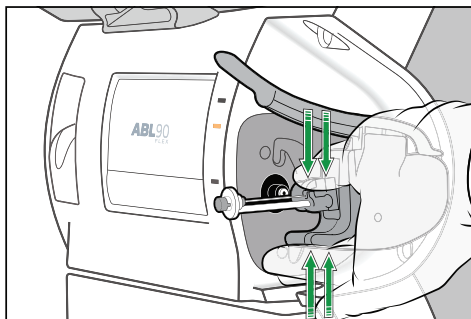


10. Spustelėkite mygtuką **Veiksmas atliktas**.
 11. Uždarykite įėjimo angą.
 12. Uždekite įėjimo dangtelį.
 13. Spustelėkite mygtuką **Veiksmas atliktas**.

Įėjimo tarpinės laikiklis

Įėjimo tarpinės laikiklio keitimas

Būtinai reikmenys

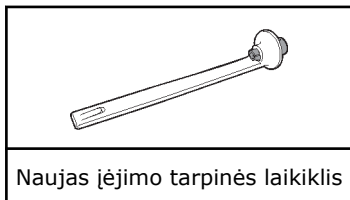

Naujas įėjimo tarpinės laikiklis

⚠ ĮSPĖJIMAS – Infekcijos pavojus

Neįsidurkite ar nesusibraižykite įėjimo zondų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Infekcijos pavojus

Naudotas įėjimo tarpinės laikiklis turėjo sąlytį su krauju ir su juo turi būti elgiamasi kaip su potencialiai infekciniu.

1. Spustelėkite **Meniu > Analizatoriaus būseną**.
2. Spustelėkite mygtukus **Kitos veiklos > Įleidimo tikrinimas > Keisti įėjimo tarpinės laikiklį**.