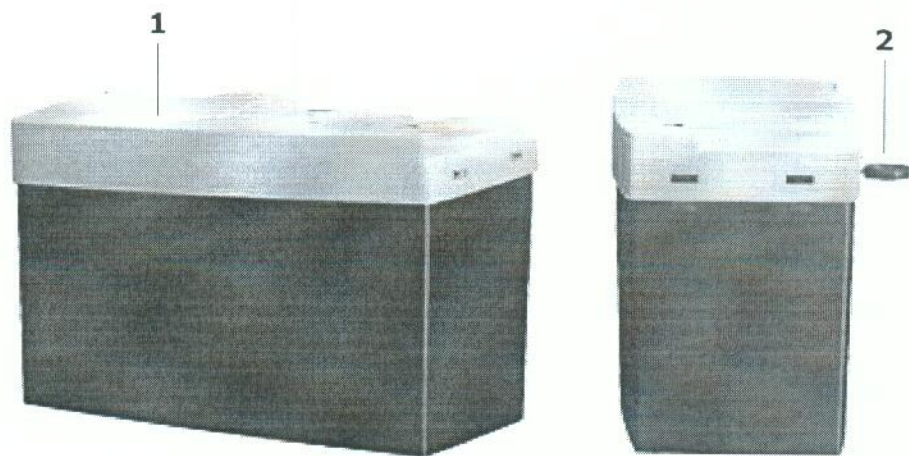


Tirpalų pakuotė



1

Biologinio pavojaus etiketė

Prieš montuodami tirpalų pakuotę nuimkite viršaus dangtelį nuo etiketės ant tirpalų pakuotės, kad pasirodžiusi biologinio pavojaus etiketė primintų jums, kad tirpalų pakuotę reikia išmesti po naudojimo kaip infekcines atliekas.

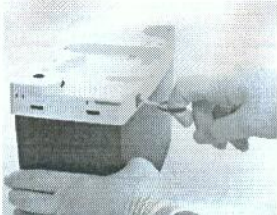
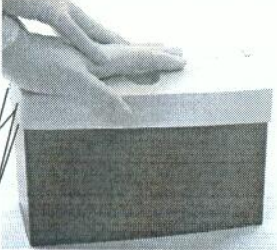
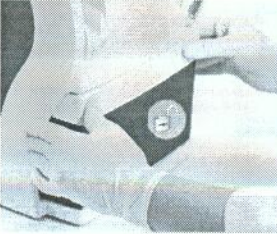
2

Apsauginis kaištis

Norėdami suaktyvinti naują tirpalų pakuotę, nuimkite apsauginį kaištį ir spustelkite dangtelį žemyn (daugiau informacijos žr. *Tirpalų pakuotė* dalyje *Pakeitimai* šio vadovo 7 skyriuje: *Pakeitimai*).

Tirpalų pakuotė

Tirpalų pakuotės keitimas

Žingsnis	Veiksmas	
1.	Paspauskite Meniu > Analizatoriaus būseną > Pakeitimai > Pakeisti > Pakeisti tirpalus .	
2.	Pakelkite įleidimo angą iki kapiliaro padėties ir palaukite, kol tirpalas pakuotėje atsirakins.	
3.	Išimkite panaudotą tirpalų pakuotę ir išmeskite kaip infekcines atliekas pagal savo įstaigos taisykles.	
4.	Aktyvuokite naują tirpalų pakuotę patraukę už apsauginio kaištelio.	
5.	Tvirtai iki galo nuspauskite dangtelį žemyn iškiliojoje pusėje (ten, kur buvo apsauginis kaištelis), kol šonas įsispraus į šonines angas. Šoninių įtvirtinimų angelės Šoniniai įtvirtinimai	
6.	Nuimkite viršaus dangtelį nuo etiketės ant tirpalų pakuotės, kad pasirodžiusi biologinio pavojaus etiketė primintų jums, kad tirpalų pakuotę reikia išmesti po naudojimo kaip infekcines atliekas.	
7.	Įdėkite naują tirpalų pakuotę iki galo įstumdami ją į analizatorių, kol pasigirs trakstelėjimas.	
8.	Analizatoriui paraginus uždarykite įleidimo angą.	