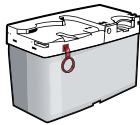
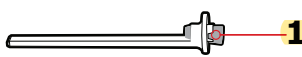
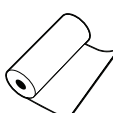


Naudojimo reikmenys	Aprašymas
Tirpalų paketas 	Jame yra paketai su AK ir kalibravimo medžiaga, skalavimo tirpalu, dujų mišiniu ir uždari indai skystoms bei krešulių atliekoms laikyti
Įėjimo tarpinės laikiklis 	Laiko įėjimo tarpinę (1). Tai, kur jūs dedate mėginių paėmimo prietaisą mėginiui įsiurbti.
Spausdinimo popierius 	Popierius, skirtas terminiams spausdintuvams

Informacijos apie įdėtus naudojimo reikmenis peržiūra


1. Spustelėkite **Meniu > Analizatoriaus būseną > Naudojimo reikmenys**. Rodoma apžvalga.
2. Pasirinkite parinktį ir vykdykite jos veiksmus.

Parinktis	Veiksmai
Norėdami matyti daugiau duomenų apie tirpalų paketą	Spustelėkite Būsena > Tirpalų paketas
Norėdami matyti daugiau duomenų apie jutiklių kasetę	Spustelėkite Būsena > Jutiklių kasetę

Ar analizatorius paruoštas naudoti?

Trys svarbios sąlygos

Analizatorius yra paruoštas naudoti, kai įvykdytos šios trys sąlygos.

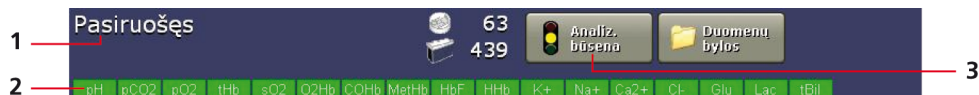

1. Įsitikinkite, kad analizatorius yra **Pasiruošęs**.
2. Parametrų, kurių rezultatus norite gauti, skirtukų spalva yra žalia arba geltona.
3. Šviesoforo spalva ant mygtuko **Analizatoriaus būseną** yra žalia arba geltona.

Jutiklių kasetės būsenos bylų eksportavimas

Būtinės sąlygos


- Turima USB atmintinė

1. Įstatykite USB atmintinę.
2. Spustelėkite **Meniu > Duomenų bylos > Pakeitimų byla**.
3. Pasirinkite veiksmą „Jutiklių kasetė išimta“.
4. Spustelėkite mygtuką **Eksportuoti būsenos bylas**.


Terminis spausdintuvo popierius

Terminio spausdintuvo popieriaus keitimas

Būtinai reikmenys

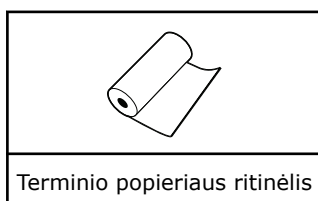

1. Spustelėkite **Meniu > Analizatoriaus būseną**.
2. Spustelėkite mygtukus **Naudojimo reikmenys > Pakeisti > Popierius**.
3. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką.

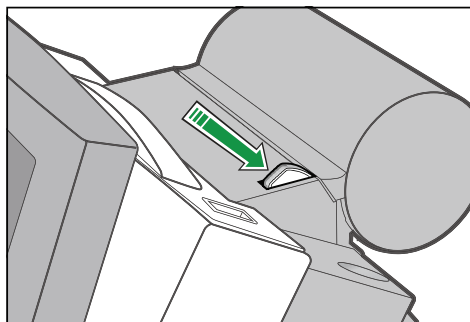

4. Atidarykite dangtį ir išimkite sunaudoto popieriaus ritinėlį.
5. Įdėkite naują popieriaus ritinėlį. Įsitikinkite, kad popierius atsivynioja iš apačios.
6. Įsitikinkite, kad šiek tiek popieriaus išlenda iš spausdintuvo.
7. Uždarykite dangtį. Dangtis turi spragtelėjęs užsifiksuoti.
8. Spustelėkite mygtuką **Pakeista**.
9. Įveskite reikiamus duomenis.
10. Spustelėkite mygtuką **Gerai**.

Spausdintų duomenų apsauga

PASTABA: Saugokite ant terminio popieriaus išspausdintus analizatoriaus duomenis nuo aukštos temperatūros, didelės drėgmės, tiesioginių saulės spindulių, vandens, alkoholio arba organinių tirpiklių, ką tik padarytų diazo kopijų lapų arba medžiagų, kuriose yra polivinilchlorido (PVC), ir nesubraižykite jų. Laikykite spausdintus duomenis polietileno, polipropileno arba poliesterio aplankuose arba dėžėse.

Jutiklių paketai – kodų numeriai

Pozicija	Tūris	Kodo numeris (REF)
SP90	680 veiklų	944-157 944-197 (tik Vokietija)
SP90 XL	980 veiklų	944-457 944-497 (tik Vokietija)

Jutiklių kasetės – kodų numeriai

Jutiklio kasetės būna skirtingų versijų.

Santrumpos apibrėžia parametrus, kuriuos gali matuoti kiekviena jutiklių kasetė.

- BG = pH, $p\text{CO}_2$, $p\text{O}_2$
- LYT = $c\text{Ca}^{2+}$, $c\text{K}^+$, $c\text{Na}^+$, $c\text{Cl}^-$
- MET = $c\text{Glu}$, $c\text{Lac}$
- OXI = ctHb , $s\text{O}_2$, FO_2Hb , FMetHb , FCOHb , FHHb , FHbF , ctBil

Visoms šalims		Jutiklių kasečių versijų kodų numeriai (REF)		
Tyrimų skaičius	Stabilumas transportuojant	Jutiklių kasečių versijų kodų numeriai (REF)		
		SC90 BG, LYT, OXI + QC	SC90 BG, LYT, MET, OXI + QC	SC90 BG, LYT, MET, ctHb + QC
100	30 dienų	Nėra	946-010	Nėra
300	30 dienų	Nėra	946-005	946-059
600	30 dienų	946-013	946-008	Nėra
900	30 dienų	Nėra	946-009	Nėra
1200	30 dienų	Nėra	946-060	Nėra

Atsarginės dalys ir priedai – kodų numeriai

gaminys	Kodo numeris (REF)
Spausdintuvo popierius (8 ritinėliai)	984-070
ABL90 FLEX analizatoriaus krešulių gaudytuvas	906-026
ABL90 FLEX įėjimo gnybtas	925-047
ctHb kalibravimo tirpalas S7770	944-021
Įėjimo zondas	924-455