

REF	CONTENT	SYSTEM
06390552001	▽ 400	cobas u 701 mikroskopijos analizatorius

Lietuvių

Paskirtis

cobas u cuvette tai kasetė su kiuvetėmis, skirta kiekybiniam in vitro eritrocitų ir leukocitų, pusiau kiekybiniam plokščiojo ir neplokščiojo epitelio ląstelių, bakterijų, hialino cilindrių ir kokybiniam patologinių cilindrių, kristalų, mielių, gleivių ir spermų nustatymui šlapime, naudojant **cobas u 701** mikroskopijos analizatorių. Šie tyrimai yra naudingi tiriant inkstų ligas ir šlapimo organų infekcijas.

Tik profesionaliam naudojimui.

Santrauka

Kiuvetės yra naudojamos šlapimo nuosėdų tyrimui, atliekamame **cobas u 701** mikroskopijos analizatoriuje.

Atsargumo priemonės ir įspėjimai

Skirtas naudoti in vitro diagnostikai sveikatos priežiūros specialistams. Laikykites įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Infekcinės ir mikrobiologinės atliekos:

Įspėjimas: su atliekomis dirbkite kaip su potencialiai biologiškai pavojingomis medžiagomis. Atliekas šalinkite pagal priimtas laboratorijos instrukcijas ir procedūras.

Pavojus aplinkai:

Laikykites visų galiojančių vietinių šalinimo reglamentų, kad pasirinktumėte saugų šalinimą.

Saugos duomenų lapas pateikiamas profesionaliems naudotojams paprašius.

Skirta JAV: DÉMESIO: Federaliniai įstatymai leidžia šį prietaisą parduoti tik gydytojui arba gydytojo paskyrimu.

Laikymo sąlygos ir stabilumas

Laikykite **cobas u cuvette** 2-40 °C temperatūroje.

Pateiktos medžiagos

- [REF] 06390552001, **cobas u cuvette** su 400 kiuvėčių

Reikalingos (bet nepateikiamos) medžiagos


- [REF] 06390501001, **cobas u 701** mikroskopijos analizatorius
- Bendra laboratorijos įranga

Paruošimas

Paruošti naudojimui.

1. Atidarykite popierinę dėžutę ir išimkite **cobas u cuvette**.
2. Žirklių pagalba nuimkite plastikinę plėvelę nuo kiuvėčių talpyklės.
3. Nedelsdami patalpinkite **cobas u cuvette** į **cobas u 701** mikroskopijos analizatorių.

Laikykites tinkamo patalpinimo ir pozicionavimo instrukcijų, nurodytų analizatoriaus ekrane.

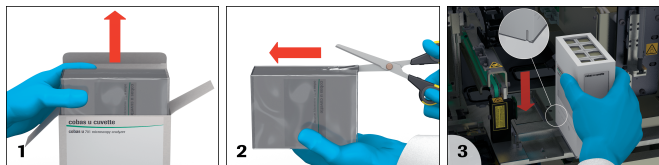

Atkreipkite dėmesį: Neatidarykite **cobas u cuvette**.

Nelieskite kiuvėčių. Kiuvetės neturėtų būti pakartotinai patalpinamos į kiuvėčių talpyklę, jeigu jos patalpinamos į talpyklę pakartotinai, sistemos matavimo funkcijos negali būti užtikrintos.

Nepašalinkite dalinai panaudotos kiuvėčių talpyklės kol analizatorius dar veikia.

Iš **cobas u 701** mikroskopinio analizatoriaus išimtą dalinai panaudotą kiuvėčių talpyklę visada laikykite statmenai.

Kiuvėčių talpyklės apvertimas gali apriboti likusių kiuvėčių panaudojimą.

Kad tyrimas būtų atliktas tinkamai, laikykites šiame dokumente pateiktų analizatoriaus naudojimo instrukcijų. Specifines analizatoriui tyrimo instrukcijas skaitykite atitinkamame naudotojo vadove.

Pritaikymų nepatvirtintų Roche veikimas nėra užtikrintas ir turi būti apibrėžtas vartotojo.

Tyrimo charakteristikų duomenys

Apie tyrimo charakteristikų duomenis skaitykite atitinkamame naudotojo vadove.

Išsamesnės informacijos ieškokite jus dominančio prietaiso naudotojo vadove ir visų reikalingų komponentų pakuočių informaciniuose lapeliuose.

Šiuose informaciniuose lapeliuose kaip dešimtainės trupmenos skyriklis visada naudojamas taškas, skiriantis sveikąjį skaičių nuo dešimtainės trupmenos skaitmenų. Tūkstančių skyrikliai nenaudojami.

Bet koks rimtas įvykis, kurio atsiradimas yra susijęs su prietaiso naudojimu, turėtų būti pranešamas gamintojui ir kompetentingai valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir / ar pacientas, institucijai.

Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardytų standarte ISO 15223-1 (skirta JAV: naudojamų simbolių apibūdinimo ieškokite dialog.roche.com):

CONTENT	Rinkinio turinys
SYSTEM	Analizatoriai / instrumentai, su kuriais gali būti naudojami reagentai
REAGENT	Reagentas
CALIBRATOR	Kalibratorius
→	Tirpinimo tūris
GTIN	Visuotinis prekybos identifikacijos numeris (angl. Global Trade Item Number)
UDI	Unikalūs prietaiso identifikatoriai

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėje.

© 2021, Roche Diagnostics

Pagaminta Vengrijoje



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

+800 5505 6606



JAV platina:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
JAV vartotojų techninė pagalba 1-800-428-2336