

Deproteinizer

cobas®

REF	CONTENT	SYSTEM
03110435180	125 mL	9180 Electrolyte Analyzer cobas b 221 <2> sistema cobas b 221 <4> sistema cobas b 221 <6> sistema

Lietuvių

Paskirtis

Deproteinizer skirtas naudoti su **cobas b 221** sistema ir 9180 Electrolyte Analyzer instrumentu tyrimo aplinkoje arti paciento analizatoriaus dezinfekcijai.

Be to, jis naudojamas **cobas b 221** atliekų separatoriaus, T&D disko, vamzdžių takų nukenksminimo sistemai ir ištuštinant W Waste Container norint nuvalyti jos išorę, taip pat matavimo kamerai nukenksminti, kai ji užteršta (baltymų nuosėdomis) arba kai mėginio kelio komponentai turi būti keičiami.

Santrauka

Deproteinizer naudojamas tik profesinėje aplinkoje arti paciento, pvz., intensyviosios terapijos zonoje, skubios pagalbos skyriuose ir operacinėse, taip pat ligoninių laboratorijose.

Daugiau informacijos apie darbą su reagentu rasite naujausiose 9180 Electrolyte Analyzer naudojimo instrukcijose arba **cobas b 221** sistemos naudojimo instrukcijose.

Tyrimo principas

Laikydami laboratorijos taisyklių, reguliariai nukenksminkite analizatoriaus paviršius, įskaitant priekines dureles, naudodami Deproteinizer.

Reagentai

Deproteinizer – tai vandeninis natrio hipochlorito tirpalas.

Naudotojų mokymas

Neeksploduokite ir neatlikite techninės priežiūros, jei nedalyvavote Roche Diagnostics mokymuose. Naudotojo dokumentacijoje neaprašytas užduotis palikite apmokytiems „Roche Service“ atstovams.

Atsargumo priemonės ir įspėjimai

⚠ DĖMESIO! Kad nesugadintumėte MSS Cassette, nenaudokite Deproteinizer **cobas b 221** sistemos MSS Measuring Chamber arba aplink ją.

Nenaudokite Deproteinizer ar kitų dezinfekavimo priemonių ant elektros kontaktų. Analizatoriaus paviršiai turi likti nepaliesiti mažiausiai 15 minučių po dezinfekavimo.

Nenaudokite Deproteinizer po galiojimo datos.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Tiesioginis Deproteinizer poveikis, pvz., įkvėpus, prarijus ar susilietus su oda, gali sukelti rimtų odos nudegimų, pažeisti akis ir sukelti kitų rimtų pavojų sveikatai. Dirbdami su Deproteinizer dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugos priemones, tokias kaip akių apsauga su šoniniais skydeliais, skysčiams atsparus laboratorinis paltas, patvirtintos laboratorinės pirštinės ir veido skydelis.

Prieš naudodami Deproteinizer, perskaitykite medžiagų saugos duomenų lapą.

Daugiau informacijos apie darbą su reagentu rasite naujausiose 9180 Electrolyte Analyzer naudojimo instrukcijose arba **cobas b 221** sistemos naudojimo instrukcijose.

Šiame rinkinyje yra komponentų, kurie pagal reglamentą (EB) Nr. 2008/1272 skirstomi į šias klases:



Įspėjimas:

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prevencija:

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones / naudoti klausos apsaugos priemones.

Veiksmai, kurių reikia imtis:

P301 + P330 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
+ P331

P303 + P361 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu.

P304 + P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

P305 + P351 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytojų.

Pavojingi komponentai: 7681-52-9 natrio hipochloritas

Produktų saugumo žymėjimas parengtas vadovaujantis ES GHS gairėmis.

Kontaktinis telefono numeris: visos šalys: +49-621-7590, JAV: 1-800-428-2336

Laikymo sąlygos ir stabilumas

Laikymas ir naudojimo trukmė:

- Laikykite iki nurodytos galiojimo datos nuo +15 °C iki +30 °C (nuo +59 °F iki +86 °F)

Reikalingos (bet nepateikiamos) medžiagos

Reikiamo instrumento ieškokite atitinkamoje naudojimo instrukcijoje.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. atitinkamą reikiamo instrumento naudojimo instrukciją.

Bet koks rimtas įvykis, kurio atsiradimas yra susijęs su prietaiso naudojimu, turėtų būti pranešamas gamintojui ir kompetentingai valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir / ar pacientas, institucijai.

Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardytų standarte ISO 15223-1 (skirta JAV: naudojamų simbolių apibūdinimo ieškokite dialog.roche.com):

SYSTEM

Analizatoriai / instrumentai, su kuriais gali būti naudojami reagentai

CONTENT

Rinkinio turinys

GTIN

Visuotinis prekybos identifikacijos numeris (angl. „Global Trade Item Number“)



Įspūdinanti medžiaga

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėje.

© 2022, Roche Diagnostics

Deproteinizer

cobas®



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

+800 5505 6606



JAV platina:

Roche Diagnostics, 9115 Hague Road,
Indianapolis, Indiana JAV

JAV vartotojų techninė pagalba 1-800-526-2272