

GRAHAM TEST SAFE AND CLEAN


KOMPONENTAI:

- Trys objektiniai stikliukai (ref. 1000812) su juostele (ref. 030206), paruošti naudoti ir pateikiami plastikinėje dėžutėje, apsauganti juos transportavimo metu.
- Jame taip pat yra lankstus plastikinis dangtelis (ref. CAP01), kuris yra sujungtas su vienu objektinio stikliuko galu, kad palengvinti mėginių ėmimą.


PRIVALUMAI:

- Išvengiama tiesioginio sąlyčio su perianaliniu plotu, pašalinant užteršimo galimybę mėginių ėmimo metu.
- Užkerta kelią paciento sąlyčiui su stikliniu stikleliu, taip išvengiama traumų.
- Plastikinė dėžutė užkerta kelią stiklelių sudužimui transportavimo metu.


MĖGINIŲ ĖMIMO PROTOKOLAS

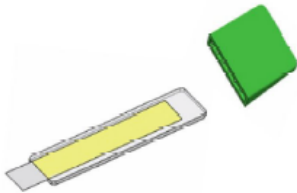


1. Uždėkite dangtelį ant nepažymėto stiklelio galo.

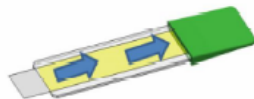


2. Nuplėškite permatomą juostelę nuo stiklelio ir uždėkite ją ant dangtelio.

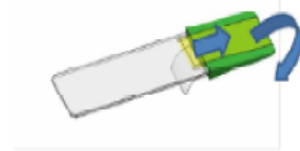


3. Perkelkite permatomą juostelę per dangtelį.

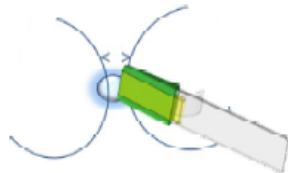

4. Palieskite žaliu dangteliu su permatoma juostele išangės sritį.

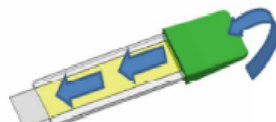

5. Atlenkite permatomą juostelę į pradinę poziciją; pasistenkite nesulamdyti juostelės.

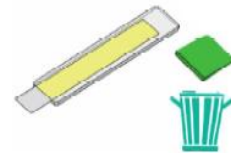

6. Nuimkite žalią dangtelį nuo stiklelio ir išmeskite. Įdėkite stiklėlį į plastikinę dėžutę.

NETINKAMAS NAUDOJIMUI BUITYJE