

PRODUKTO LAPAS

„EndoHigh®“ Ploviklis

AUTOMATIZUOTAM IR RANKINIAM LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ VALYMU „WASSENBURG®“ PLOVIKLIUOSE-DEZINFEKATORIUOSE BEI SKYSČIO IR ULTRAGARSINĖSE VONIOSE SKIRTAS PLOVIKLIS - SKYSTAS KONCENTRATAS

NUORODA : MB 5238/1-2 (DR. WEIGERT)
VERSIJA : V2.00
LEIDIMO DATA : 11/2015

Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašinoms

Pagrindinės taikymo sritys

Lanksčių endoskopų ir jų dalių valymas WASSENBURG® WD440, WD415 ir WD440 PT (praeinančiuose) endoskopų plovikliuose-dezinfekatoriuose, skirtuose lankstiems endoskopams bei skysčio ir ultragarso voniose.

Savybės

„EndoHigh®“ ploviklis yra šarminis ploviklis, skirtas lanksčių endoskopų apdorojimui. „EndoHigh®“ ploviklis pasižymi puikiu suderinamumu su medžiagomis ir patikimai pašalina išdžiuvusio ir denatūruoto kraujo dėmes. Tai itin sumažina organinių medžiagų kiekį. „EndoHigh®“ ploviklyje yra šarminių ir paviršių veikiančių medžiagų, neleidžiančių baltymų likučiams pakartotinai nusėsti bei sumažinančių valymui naudojamų tirpalų paviršiaus įtempimą. Iš pradžių reikia patikrinti tinkamumą anoduotam aliuminiui. „EndoHigh®“ ploviklis tinkamas visų pagrindinių gamintojų endoskopų plovimui.

Naudojimas ir dozavimas

„EndoHigh®“ ploviklis naudojamas WASSENBURG® WD440, WD415 ir WD440 PT (praeinančiuose) endoskopų plovikliuose-dezinfekatoriuose, skirtuose lankstiems endoskopams bei skysčio ir ultragarso voniose. Naudojant „EndoHigh®“ ploviklį reikia laikytis toliau nurodytų parametrų:

- Automatizuotas lanksčių endoskopų ir endoskopų priedų valymas endoskopams skirtuose „WASSENBURG®“ WD440, WD415 ir WD440 PT (praeinančiuose) endoskopų plovikliuose-dezinfekatoriuose: 5 ml/l (0,5 %), 35 – 40 °C, 4 – 5 min. Toliau nurodytiems dezinfekavimo etapams rekomenduojama naudoti „EndoHigh® GTA“, „EndoHigh® PAA“.
- Rankinis lanksčių endoskopų ir endoskopų priedų plovimas skysčio ir ultragarso voniose: 5 – 30 ml/l (0,5 – 3 %), daugiausiai 40 °C, 5 – 10 min.

„EndoHigh®“ ploviklis turi būti visiškai nuskalautas (pageidautina su dejonizuotu vandeniu). Norint išvengti vandens dėmių galutiniam skalavimui rekomenduojama naudoti dejonizuotą vandenį.

Rankinio plovimo atveju dozavimo kiekis priklauso nuo nešvarumo. Rankiniam plovimui skirtas tirpalas turi būti atnaujinamas kasdien, pakeičiamas iškart kai tik pasirodo nešvarumai. Jei skystis naudojamas pirminiam valymui, jo prieš automatizuotą apdorojimą „EndoHigh®“ plovikliu nuskalauti nereikia.

Naudokite tinkamus dozavimo įrenginius. Nemaiškykite su kitais produktais. Prieš keisdami produktą vandeniu praskalaukite dozavimo sistemą ir įsiurbimo žarną.

Pakartotinis apdorojimas turi atitikti visus Medicinos prietaisų direktyvos nurodymus ir turi būti atliekamas laikantis patvirtinto proceso. Prašome laikytis medicinos prietaisų gamintojo rekomendacijų dėl naudojimo pagal ISO 17664 reikalavimus. Reikia laikytis ploviklio-dezinfekatoriaus gamintojo pateiktų nurodymų. Skirta naudoti tik specialistams.

Techniniai duomenys

Tankis (20 °C): 1,1 g/cm³

pH reikšmė (nustatyta dejonizuotame vandenyje, 20 °C) 5 – 30 ml/l: 10,7 – 10,8

pH reikšmė gali skirtis kietame vandenyje, minkštame vandenyje arba, pvz., skalavimui skirtame vandenyje.

Klumpumas (koncentratas, 20 °C): < 10 mPa s

Sudedamosios dalys

Sudedamosios medžiagos pagal reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių:

- < 5 % nejoninių ir anijoninių paviršių veikiančių medžiagų
- taip pat enzimai

CE ženklimas

„EndoHigh®“ ploviklis atitinka Europos direktyvos 93/42/EEB I priedą dėl medicinos prietaisų.

**Informacija apie sandėliavimą**

Laikykite vėsioje, tačiau neužšalancioje vietoje. Visuomet laikykite 0 - 25 °C temperatūroje. Jei laikoma pagal rekomendacijas, išlieka tinkamas naudoti 2 metus. Galiojimo data nurodyta žyme ant etiketės už smėlio laikrodžio simbolio ⌚.

Pavojų ir atsargumo nurodymai

Saugumo informacija pateikta EB Saugos duomenų lape. Išmesti tik tuomet, kai indas tuščias ir uždarytas. Kaip išmesti produkto likučius skaitykite saugos duomenų lape.

Platinimas

Platintojas: „Wassenburg Medical B.V.“, Edisonring 9, 6669 NA DODEWAARD, Nyderlandai,
Tel. +31 (0)488 700 500, info@wassenburgmedical.nl, www.wassenburgmedical.com

Gamyba

Gamintojas: „Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG“, Mühlenhagen 85,
DE-20539 Hamburgas, Vokietija, Tel. + 49 (0)40 7 89 60-0, Faks. + 49 (0)40 7 89 60-120

Aukščiau pateikta informacija, kuri atitinka mūsų dabartines žinias, skirta aprašyti mūsų produktą ir galimą saugumo priemonių poreikį, tačiau tai nėra kokybės aprašymas ar tam tikrų savybių garantija.