


11.4.3 Palydovo valdymo skydelis- punktas 7.1

Palydovo valdymo skydelis yra standartinis valdymo elementas. Jei reikia, palydovo valdymo skydelį galima pakabinti ant kojūgalio plokštės arba šoninių turėklų. Palydovo valdymo skydelį galima laikyti baltinių lentynėlėje. Valdant palydovo valdymo skydelį galima laikyti rankoje.- punktas 7.1

► Pasirūpinkite, kad palydovo valdymo skydelį valdytų tik išmokyti slaugos darbuotojai.

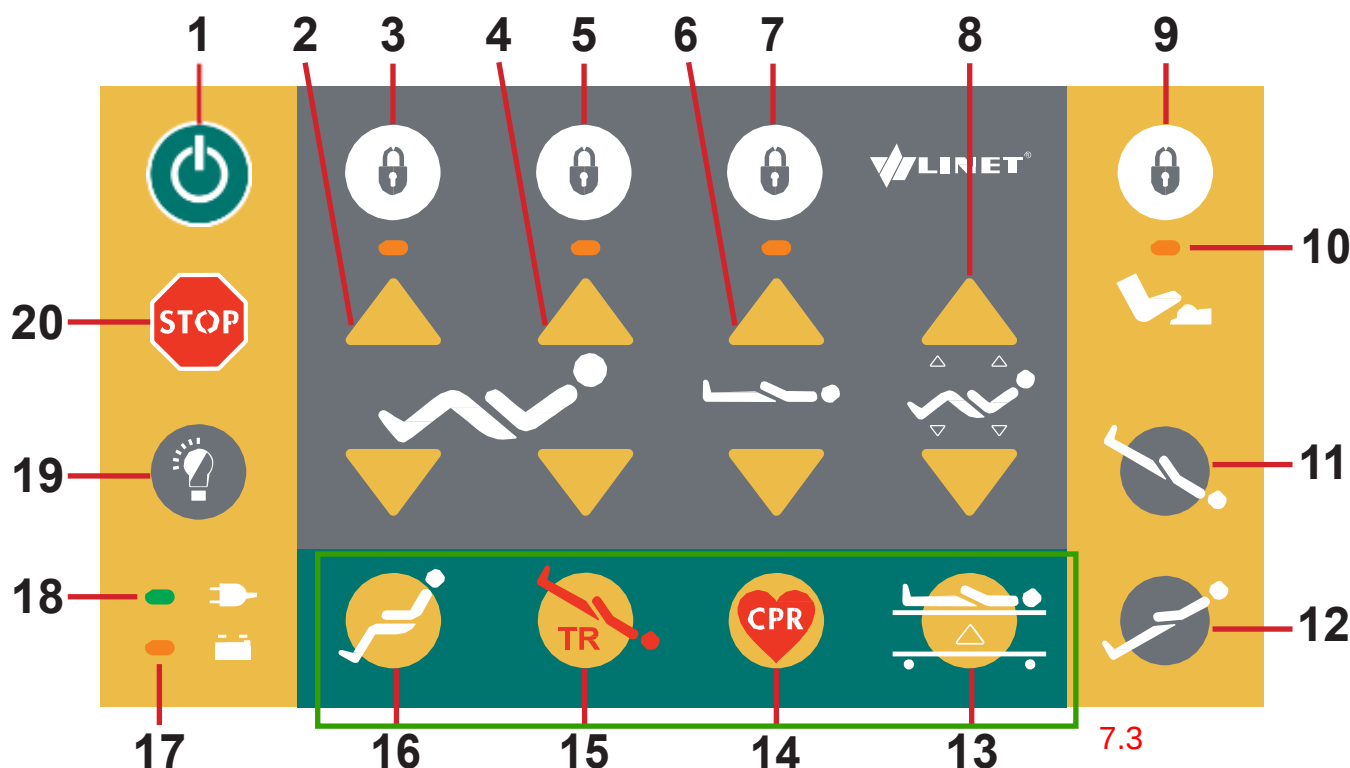

pav. Palydovo valdymo skydelis

1. ĮJUNGIMO mygtukas- punktas 7.4
2. Šlaunų atramos reguliavimo mygtukas- punktas 10.2; 7.2.c
3. Šlaunų atramos reguliavimo užrakto mygtukas ir LED- punktas 6.5
4. Nugaros atramos reguliavimo mygtukas-punktas 9.2; 6.4b 7.2.b
5. Nugaros atramos užrakto mygtukas ir LED- punktas 6.5
6. Lovos aukščio nustatymo mygtukas- punktas 4.2; 7.2.a
7. Lovos aukščio nustatymo, Trendelenburgo pokrypio ir atvirkštinio Trendelenburgo pokrypio užrakto mygtukas ir LED- punktas 6.5
8. Automatinio kontūro reguliavimo mygtukas-punktas 7.2.f
9. Kojinio jungiklio užrakto mygtukas- punktas 6.5
10. Kojinio jungiklio užrakto LED
11. Trendelenburgo pokrypio mygtukas-punktas 7.2.d
12. Atvirkštinio Trendelenburgo pokrypio mygtukas- punktas 7.2.e
13. Apžiūros padėties mygtukas- punktas 6.4c
14. CPR(gaivinimo) padėties mygtukas- punktas 6.4b
15. Skubaus Trendelenburgo padėties nustatymo mygtukas- punktas 6.4d
16. Kardiologinės pagalbos padėties mygtukas- punktas 6.4a
17. Akumuliatoriaus įkrovos būsenos LED
18. Tinklo maitinimo LED
19. LEMPUČIŲ VALDYMO mygtukas
20. STOP (sustabdymo) mygtukas- punktas 7.5

Centrinio SUSTABDYMO mygtukas



Centrinio SUSTABDYMO mygtukas iš karto nutraukia visus lovos judesius, jei lovos padėtis yra nustatoma neįgalio asmens arba sugenda elektroninė įranga. Spaudžiant centrinio SUSTABDYMO mygtuką bent 0,3 sekundės, iš karto sustabdomi visi elektroninės įrangos inicijuoti lovos judesiai.

Aktyvinantis ĮJUNGIMO mygtukas



ĮJUNGIMO mygtukas 3 minutėms aktyvina visų valdymo elementų klaviatūras.- punktas 7.4

ĮJUNGIMO mygtukas yra keliuose skirtinguose valdymo elementuose. ĮJUNGIMO mygtuko funkcija yra vienoda visuose valdymo elementuose.

Per šį laiką galima atlikti šiuos veiksmus:

- ▶ Reguluoti atskirus atraminės čiužinio platformos elementus paspaudžiant atitinkamus funkcijų mygtukus.
- ▶ Išjungti atskiras funkcijas užraktų mygtukais.

Kiekvieną kartą paspaudus funkcijos mygtuką, klaviatūra išliks aktyvi dar 3 minutes.

Funkcijų mygtukai

Funkcijų mygtukai **2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15** ir **16** yra aprašyti skyriuje **Lovos padėties nustatymas**.

PASTABA. Vienu metu paspaudus du funkcijų mygtukus, valdiklis tai atpažins kaip klaidą. Valdiklis iš karto nutrauks visus lovos judesius, o ekrane bus parodytas atitinkamas išskylantysis langelis.

Blokavimas- punktas 6.5

Norėdami užblokuoti nugaros atramos reguliavimą:

- ▶ Paspauskite mygtuką **5**.

Išžiebia atitinkamas LED palydovo valdymo skydelyje ir slaugytojo valdymo skydelyje (**6a**).

Nugaros atramos reguliuoti negalima nė su vienu valdymo elementu.

Norėdami užblokuoti šlaunų atramos reguliavimą:

- ▶ Paspauskite mygtuką **3**.

Išžiebia atitinkamas LED palydovo valdymo skydelyje ir slaugytojo valdymo skydelyje (**6b**).

Šlaunų atramos reguliuoti negalima nė su vienu valdymo elementu.

Norėdami užblokuoti lovos aukščio, Trendelenburgo pokrypio ir atvirkštinio Trendelenburgo pokrypio reguliavimą:

- ▶ Paspauskite mygtuką **7**.

Išžiebia atitinkamas LED palydovo valdymo skydelyje ir slaugytojo valdymo skydelyje (**6c**).

Lovos aukščio, Trendelenburgo pokrypio ir atvirkštinio Trendelenburgo pokrypio reguliuoti negalima nė su vienu valdymo elementu.

Norėdami užblokuoti kojinius jungiklius:

- ▶ Paspauskite mygtuką **9**.

Išžiebia atitinkamas LED (**10**) palydovo valdymo skydelyje.

Lovos aukščio ir apžiūros padėties negalima nustatyti naudojant kojinius jungiklius.

Atblokavimas

Norėdami atblokuoti nugaros atramos reguliavimą:

- ▶ Paspauskite mygtuką **5**.

Užgęsta atitinkamas LED palydovo valdymo skydelyje ir slaugytojo valdymo skydelyje (**6a**).

Nugaros atramą vėl galima reguliuoti.

Norėdami atblokuoti šlaunų atramos reguliavimą:

- ▶ Paspauskite mygtuką **3**.

Užgęsta atitinkamas LED palydovo valdymo skydelyje ir slaugytojo valdymo skydelyje (**6b**).

Šlaunų atramą vėl galima reguliuoti.

Norėdami atblokuoti lovos aukščio, Trendelenburgo pokrypio ir atvirkštinio Trendelenburgo pokrypio reguliavimą:

- ▶ Paspauskite mygtuką **7**.

Užgęsta atitinkamas LED palydovo valdymo skydelyje ir slaugytojo valdymo skydelyje (**6c**).

Lovos aukštį, Trendelenburgo pokrypį ir atvirkštinį Trendelenburgo pokrypį vėl galima reguliuoti.

Norėdami atblokuoti kojinius jungiklius:

- ▶ Paspauskite mygtuką **9**.

Užgęsta atitinkamas LED (**10**) palydovo valdymo skydelyje.

Lovos aukštį ir apžiūros padėtį vėl galima nustatyti.

TINKLO MAITINIMO LED




Būsena	Reikšmė
LED šviečia	prijungta prie elektros tinklo
LED nešviečia	atjungta nuo elektros tinklo
LED mirksi	sistemos klaida

11.4.4 Rankinis pultelis (pasirinktinė įranga)-punktas 7

Galima įsigyti rankinį pultelį su apšviečiamąja klaviatūra.

PASTABA. Apšvietimas aktyvinamas 7 sekundėms, jei buvo paspaustas kuris nors mygtukas, ir 3 minutėms, jei buvo paspaustas ĮJUNGIMO mygtukas.

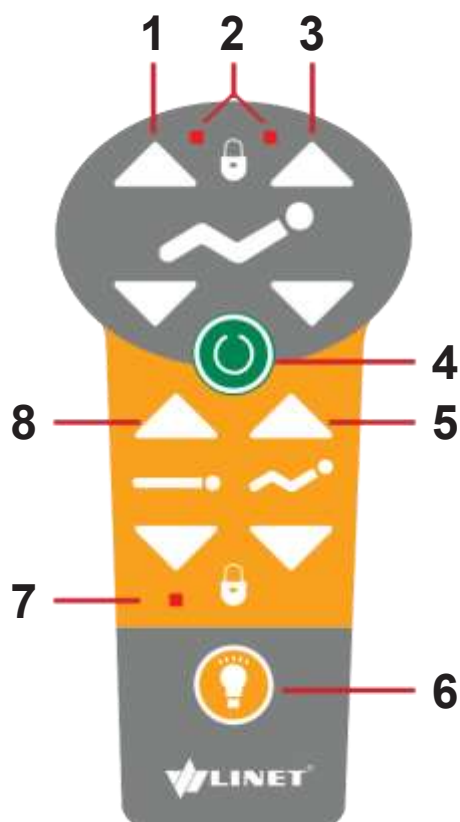

1. Šlaunų atramos reguliavimo mygtukas
punktas 7.4
2. Šlaunų atramos / nugaros atramos užrakto LED
3. Nugaros atramos reguliavimo mygtukas
punktas 7.4
4. ĮJUNGIMO mygtukas- punktas 7.3
5. Automatinio kontūro reguliavimo mygtukas
6. Žibintuvėlio mygtukas
7. Aukščio užrakto LED
8. Lovos aukščio nustatymo mygtukas punktas 7.4

pav. Rankinis pultelis

Funkcijų mygtukai 1, 3, 5 ir 8 yra aprašyti skyriuje **Lovos padėties nustatymas**.-punktas 7.4

Norėdami įjungti žibintuvėlį:

► Paspauskite žibintuvėlio mygtuką 6.

PASTABA. Atsižvelgę į paciento būklę, slaugantys darbuotojai nusprendžia, ar pacientui galima reguliuoti lovos padėtį. - punktas 7.2

Jei reikia, pasirūpinkite, kad pacientas negalėtų reguliuoti lovos:


► Išjunkite funkcijas.

PASTABA. Galima įsigyti rankinio pultelio adapterį. Naudojant adapterį, galima greitai sumontuoti ir nuimti (pvz., pakeisti defektą turintį rankinį pultelį ar laidą, panaudoti rankinį pultelį kitai lovai).punktas 7.1

11.4.5 Kojinis jungiklis lovos aukščiui nustatyti (pasirinktinė įranga)- punktas 8.1;

8.3

Kojinis valdiklis yra pasirinktinė įranga. Jis teikia galimybę koja nustatyti lovos aukštį arba apžiūros padėtį. Per 3 sekundes du kartus nuspauskite pasirinktą pedalą. Po šio veiksmo 20 sekundžių yra aktyvinamas lovos aukščio kojinis valdiklis.

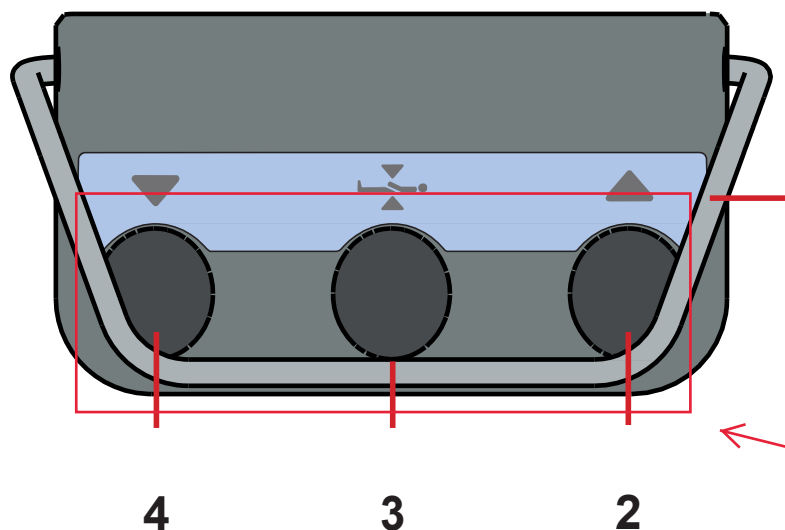

1. Rėmelis, apsaugantis nuo nepageidautino aktyvinimo- punktas 8.1

2. Atraminės čiužinio platformos pakėlimo pedalas - punktas 8.1

3. Apžiūros padėties pedalas punktas 8.2

4. Atraminės čiužinio platformos nuleidimo pedalas punktas 8.1


punktas 8.4

pav.Kojinis jungiklis lovos aukščiui nustatyti-punktas 1.11.1

Kojinio jungiklio lovos aukščiui nustatyti naudojimas yra aprašytas skyriuje **Lovos padėties nustatymas**.

11.4.6 Pacientui skirti valdymo skydeliai

Pacientui skirti valdymo skydeliai, integruoti į kojūgalio šoninius turėklus, teikia galimybę pacientui reguliuoti nugaros atramos, šlaunų atramos ir automatinio kontūro padėtis.

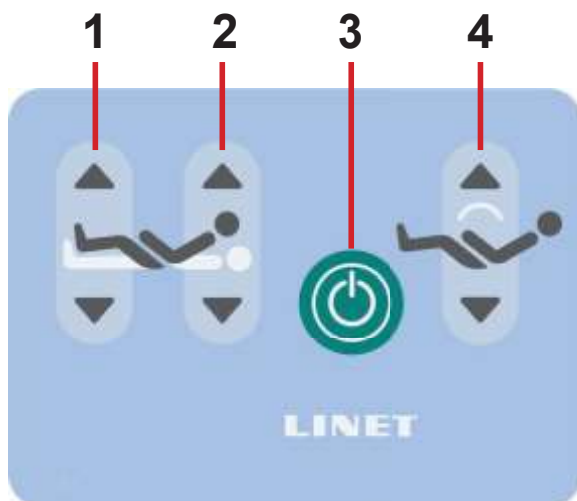


1. Šlaunų atramos reguliavimo mygtukas
2. Nugaros atramos reguliavimo mygtukas
3. JUNGIMO mygtukas
4. Automatinio kontūro reguliavimo mygtukas (nugaros atramos ir šlaunų atramos judėjimas vienu metu)

PASTABA. Kojūgalio šoniniuose turėkluose integruotų pacientui skirtų valdymo skydelių funkcijos yra išjungiamos, kai kojūgalio šoninis turėklas yra apatinėje padėtyje.

pav.Pacientui skirtas valdymo skydelis kojūgalio šoniniuose turėkluose

11.5 Lovos padėties nustatymas

11.5.1 Nugaros atrama

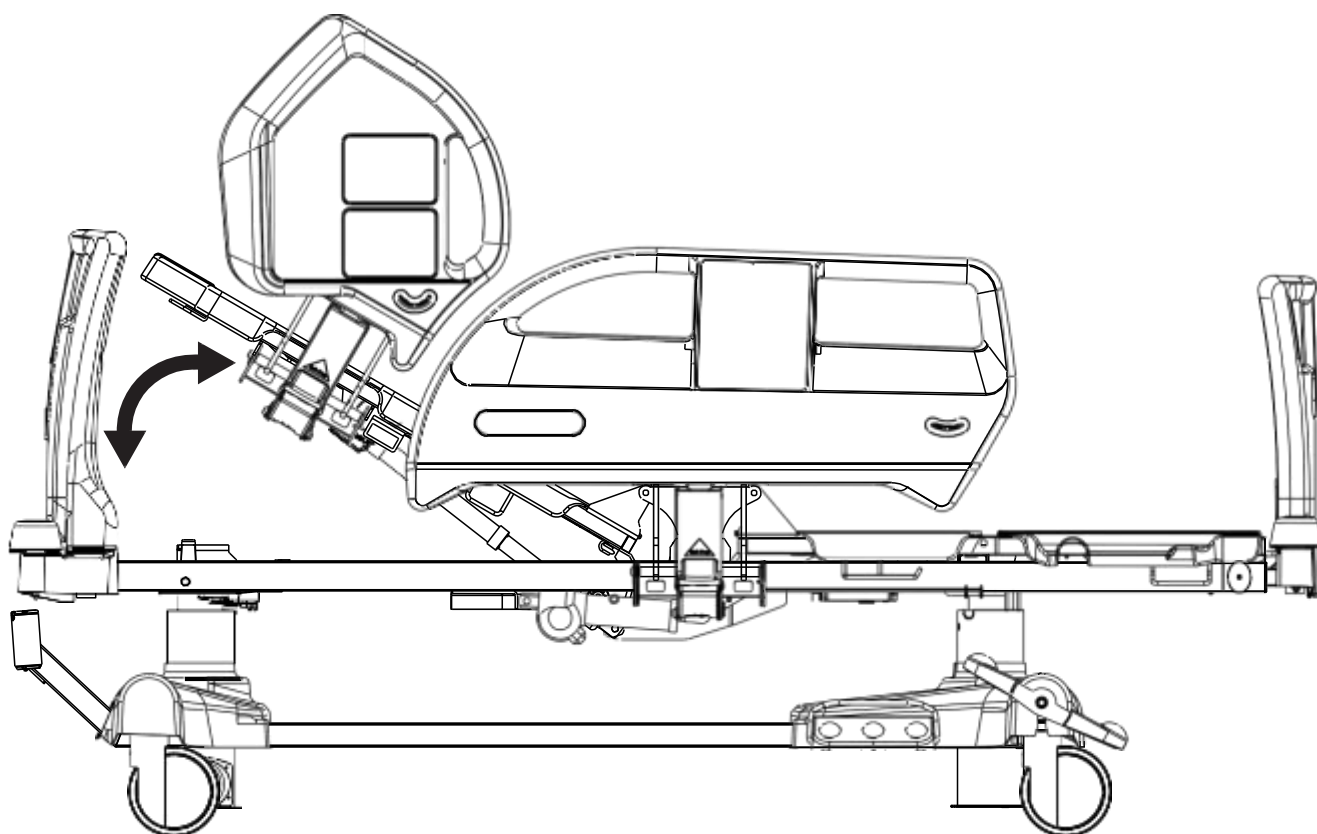

Nugaros atramos padėčiai nustatyti yra naudojamas:

- Slaugytojo valdymo skydelis
- Palydovo valdymo skydelis
- Rankinis pultelis
- Pacientui skirtas valdymo skydelis

„iBoard Basic“ skydelio ekrane yra rodomas nugaros atramos kampas.




pav. Nugaros atramos kampas „iBoard Basic“ skydelio ekrane

Tolygaus padėties nustatymo metu nugaros atrama automatiškai sustabdoma pasiekus 30 ir 45 laipsnių kampą. Norėdami tęsti, atleiskite mygtuką, paskui palaikykite nuspaustą, kol bus pasiekta norima padėtis.

1. Nugaros atramos pakėlimas

2. Nugaros atramos nuleidimas

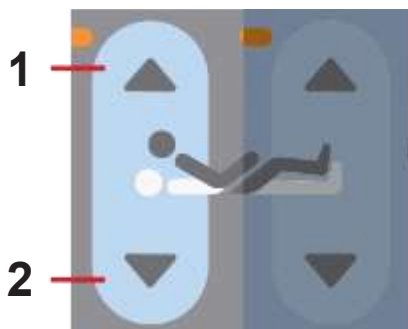

pav. Nugaros atramos reguliavimo mygtukas (slaugytojo valdymo skydelis, pacientui skirtas valdymo skydelis)

Slaugytojo valdymo skydelis:


- Paspauskite  mygtuką.
- Palaikykite nuspaustą pasirinktą nugaros atramos reguliavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

Pacientui skirtas valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Palaikykite nuspaustą pasirinktą nugaros atramos reguliavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

1. Nugaros atramos pakėlimas


2. Nugaros atramos nuleidimas

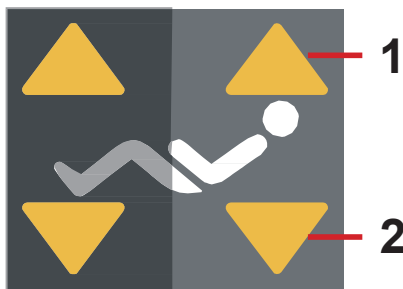

pav. Nugaros atramos reguliavimo mygtukas (palydovo valdymo skydelis)

Palydovo valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Palaikykite nuspaustą pasirinktą nugaros atramos reguliavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

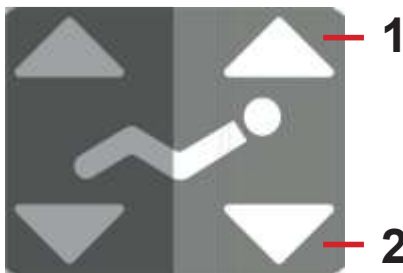


pav. Nugaros atramos reguliavimo mygtukas (rankinis pultelis)

Rankinis pultelis:


- Paspauskite  mygtuką.
- Palaikykite nuspaustą pasirinktą nugaros atramos reguliavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

11.5.2 Šlaunų atrama

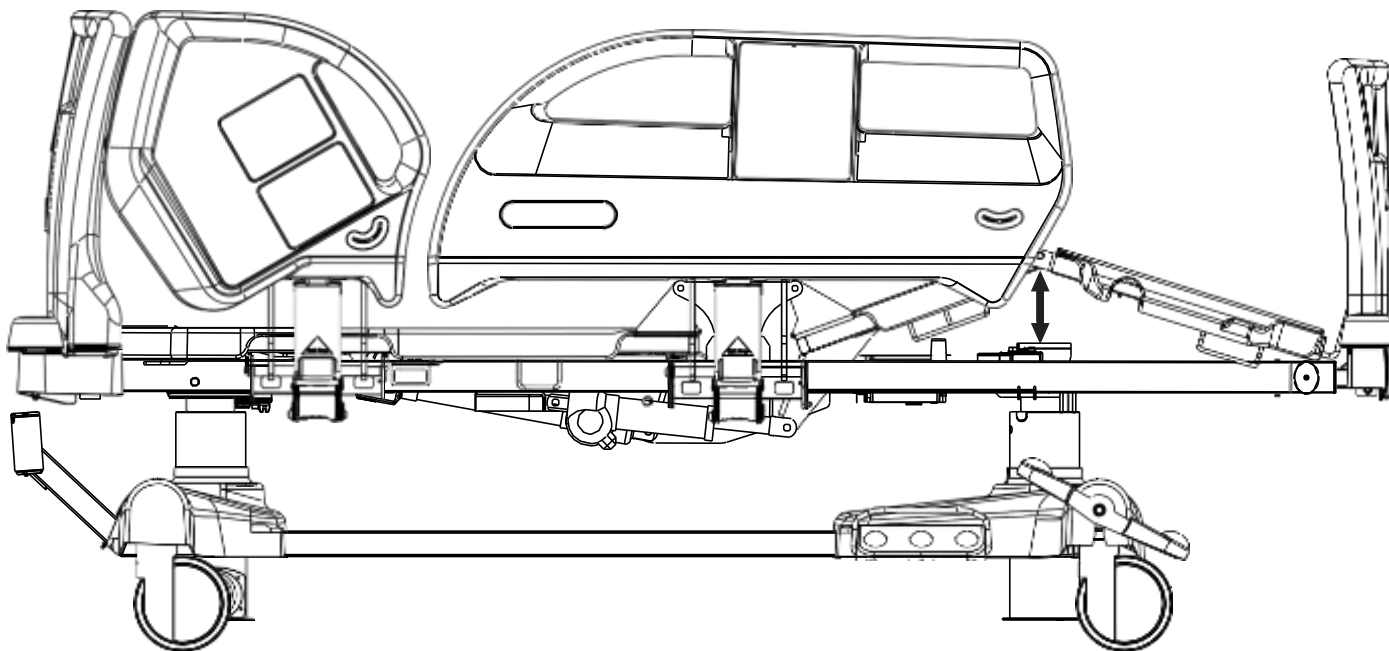

Šlaunų atramos padėčiai nustatyti yra naudojamas:

- Slaugytojo valdymo skydelis
- Palydovo valdymo skydelis
- Rankinis pultelis
- Pacientui skirtas valdymo skydelis

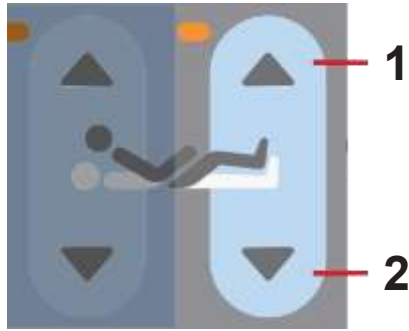

pav. Šlaunų atramos reguliavimo mygtukas (slaugytojo valdymo skydelis, pacientui skirtas valdymo skydelis)

Slaugytojo valdymo skydelis:

- ▶ Paspauskite  mygtuką.
- ▶ Palaikykite nuspaustą pasirinktą šlaunų atramos reguliavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

Pacientui skirtas valdymo skydelis:

- ▶ Paspauskite  mygtuką.
- ▶ Palaikykite nuspaustą pasirinktą šlaunų atramos reguliavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

1. Šlaunų atramos pakėlimas


2. Šlaunų atramos nuleidimas



pav. Šlaunų atramos reguliavimo mygtukas (palydovo valdymo skydelis)

Palydovo valdymo skydelis:

- ▶ Paspauskite  mygtuką.
- ▶ Palaikykite nuspaustą pasirinktą šlaunų atramos reguliavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

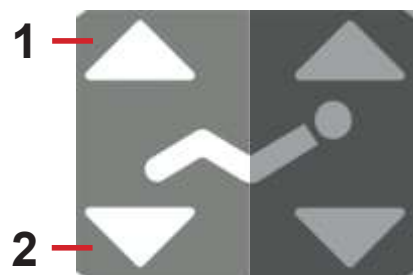


Pav. Šlaunų atramos reguliavimo mygtukas (rankinis pultelis)

Rankinis pultelis:

- ▶ Paspauskite  mygtuką.
- ▶ Palaikykite nuspaustą pasirinktą šlaunų atramos reguliavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

11.5.3 Mechaninis blauzdų atramos reguliavimas-punktas 12.2

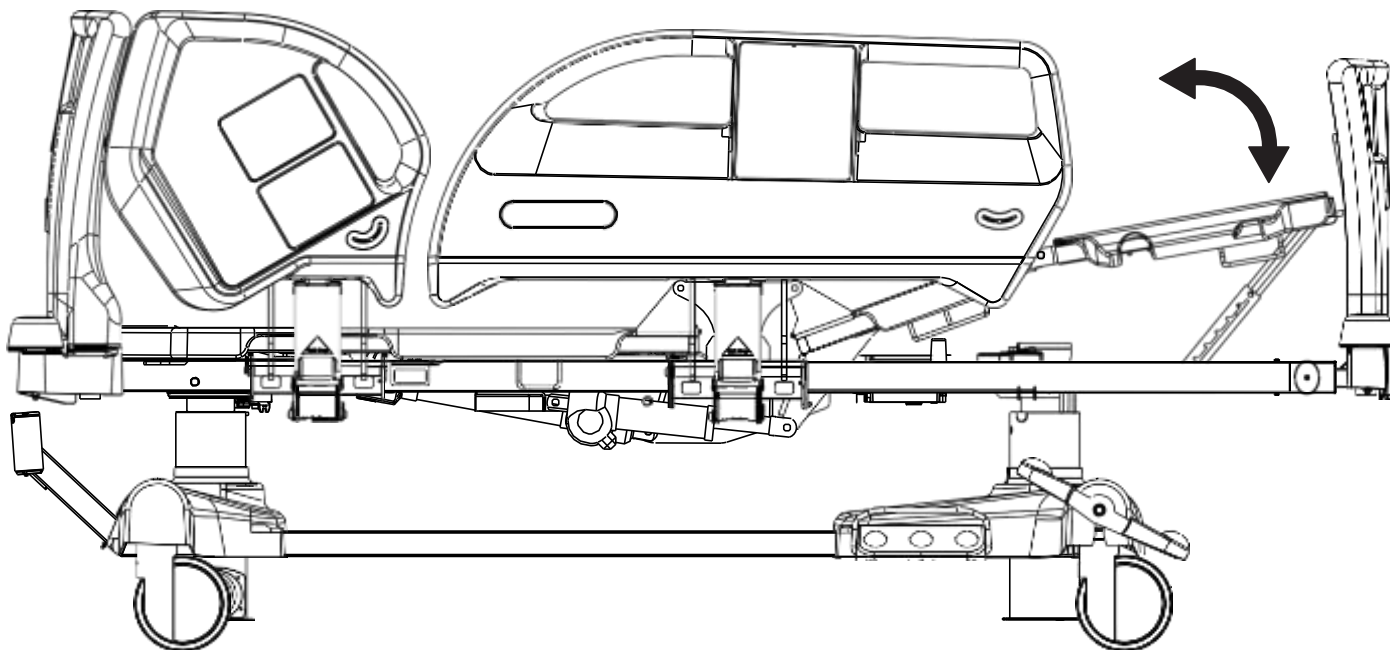

ĮSPĖJIMAS!

Netinkamai manipuliuojant, pacientas arba naudotojas gali būti sužalotas!


- ▶ Laikykite blauzdų atramą už abiejų blauzdų atramos rankenų visada, kai nuleidžiate blauzdų atramą.
- ▶ Atsargiai nuleiskite blauzdų atramą, kad ji negalėtų staigiai kristi.

Norėdami pakelti blauzdų atramą:

- ▶ Laikydami už rankenos pakelkite blauzdų atramą į norimą padėtį.
- ▶ Nuleiskite blauzdų atramą, kad fiksatorius įeitų į reketinį ramstį.


Norėdami nuleisti blauzdų atramą:

- ▶ Šiek tiek kilstelėkite blauzdų atramą už rankenos.
- ▶ Nuleiskite blauzdų atramą į norimą padėtį.
- ▶ Įsitikinkite, ar fiksatorius įėjo į reketinį ramstį.

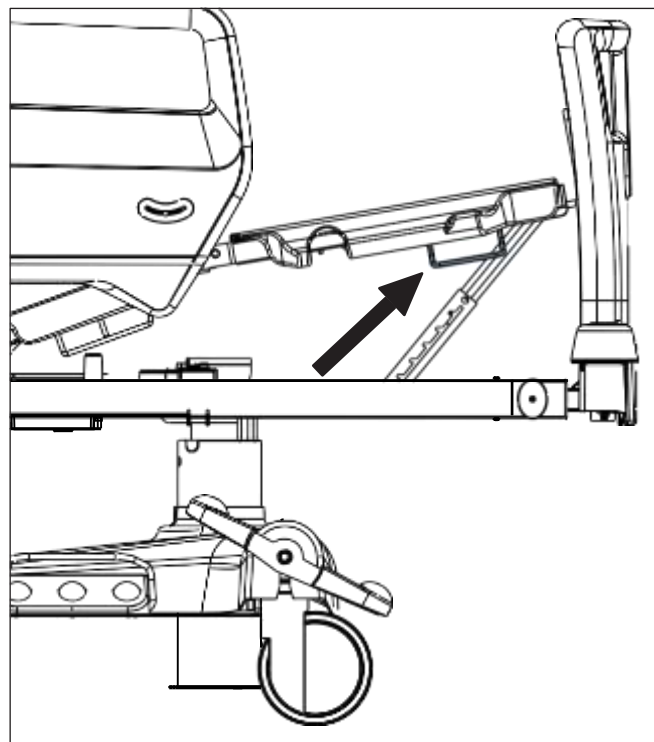

pav. Blauzdų atramos rankenos padėtis


11.5.4 Lovos aukštis- punktas 2.5

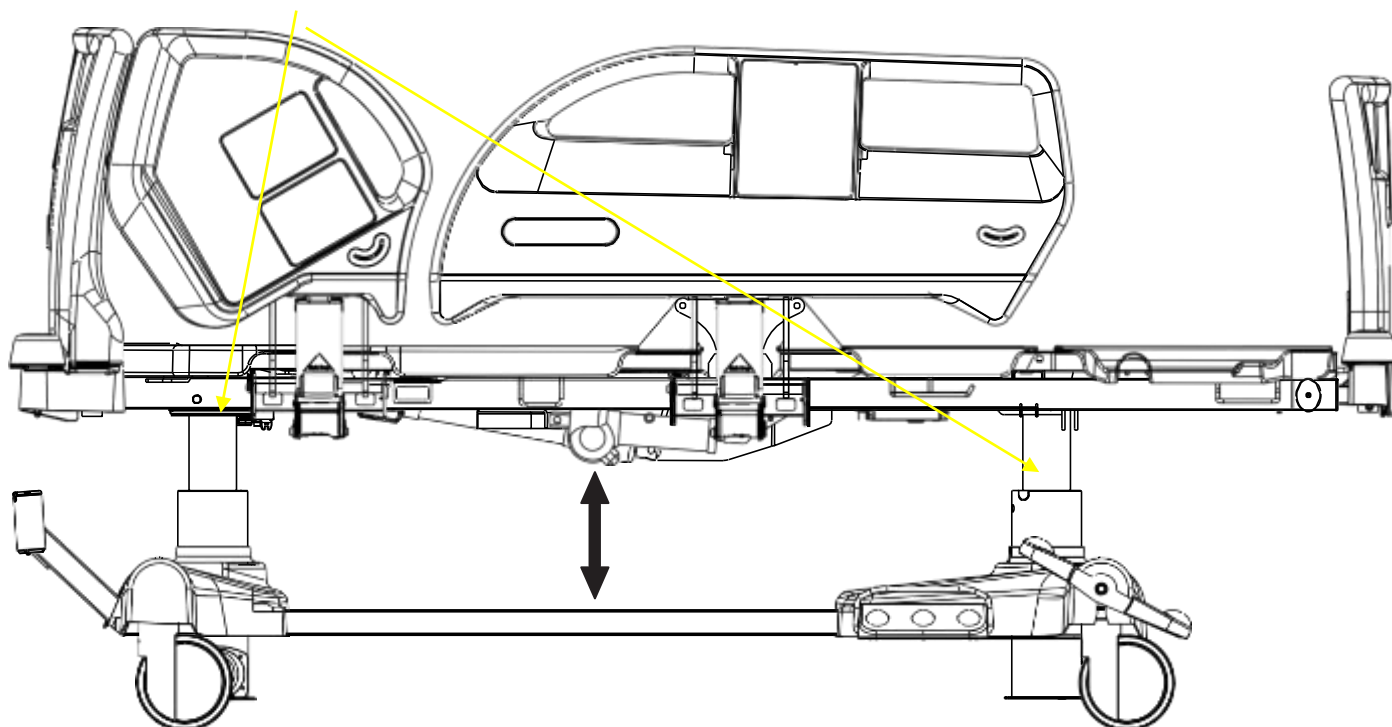

Lovos aukščiui nustatyti yra naudojamas:

- Slaugytojo valdymo skydelis
- Palydovo valdymo skydelis
- Rankinis pultelis
- Kojinis jungiklis lovos aukščiui nustatyti
- „Mobi-Lift“ rankena

Nuleidžiant lova sustoja nuleidimo padėtyje, atraminė čiužinio platforma nustatoma į plokščią padėtį ir pasigirsta pyptelėjimas. Po šio sureguliojimo lova toliau nuleidžiama į žemiausią padėtį.

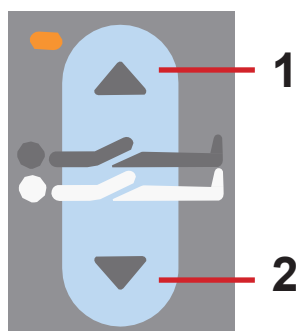


pav. Lovos aukščio nustatymo mygtukas (slaugytojo valdymo skydelis)

Slaugytojo valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Palaikykite nuspaustą pasirinktą lovos aukščio nustatymo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.


1. Atraminės čiužinio platformos pakėlimas
2. Atraminės čiužinio platformos nuleidimas

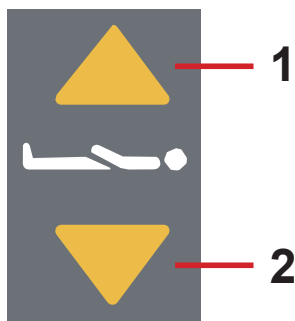

pav. Lovos aukščio nustatymo mygtukas (palydovo valdymo skydelis)

Palydovo valdymo skydelis:

- ▶ Paspauskite  mygtuką.
- ▶ Palaikykite nuspaustą pasirinktą lovos aukščio nustatymo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

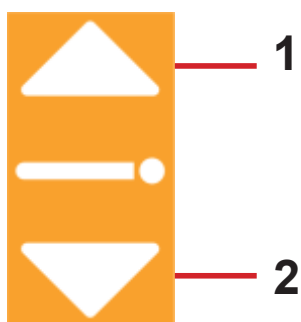


pav. Lovos aukščio nustatymo mygtukas (rankinis pultelis)

Rankinis pultelis:

- ▶ Paspauskite  mygtuką.
- ▶ Palaikykite nuspaustą pasirinktą lovos aukščio nustatymo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

1. Atraminės čiužinio platformos pakėlimas
2. Atraminės čiužinio platformos nuleidimas

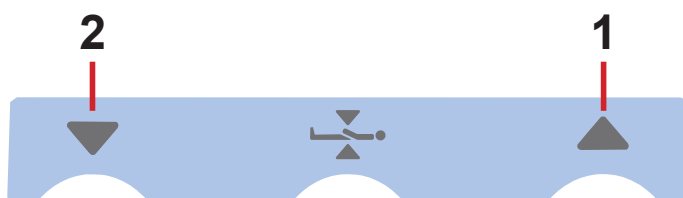


pav. Lovos aukščio nustatymo pedalai (kojinis jungiklis lovos aukščiui nustatyti)

Kojinis jungiklis lovos aukščiui nustatyti:

- ▶ Paspauskite ir atleiskite pasirinktą lovos aukščio nustatymo pedalą, kad aktyvintumėte skydelį.
- ▶ Palaikykite nuspaustą pasirinktą lovos aukščio nustatymo pedalą, kol bus pasiekta norima padėtis.

PASTABA. Per 3 sekundes du kartus nuspauskite pasirinktą pedalą. Po šio veiksmo 20 sekundžių yra aktyvinamas lovos aukščio kojinis valdiklis.

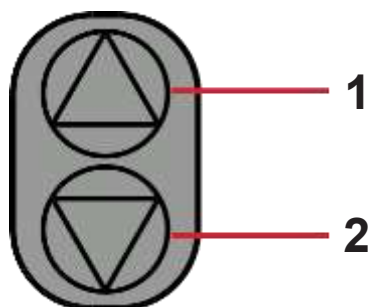


pav. „Mobi-Lift“ lovos aukščio mygtukas

„Mobi-Lift“ rankena:


- ▶ Paspauskite  mygtuką.
- ▶ Palaikykite nuspaustą pasirinktą „Mobi-Lift“ rankenos lovos aukščio mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis.

11.5.5 Automatinis kontūro nustatymas

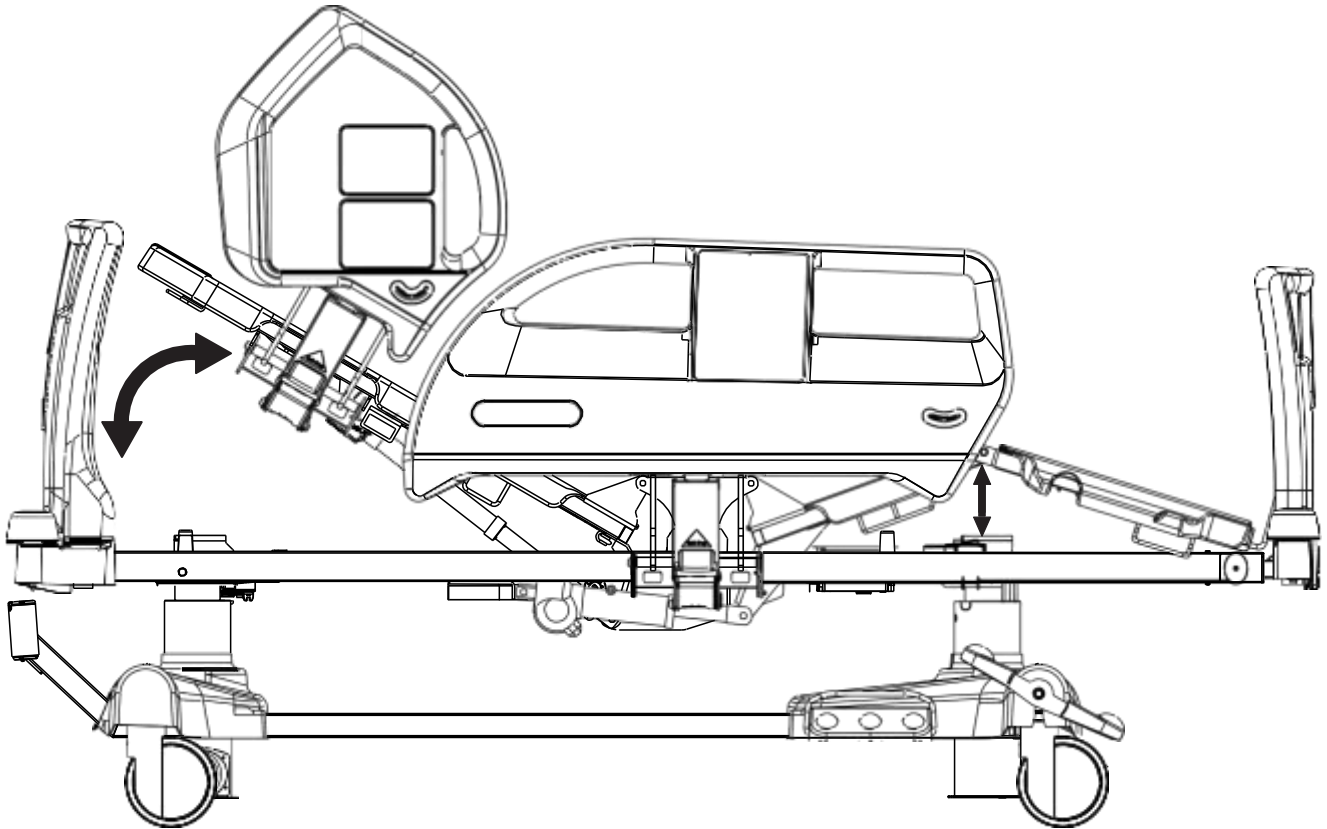

Automatinio kontūro padėčiai nustatyti yra naudojamas:

- Slaugytojo valdymo skydelis
- Palydovo valdymo skydelis
- Rankinis pultelis
- Pacientui skirtas valdymo skydelis

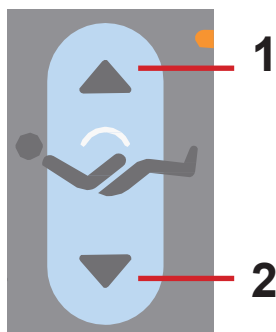

pav. Automatinio kontūro reguliavimo mygtukas (slaugytojo valdymo skydelis, pacientui skirtas valdymo skydelis)

Slaugytojo valdymo skydelis:


- Paspauskite  mygtuką.
- Palaikykite nuspaustą pasirinktą automatinio kontūro reguliavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

Pacientui skirtas valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Palaikykite nuspaustą pasirinktą automatinio kontūro reguliavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

1. Automatinis kontūro nustatymas pakeliant

2. Automatinis kontūro nustatymas nuleidžiant

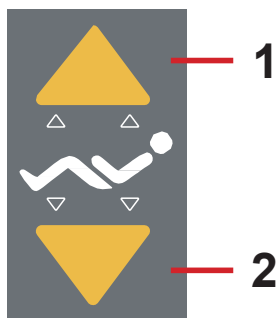


Palydovo valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Palaikykite nuspaustą pasirinktą automatinio kontūro regulavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

1. Automatinis kontūro nustatymas pakeliant

pav. Automatinio kontūro regulavimo mygtukas (palydovo valdymo skydelis)

2. Automatinis kontūro nustatymas nuleidžiant

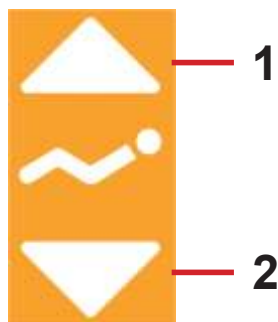


Rankinis pultelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Palaikykite nuspaustą pasirinktą automatinio kontūro regulavimo mygtuko dalį, kol bus pasiekta norima padėtis.

pav. Automatinio kontūro regulavimo mygtukas (rankinis pultelis)

11.5.6 Apžiūros padėtis- punktas 6.4c; 8.2

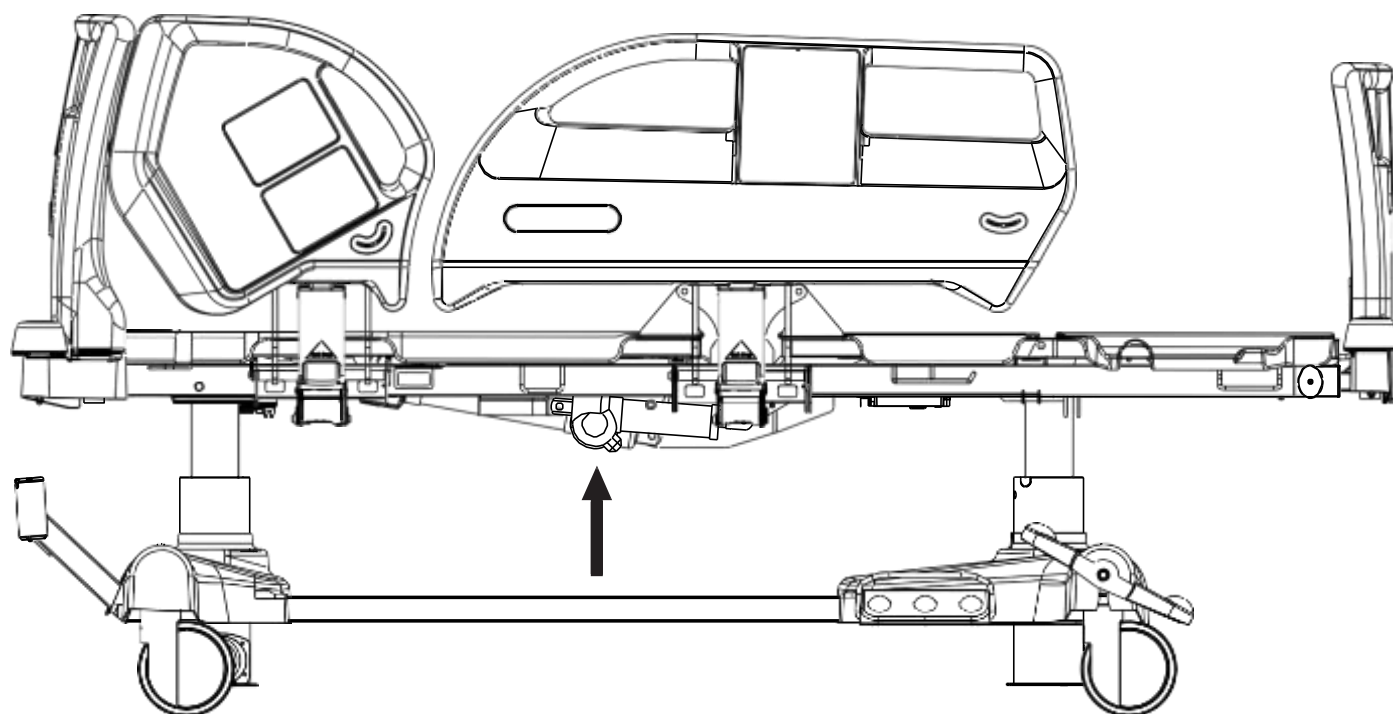

Apžiūros padėčiai nustatyti yra naudojamas:


- Palydovo valdymo skydelis
- Kojinis jungiklis lovos aukščiui nustatyti- punktas 8.2



pav. Apžiūros padėties mygtukas (palydovo valdymo skydelis)

Palydovo valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Spauskite apžiūros padėties mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis.-punktas 6.4c

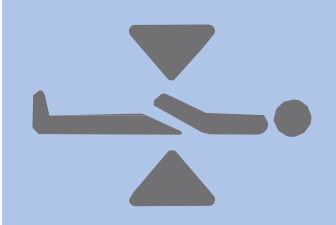


pav. Apžiūros padėties pedalas (kojinis jungiklis lovos aukščiui nustatyti)

Kojinis jungiklis lovos aukščiui nustatyti:- punktą 8.2

- Paspauskite ir atleiskite vidurinį pedalą, kad aktyvintumėte skydelį.
- Palaikykite nuspaustą apžiūros padėties pedalą, kol bus pasiekta norima padėtis.

PASTABA. Šiuos 2 veiksmus turi skirti mažiau nei 20 sekundžių.

11.5.7 Skubus Trendelenburgo padėties nustatymas- punktas 6.4d

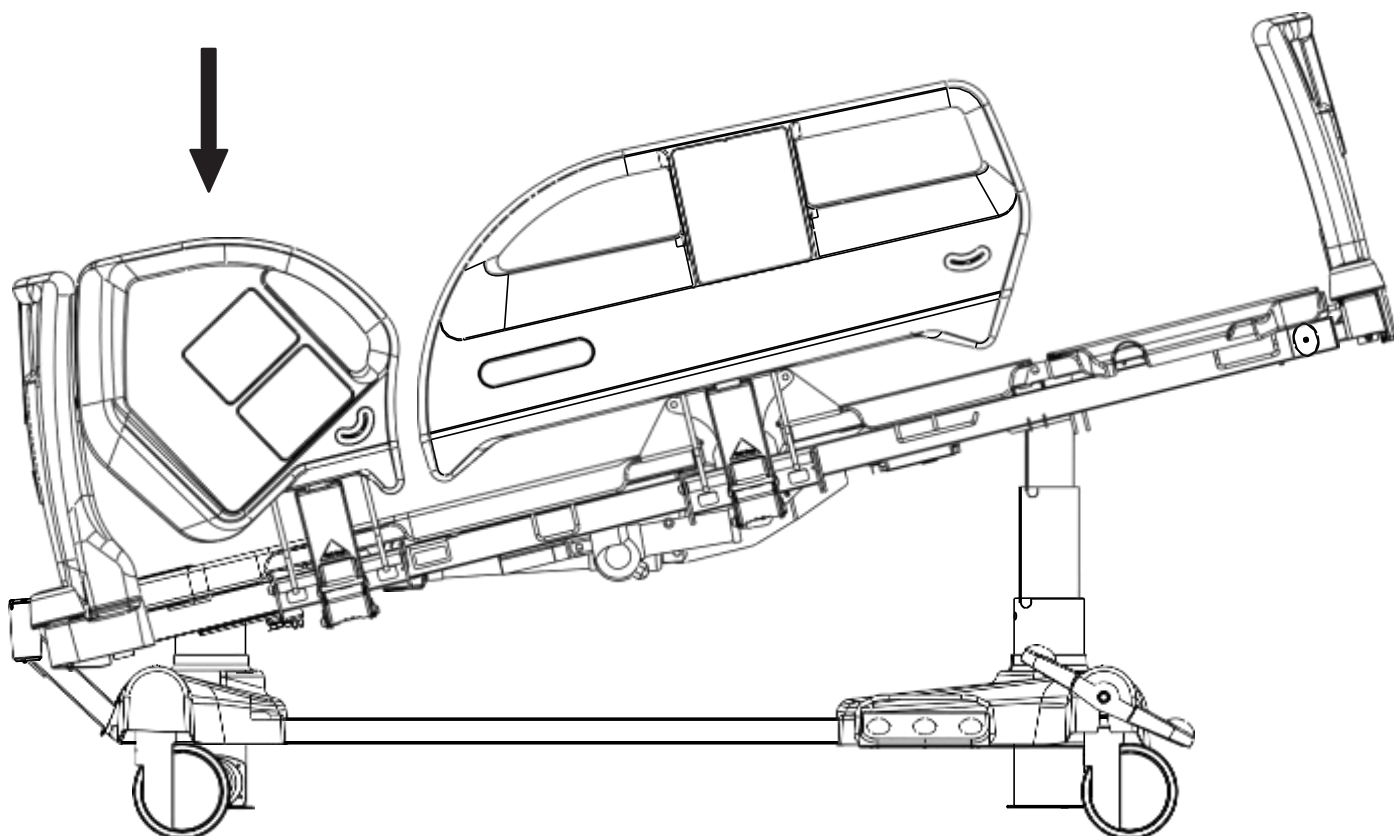

pav. Skubus Trendelenburgo padėties / Trendelenburgo pokrypio nustatymas

Skubiai Trendelenburgo padėčiai nustatyti yra naudojamas:

- Slaugytojo valdymo skydelis
- Palydovo valdymo skydelis


Trendelenburgo padėtis sudaro sąlygas pacientui nepatirti šoko.

Nustatant Trendelenburgo padėtį, pakreipta atraminė čiužinio platforma yra ištiesinama.

BLOKUOTĖS funkcija neturi įtakos skubaus Trendelenburgo padėties nustatymo funkcijai!



pav. Skubaus Trendelenburgo padėties nustatymo mygtukas (slaugytojo valdymo skydelis)

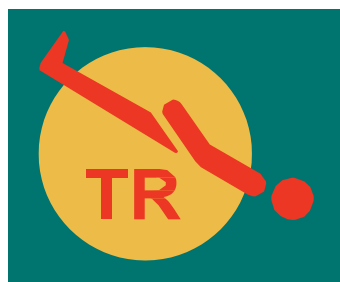

pav. Skubaus Trendelenburgo padėties nustatymo mygtukas (palydovo valdymo skydelis)


Slaugytojo valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Spauskite skubaus Trendelenburgo padėties nustatymo mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis

Palydovo valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Spauskite skubaus Trendelenburgo padėties nustatymo mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis. -punktas 6.4d

11.5.8 Atvirkštinis Trendelenburgo pokrypis ir Trendelenburgo pokrypis

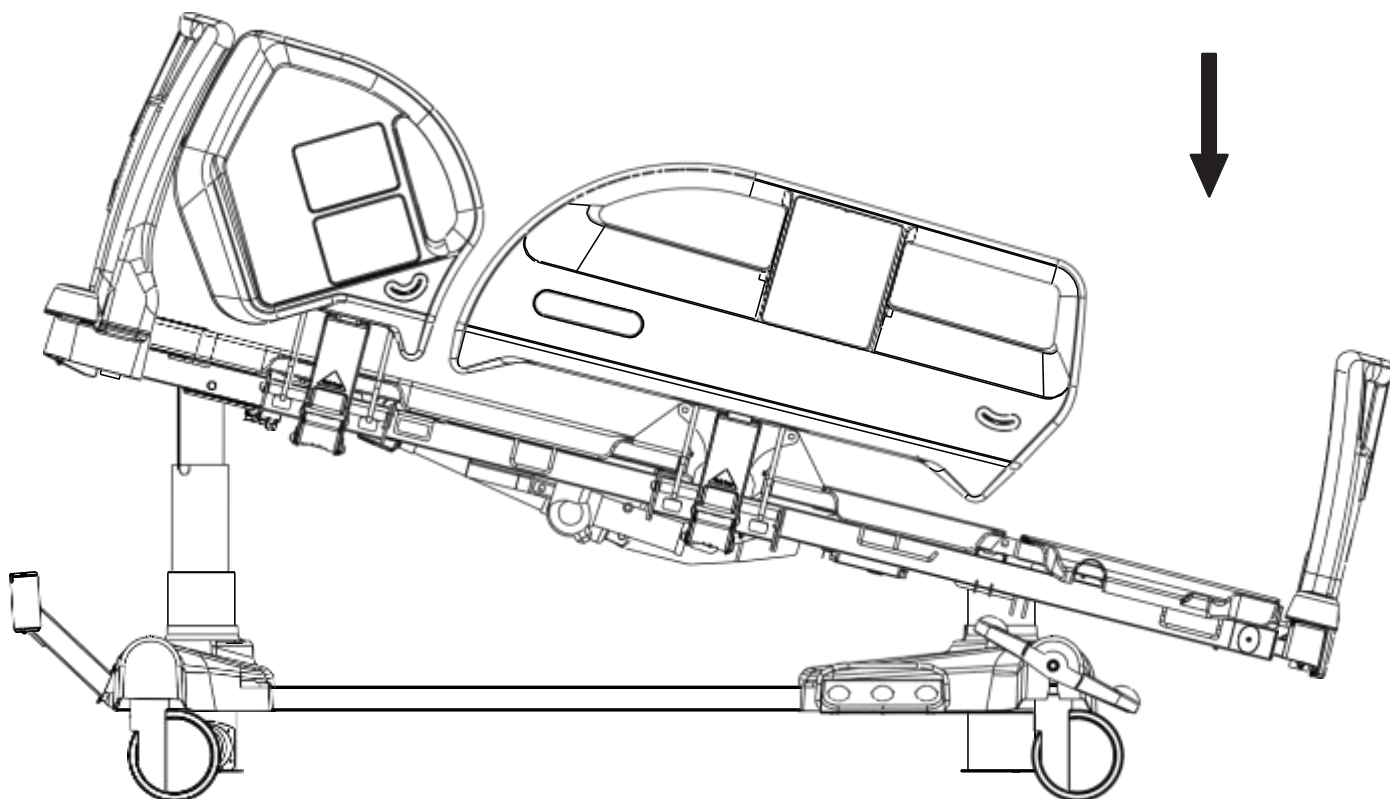


pav. Atvirkštinis Trendelenburgo pokrypis

Trendelenburgo pokrypiui arba atvirkštiniam Trendelenburgo pokrypiui nustatyti yra naudojamas:

- Slaugytojo valdymo skydelis
- Palydovo valdymo skydelis

Atsižvelgiant į konfigūraciją, pakreipimo metu lova sustoja horizontalioje padėtyje (0°). Norėdami tęsti pakreipimą, paspauskite atitinkamą pokrypio mygtuką.

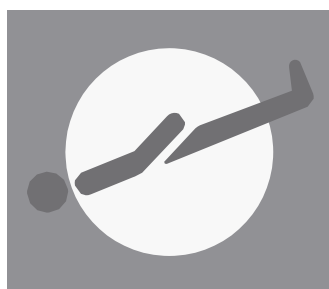

pav. Trendelenburgo pokrypio mygtukas (slaugytojo valdymo skydelis)

Slaugytojo valdymo skydelis:


- Paspauskite  mygtuką.
- Spauskite Trendelenburgo pokrypio mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis.



pav. Atvirkštinio Trendelenburgo pokrypio mygtukas (slaugytojo valdymo skydelis)

Slaugytojo valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Spauskite atvirkštinio Trendelenburgo pokrypio mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis.

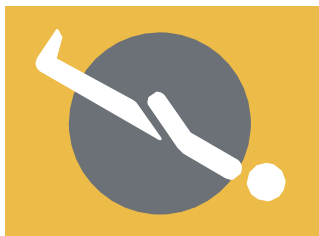

pav. Trendelenburgo pokrypio mygtukas (palydovo valdymo skydelis)

Palydovo valdymo skydelis:

- ▶ Paspauskite  mygtuką.
- ▶ Spauskite Trendelenburgo pokrypio mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis.




pav. Atvirkštinio Trendelenburgo pokrypio mygtukas (palydovo valdymo skydelis)

Palydovo valdymo skydelis:

- ▶ Paspauskite  mygtuką.
- ▶ Spauskite atvirkštinio Trendelenburgo pokrypio mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis.

11.5.9 CPR padėtis

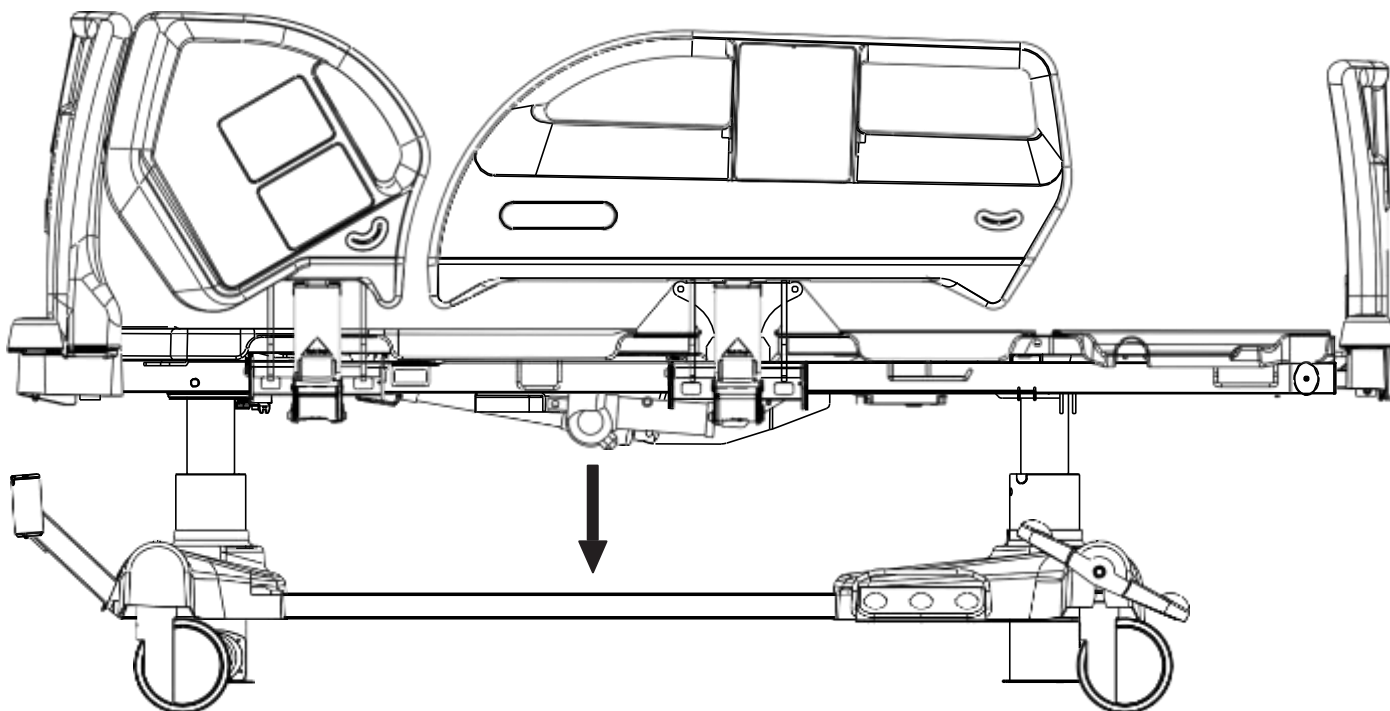

CPR padėčiai nustatyti yra naudojamas:

- Slaugytojo valdymo skydelis
- Palydovo valdymo skydelis

CPR padėtyje atraminė čiužinio platforma yra nustatoma į žemą padėtį, o atraminės čiužinio platformos visos dalys yra bazinėje (plokščioje) padėtyje. punktas 6.4b



pav.CPR padėties mygtukas (slaugytojo valdymo skydelis)

Slaugytojo valdymo skydelis:

- Spauskite CPR padėties mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis.





pav.CPR padėties mygtukas (palydovo valdymo skydelis)

Palydovo valdymo skydelis:

- Spauskite CPR padėties mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis.- punktas 6.4b

11.5.10 Lovos mechaninis ilginamasis elementas- punktas 2.3

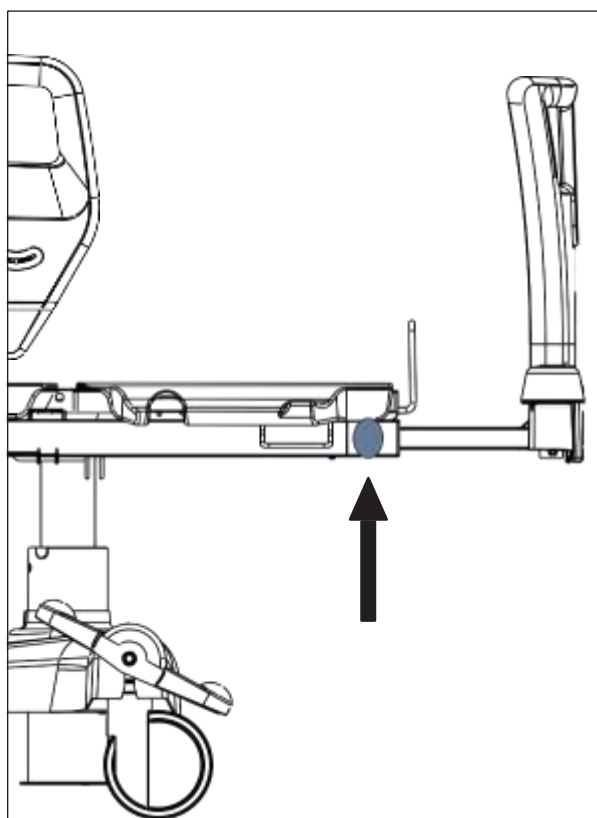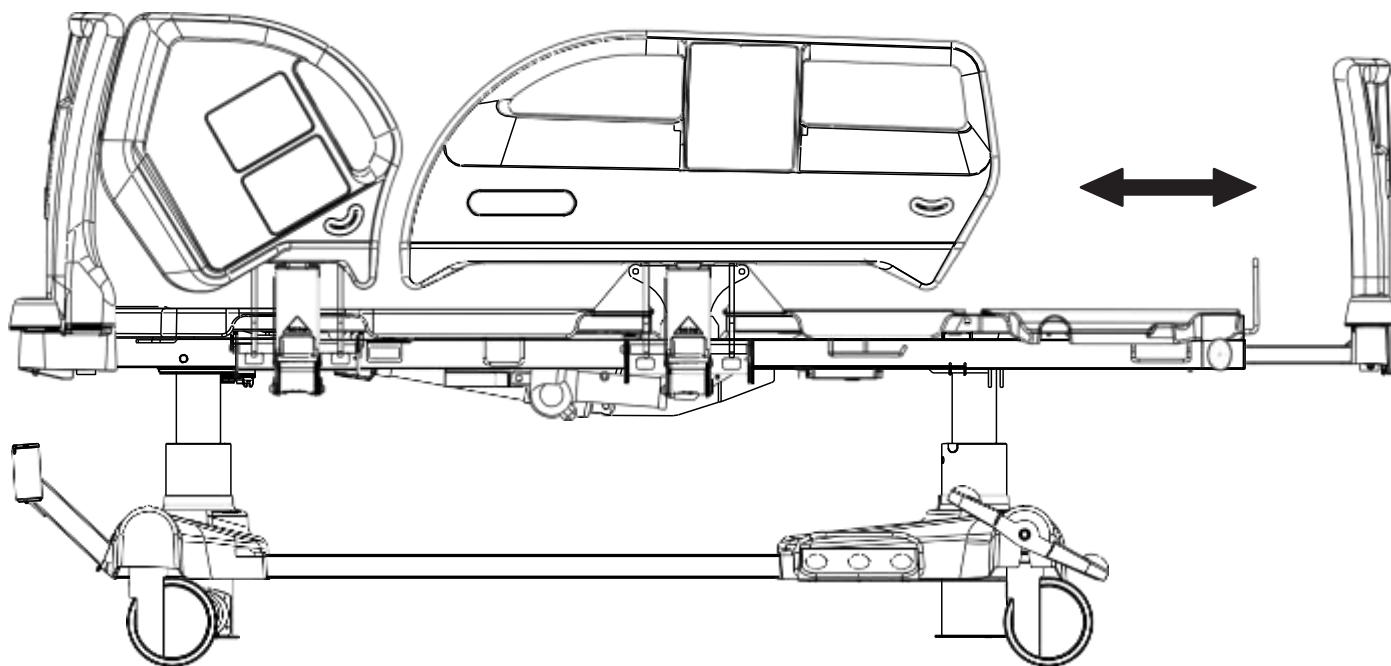

pav. Lovos ilginamojo elemento apsauginio fiksatoriaus padėtis

Lovos ilginamojo elemento padėtys yra 2.

Norėdami pailginti lovą:

- ▶ Ištraukite apsauginius užraktus kojūgalyje, abiejuose rėmo šonuose.
- ▶ Pasukite apsauginius fiksatorius 90° kampu. Apsauginiai fiksatoriai yra atlaisvinti.
- ▶ Patraukite kojūgalio plokštę į pasirinktą padėtį.
- ▶ Pasukite apsauginius fiksatorius 90° kampu ir įspauskite, kad užfiksuotumėte pailginimo padėtį.

Norėdami patrumpinti lovą:


- ▶ Ištraukite apsauginius fiksatorius kojūgalyje, abiejuose rėmo šonuose.
- ▶ Pasukite apsauginius fiksatorius 90° kampu. Apsauginiai fiksatoriai yra atlaisvinti.
- ▶ Pastumkite kojūgalio plokštę į pasirinktą padėtį.
- ▶ Pasukite apsauginius fiksatorius 90° kampu ir įspauskite, kad užfiksuotumėte pailginimo padėtį.

Čiužinio laikiklis - punktas 2.6


Kai lova be čiužinio yra pailginta, galima pareguliuoti čiužinio laikiklį.

Norėdami pareguliuoti čiužinio laikiklį:


- ▶ Nuimkite blauzdų atramos dangtį nuo atraminės čiužinio platformos .
- ▶ Įstatykite fiksatorius pasirinktose padėtyse iš abiejų čiužinio laikiklio pusių.
- ▶ Padėkite blauzdų atramos dangtį į vietą atraminėje čiužinio platformoje.

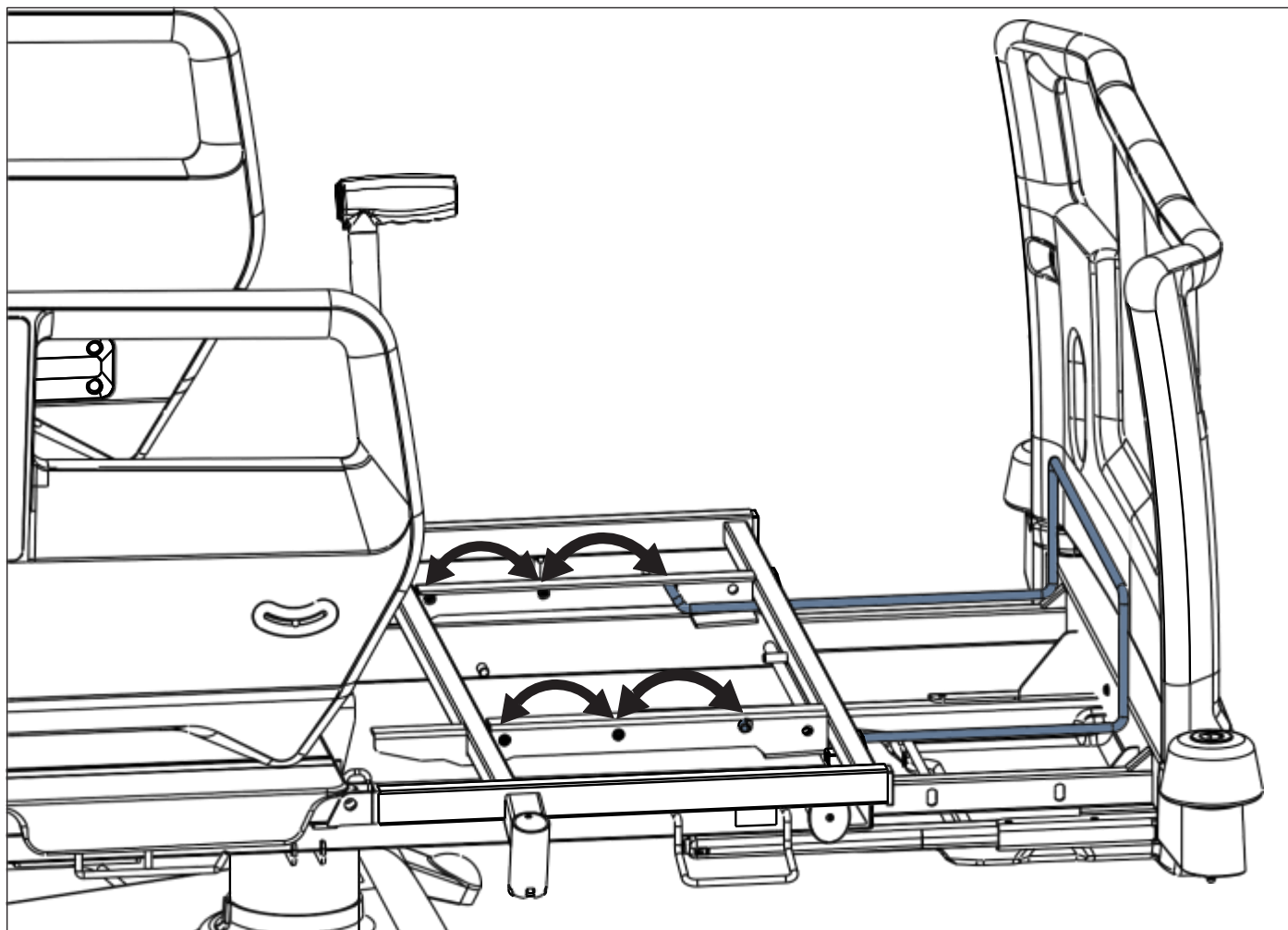


pav. Čiužinio laikiklio reguliavimas

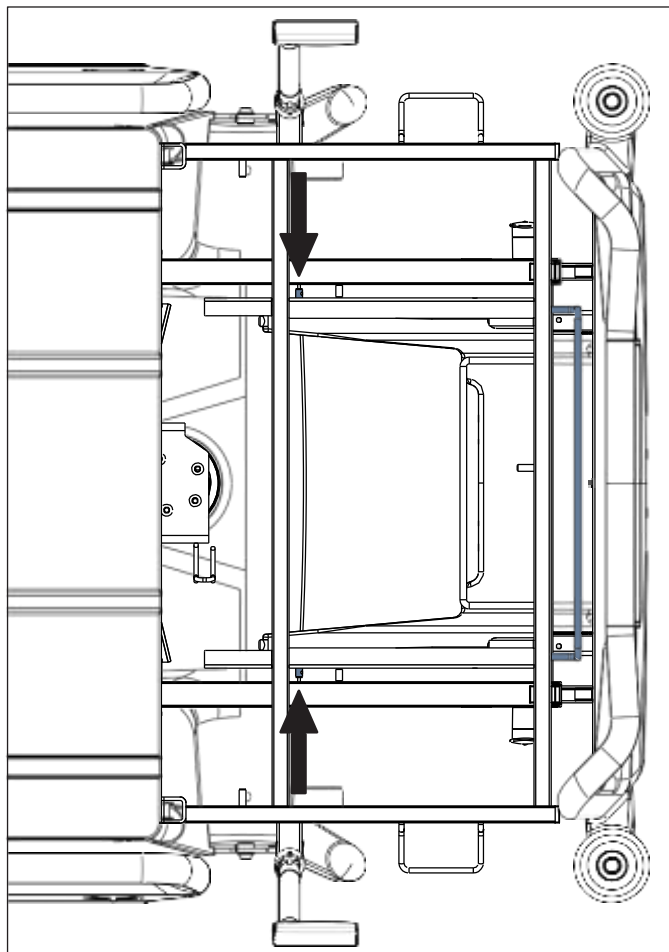

pav. Čiužinio laikiklio bazinė padėtis

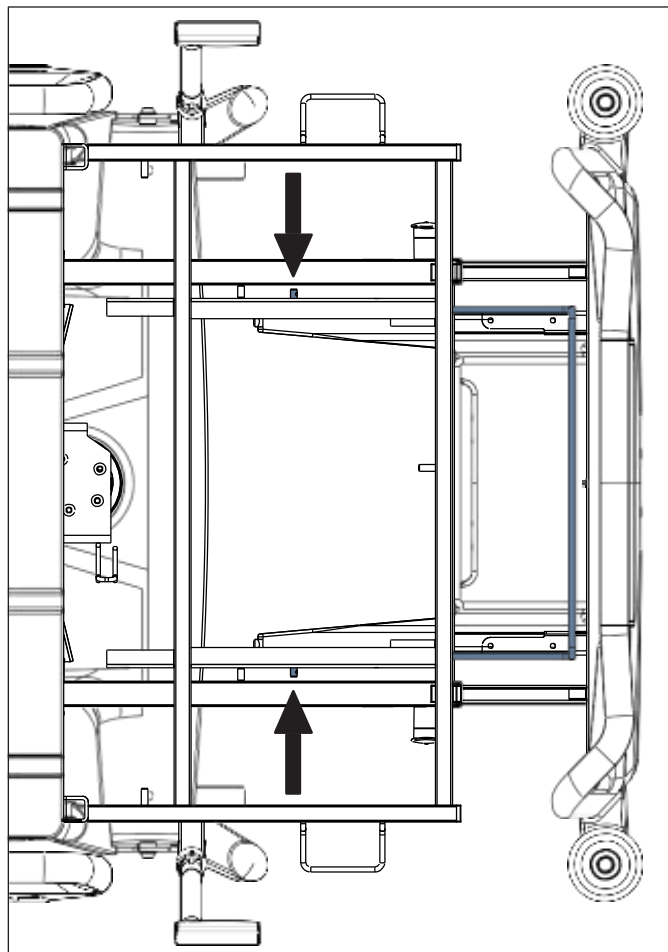


pav. Čiužinio laikiklio padėtis pailginus per vieną žingsnį

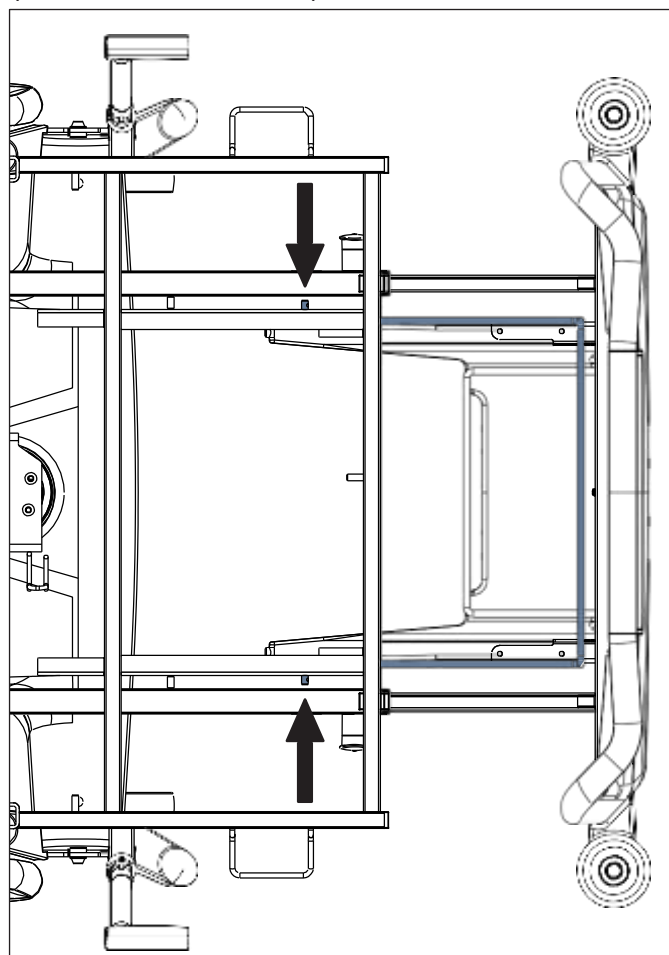

pav. Čiužinio laikiklio padėtis pailginus per du žingsnius

11.5.11 Kardiologinės pagalbos padėtis-punktas 6.4a

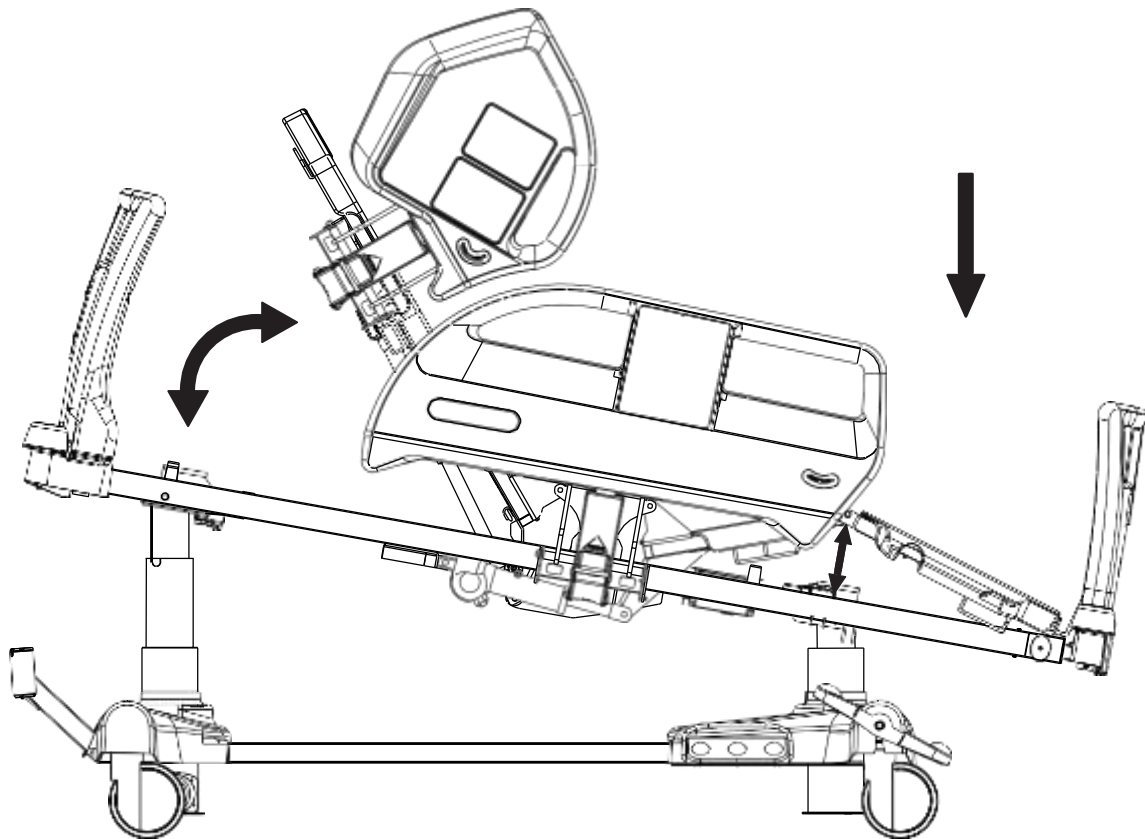

Kardiologinės pagalbos padėčiai nustatyti yra naudojamas:

- Slaugytojo valdymo skydelis
- Palydovo valdymo skydelis



pav. Kardiologinės pagalbos padėties mygtukas (slaugytojo valdymo skydelis)

Slaugytojo valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Spauskite kardiologinės pagalbos padėties mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis.




pav. Kardiologinės pagalbos padėties mygtukas (palydovo valdymo skydelis)

Palydovo valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Spauskite kardiologinės pagalbos padėties mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis.-punktas 6.4a

11.5.12 Mobilizavimo padėtis

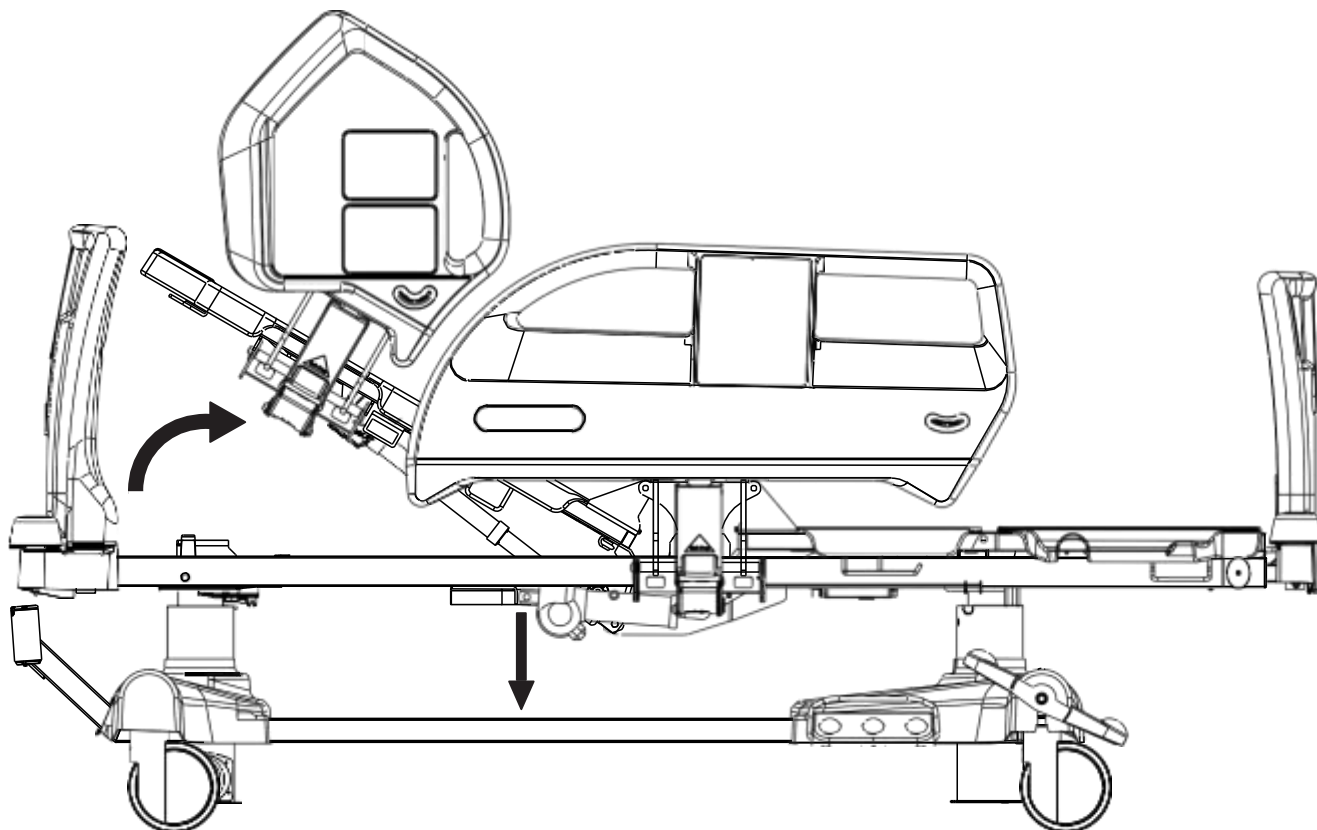

Mobilizavimo padėčiai nustatyti yra naudojamas:

- Slaugytojo valdymo skydelis

Nustatant mobilizavimo padėtį, lova nusileidžia į žemiausią lovos aukštį, o nugaros atrama pasiekia didžiausią kampą.



pav. Mobilizavimo padėties mygtukas (slaugytojo valdymo skydelis)

Slaugytojo valdymo skydelis:

- Paspauskite  mygtuką.
- Spauskite mobilizavimo padėties mygtuką, kol bus pasiekta norima padėtis.

11.5.13 „Ergoframe“

„Ergoframe®“ yra nugaros atramos ir šlaunų atramos reguliavimo kinematinė sistema, kuri pailgina atraminę čiužinio platformą sėdmenų sekcijoje.


„Ergoframe®“ paplatina vietą dubens sričiai automatinio kontūro nustatymo metu. Paplatėjus vietai, jėgos poveikis yra mažesnis, todėl sumažėja ir spaudimas, galintis sukelti dubens srities sužalojimus.

„Ergoframe“ išlaiko stabilią ergonomišką paciento kūno ir stuburo padėtį, taip apribodama nepageidaujamą paciento judėjimą lova žemyn arba aukštyn. Suderintas judėjimas neleidžia pacientui slinkti per čiužinį ir taip išlaiko tolygią paciento kūno padėtį, nesusietą su lovos dalių padėtimi.

12 Svarstyklių valdymas (tik versija su svarstyklėmis)

Svarstyklėms valdyti naudokite „iBoard Basic“ skydelį.

„iBoard Basic“ skydelis

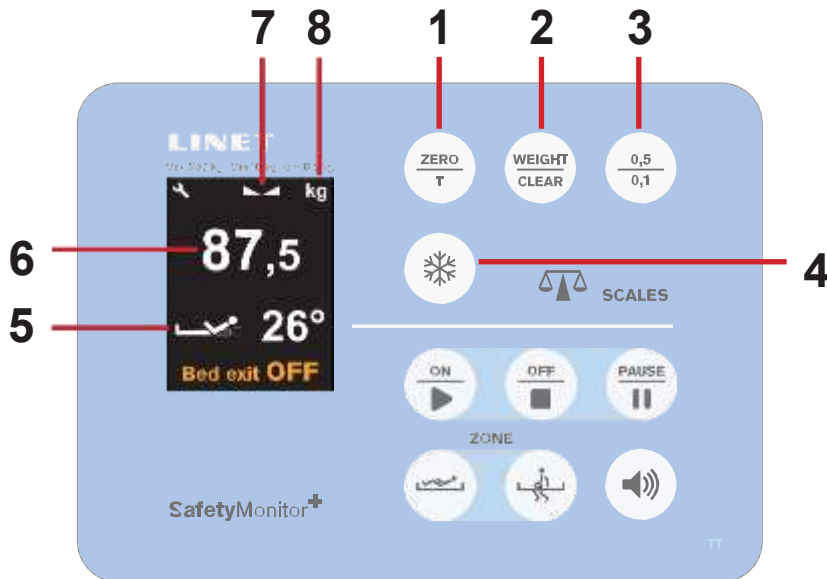

1. ZERO/T mygtukas (nustatyti nulį svarstyklėse arba išskaičiuoti neužimtos lovos svorį)
2. WEIGHT/CLEAR (svoris / valyti) mygtukas (atšaukti)
3. Padalos vertės perjungimo mygtukas (0,5 kg / 0,1 kg)
4. HOLD mygtukas
5. Nugaros atramos kampo indikato-rius- punktas 21.4c
6. Svorio vertė
7. Stabilių svarstyklių piktograma
8. Svorio vienetas (kg)

pav. Svarstyklių sekcija („iBoard Basic“ skydelis) – ekranas ir klaviatūra

12.1 Paruošimas

- Įdėkite čiužinį ir įtaisyskite priedus, kad paruoštumėte lovą prieš guldydami pacientą ir naudodami svarstykles.



ATSARGIAI!

Nevisiškai paruošus svarstyklės bus naudojamos netinkamai!

- Kiekvieną kartą prieš guldydami naują pacientą, nustatykite svarstykles išskaičiavę neužimtos lovos svorį.

12.2 Neužimtos lovos svorio išskaičiavimas

Neužimtos lovos svoris gali būti išskaičiuojamas 5–249,5 kg diapazone. Neužimtos lovos svoris išskaičiuojamas tam, kad prieš guldydami pacientą į lovą ekrane būtų nustatytas „0“.

Neužimtos lovos svorio išskaičiavimas turi būti atliekamas, kai lovoje neguli pacientas, bet yra čiužinys, patalynė, pagalvės ir būtini priedai. Rekomenduojama nustatyti atraminę čiužinio platformą apie 20 cm aukščiau žemiausios horizontalios padėties.

Norėdami išskaičiuoti neužimtos lovos svorį:

- Pasirūpinkite, kad lovos neliestų joks daiktas ir asmuo, išskyrus jus.
- Palaikykite nuspaustą  mygtuką, kol ims mirksėti vertė (6). Atleiskite  mygtuką.
- Vėl paspauskite  mygtuką, kad patvirtintumėte neužimtos lovos svorio išskaičiavimą. Ekranu rodoma yra „0“.

Paguldykite pacientą į lovą.

Norėdami atšaukti neužimtos lovos svorio išskaičiavimą:

- Paspauskite  mygtuką tuo metu, kai atliekate neužimtos lovos svorio išskaičiavimą.

12.3 Rodmenys punktas 21.5

Patikros padalos vertė yra 0,5 kg.-punktas 21.5

- Paspauskite  mygtuką, kad 5 s būtų rodoma 0,1 kg patikros padalos vertė.

Šios veiksenos metu ekrane mirksi svorio vienetas (kg) ir dešimtainės trupmenos kablelis.

Laukelyje 6 yra rodomas faktinis svoris, kuris išlieka ekrane.

Jei lova yra sukonfigūruota kaip EMR paruošta lova, svorio vertė automatiškai išnyksta po 1 minutės, o vietoje jos ekrane pasirodo

lovos paveikslėlis. Jei reikia, paspauskite  mygtuką, kad vėl būtų rodoma svorio vertė.

12.4 Sulaikymo režimas- punktas 21.7.b

Sulaikymo režimas gali būti naudojamas tik tada, kai svarstyklės stabilizavosi.

Šis režimas teikia galimybę pridėti arba nuimti lovos priedus bei kitus daiktus nekeičiant svorio vertės.

Norėdami įjungti sulaikymo režimą:

▶ Palaukite, kol svarstyklės stabilizuosis. Piktograma  arba  įsijiebia, kai svarstyklės stabilizuojasi.

▶ Spauskite  mygtuką, kol ekrane pasirodys sniegės piktograma .

▶ Pridėkite reikalingus priedus arba nuimkite nereikalingus.

Norėdami išjungti sulaikymo režimą:

▶ Pridėję arba nuėmę priedus palaukite, kol svarstyklės stabilizuosis (rodoma  arba  piktograma).

▶ Paspauskite mygtuką .

▶ Ekrane parodoma pradinė svorio vertė.

Norėdami išjungti sulaikymo režimą nefiksavę svorio vertės:

▶ paspauskite  mygtuką.

12.5 Lovos perkrova-punktas 21.6

Jei lovos apkrova didesnė nei 254,5 kg:

▶ ekrane parodoma „HIGH“.

Jei lovos apkrova didesnė nei 260 kg:

▶ ekrane parodoma „OVERLOAD“.

PASTABA. Jei lova yra perkrauta, neįmanoma nustatyti lovos padėties arba atlikti manipuliavimo veiksmų, kol perkrova nepašalinama.

PASTABA. Lovos perkrova visada turi pirmumą sulaikymo režimo ir neužimtos lovos svorio išskaičiavimo funkcijos atžvilgiu.

12.6 Nepakankama lovos apkrova

Jei lovos apkrova nepakankama:

▶ ekrane parodoma „LOW“.

12.7 Svėrimas nustačius pokrypį

Tikslumą lemia spiritinis gulsčiukas, įtaisytas dešiniajame lovos galvūgalio kampe. Jei burbuliukas yra ryškiai apskritime, vadinasi, pasverta tiksliai.

12.8 Nulio nustatymas svarstyklėse punktas 21.7.a

Nulį galima nustatyti tik ± 5 kg diapazone gamyklinio nulio atžvilgiu.

Nulio nustatymas yra naudojamas svorio rodmeniui atstatyti ir su naudotoju susietai nulinei vertei nustatyti, taip nustatant didžiausią svėrimo sistemos svorio diapazoną. Nulio nustatymas turi būti atliekamas lovai esant tuščiai, neapkrautai, be čiužinio ir priedų. Nulio nustatymas atliekamas po sumontavimo, svorio patikrinimo arba priežiūros darbų.

Norėdami nustatyti nulį svarstyklėse:

▶ Nustatykite lovą maždaug 20 cm aukščiau žemiausios padėties, o atraminę čiužinio platformą nustatykite į horizontalią padėtį. Pasirūpinkite, kad lovos neliestų niekas, išskyrus jus.

▶ Palaikykite nuspaustą  mygtuką, kol ims mirksėti svorio vertė.

▶ Paspauskite  mygtuką, kad patvirtintumėte nulio nustatymą.

Ekrano rodmuo yra „0“, o nulio nustatymą patvirtina garsinis signalas.

Norėdami atšaukti nulio nustatymą:

▶ paspauskite  mygtuką tuo metu, kai atliekate nulio nustatymą.



pav. SULAIKYMO režimas („iBoard Basic“ skydelis)



pav. Didelė apkrova („iBoard Basic“ skydelis)




pav. Nepakankama lovos apkrova („iBoard Basic“ skydelis)

13 Atsikėlimo iš lovos stebėjimo sistema (tik versija su svarstyklėmis) – punktas 21.4d

Per „iBoard Basic“ skydelį valdykite atsikėlimo iš lovos stebėjimo sistemą.-

Jei lovoje yra įrengtas „SafetyMonitor“ (priedas) atsikėlimo iš lovos stebėjimo funkcija yra įtraukta į „Safety Monitor“ funkcijas.

„iBoard Basic“ skydelis

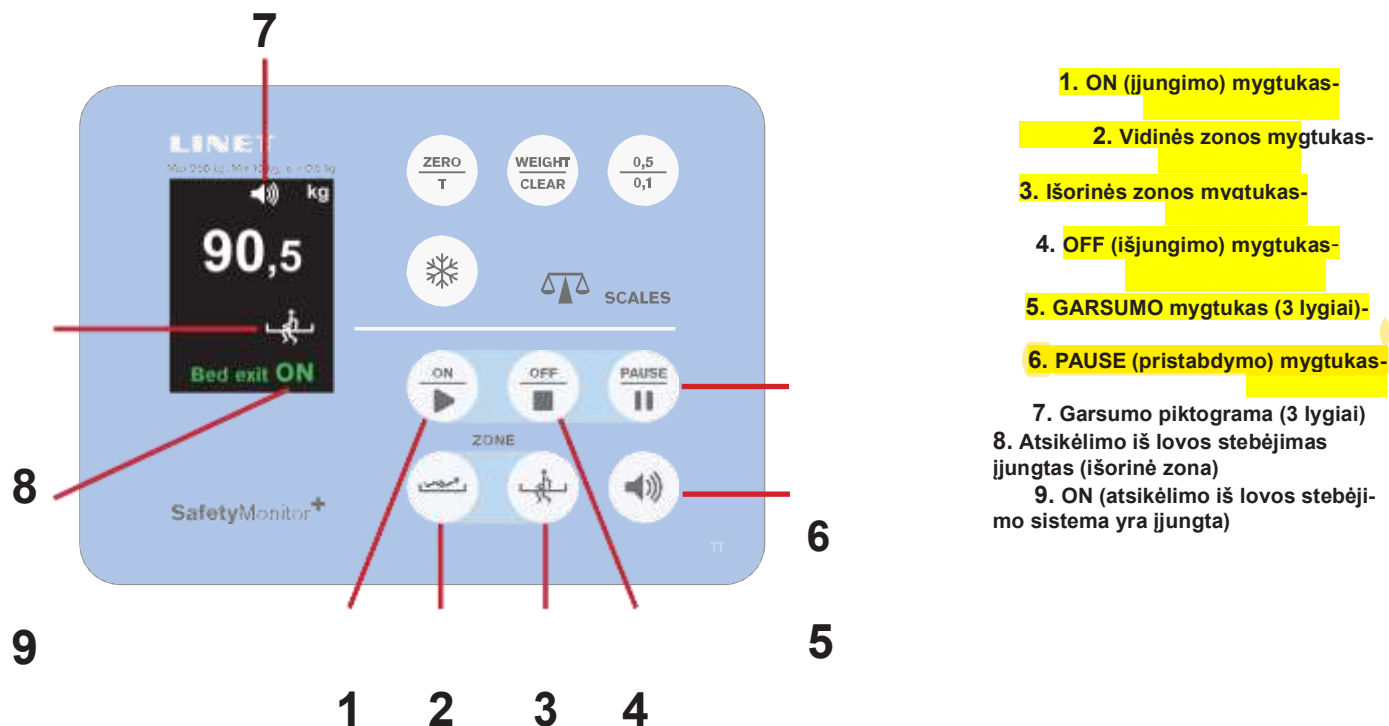

1. ON (įjungimo) mygtukas-

2. Vidinės zonos mygtukas-

3. Išorinės zonos mygtukas-

4. OFF (išjungimo) mygtukas-

5. GARSUMO mygtukas (3 lygiai)-

6. PAUSE (pristabdymo) mygtukas-

7. Garsumo piktograma (3 lygiai)

8. Atsikėlimo iš lovos stebėjimas įjungtas (išorinė zona)

9. ON (atsikėlimo iš lovos stebėjimo sistema yra įjungta)

pav. Atsikėlimo iš lovos stebėjimo sistemos sekcija („iBoard Basic“ skydelis) – ekranas ir klaviatūra- punktas

13.1 Paruošimas

- Paguldykite pacientą į lovą su tinkamu čiužiniu.
- Tam, kad atsikėlimo iš lovos stebėjimas vidinėje zonoje būtų tinkamas, pacientas turi būti lovos centre.

13.2 Atsikėlimo iš lovos stebėjimo sistemos įjungimas

Atsikėlimo iš lovos stebėjimas yra **IŠJUNGTA**, o pagal numatytąjį nustatymą yra rodoma **OFF** piktograma.

Norėdami įjungti atsikėlimo iš lovos stebėjimą:

- paspauskite mygtuką.

Ekrane pasirodo **ON** piktograma.

Jei atsikėlimo iš lovos stebėjimas yra įjungtas, pagal numatytąjį nustatymą yra stebima vidinė zona. Todėl ekrane pasirodo piktograma.

PASTABA. Mažiausias paciento svoris atsikėlimui iš lovos stebėti yra 35 kg.

13.3 Stebima zona

Norėdami perjungti išorinės zonos stebėjimą:

- paspauskite mygtuką.

Ekrane pasirodo piktograma.

Norėdami vėl nustatyti vidinę zoną:

- paspauskite mygtuką.

Ekrane pasirodo piktograma.

13.4 ATSIKĖLIMO IŠ LOVOS PAVOJAUS SIGNALAS

Pavojaus signalas yra duodamas, kai pacientas palieka parinktą stebimą zoną arba kai PRISTABDYMO laikotarpis baigėsi, o paciento nėra reguliarioje padėtyje

Norėdami išjungti pavojaus signalą:

- ▶ paspauskite  mygtuką.

Atsikėlimo iš lovos stebėjimas yra išjungiamas, o ekrane

parodoma **OFF** piktograma. Garsinis pavojaus signalas yra išjungiamas.

Norėdami pristabdyti pavojaus signalą:

- ▶ paspauskite  mygtuką arba  mygtuką.

Ekrane parodoma „Pause 15 min.“ („Pristabdyti 15 min“) ir ima veikti 15 minučių atgalinio skaičiavimo laikmatis. Garsinis pavojaus signalas yra pristabdomas.



pav. Atsikėlimo iš lovos pavojaus signalo vaizdinė signalizacija („iBoard Basic“ skydelis)

13.4.1 Pavojaus signalo garsumas


Numatytasis nustatymas yra didžiausias pavojaus signalo garsumo lygis.

Pavojaus signalo garsumą galima nustatyti prieš pavojaus signalą ir jo skambėjimo metu.

Norėdami sumažinti pavojaus signalo garsumo lygį:

- ▶ Paspauskite  mygtuką.

Ekrane pasirodo  piktograma su žemesniu pavojaus signalo garsumo lygiu. Garsumas yra sumažinamas.

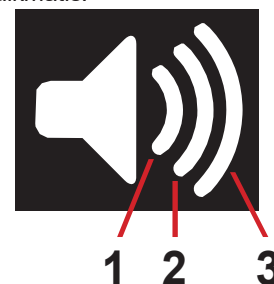

pav. Garsumo piktograma

Norėdami grąžinti didžiausią pavojaus signalo garsumo lygį:

- ▶ Paspauskite  mygtuką po to, kai bus pasiektas mažiausias pavojaus signalo garsumo lygis.

Ekrane pasirodo  piktograma su 3 lygiais.

1. Mažiausias garsumas
2. Vidutinis garsumas
3. Didžiausias garsumas

13.5 PRISTABDYMAS

PRISTABDYMO režimo metu atsikėlimo iš lovos stebėjimas yra laikinai pertraukiamas, o pavojaus signalai yra neaktyvinti.

Kai yra įjungtas išorinės zonos stebėjimas, PRISTABDYMO laikotarpis yra nutraukiamas pacientui grįžus į lovą per 15 minučių trunkantį PRISTABDYMO laikotarpį.

Norėdami nustatyti atsikėlimo iš lovos stebėjimo PRISTABDYMĄ:

- ▶ paspauskite  mygtuką arba  mygtuką.

Ekrane pasirodo piktograma **10** su 15 minučių atgalinio skaičiavimo laikmačiu.

Tada, kai baigiasi PRISTABDYMO laikotarpis, o pacientas yra reguliarioje padėtyje, atsikėlimo iš lovos stebėjimas vėl įjungiamas.



pav. PRISTABDYMO laikotarpio atgalinis skaičiavimas (su liekančiomis minutėmis)

Norėdami pratęsti PRISTABDYMO laikotarpį:

- ▶ vėl paspauskite  mygtuką, kad pratęstumėte atgalinio skaičiavimo laikmatį dar 15 minučių.

Norėdami nutraukti PRISTABDYMO laikotarpį:

- ▶ paspauskite  mygtuką.

13.6 Atsikėlimo iš lovos stebėjimo sistemos išjungimas

Norėdami išjungti atsikėlimo iš lovos stebėjimą:

- ▶ paspauskite  mygtuką.

Ekrane pasirodo **OFF** piktograma.




pav. Atsikėlimo iš lovos stebėjimas IŠJUNGTA („iBoard Basic“ skydelis)

14 Įranga- punktas 22.2

14.1 Priedų bėgelis su plastikiniais kabliais (pasirinktinė įranga)


Priedų bėgelis su 2 plastikiniais nuimamais kabliais yra skirtas priedams kabinti. Po vieną bėgelį yra lovos šonuose.- punktas 22.2

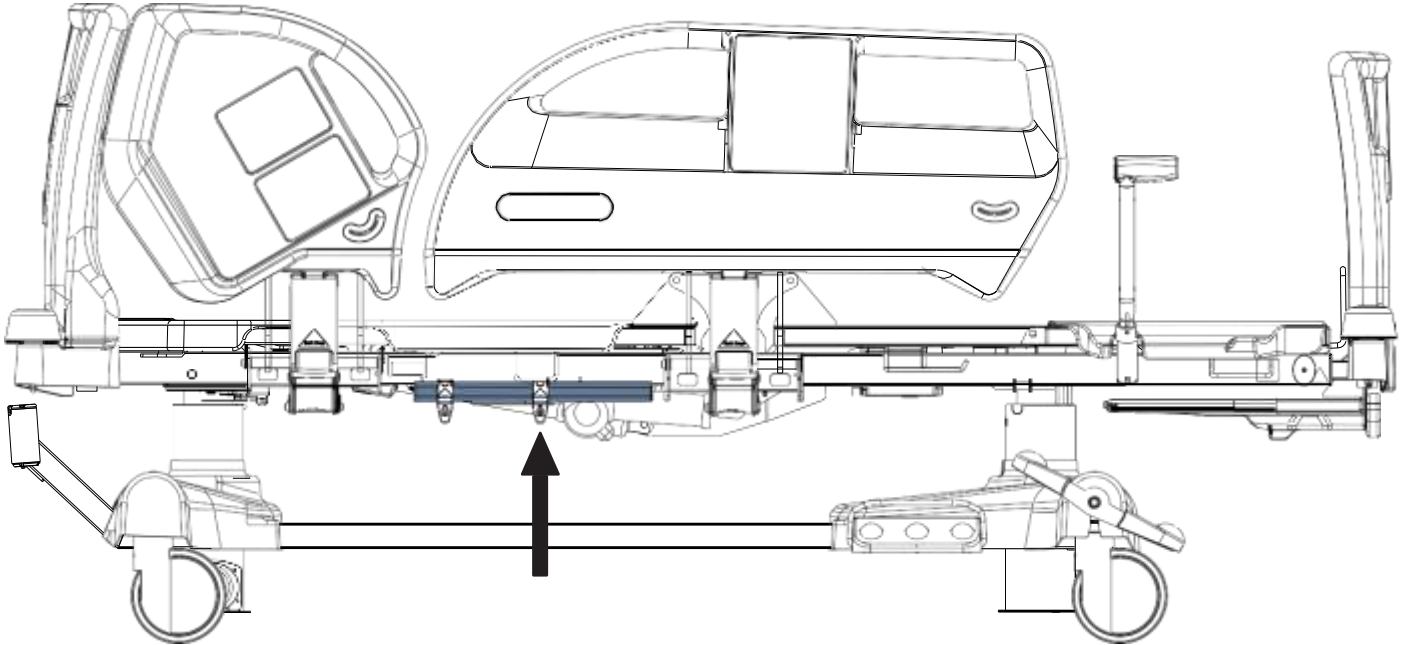

pav. Priedų bėgelis su plastikiniais kabliais (iš šono)

14.2 Baltinių lentynėlė (standartinė įranga)

Baltinių lentynėlė yra skirta daiktams (pvz., baltiniams ar paklodėms), kurie atitinka jos matmenis, laikyti. Palydovo valdymo skydelį galima laikyti baltinių lentynėlėje. Baltinių lentynėlė yra kojūgalyje po kojūgalio plokšte. Baltinių lentynėlės saugioji darbinė apkrova yra 15 kg.

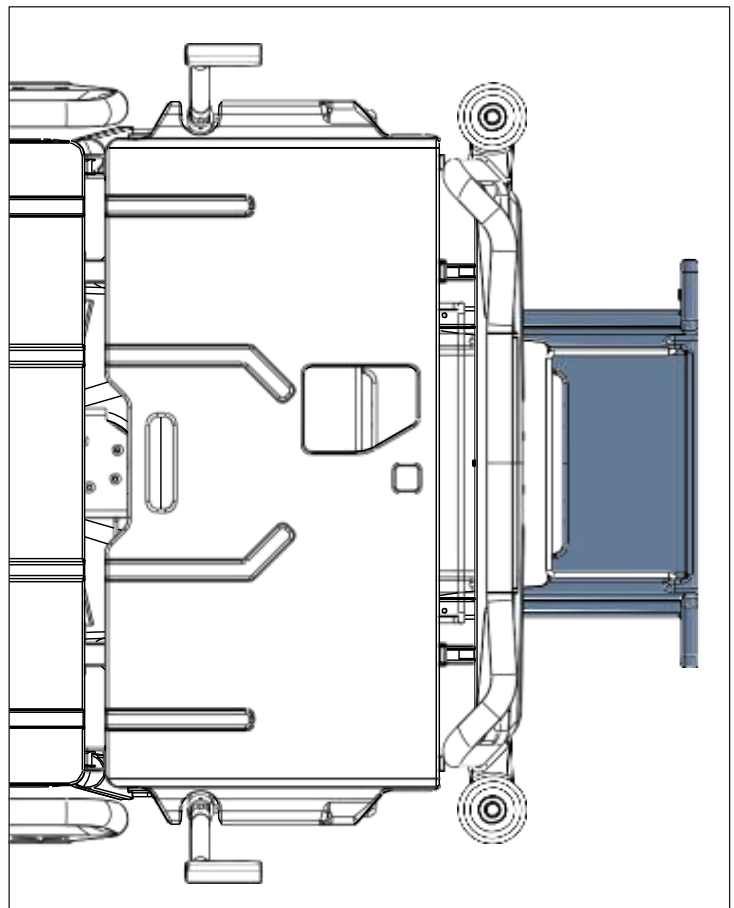

pav. Baltinių lentynėlė (kojūgalyje)

14.3 „Mobi-Lift®“ rankena (pasirinktinė įranga)- punktas 14.1; 14.2; 14.3; 14.4



ĮSPĖJIMAS!

Stojantis kyla pavojus susižaloti paslydus ar pargriuvus!

- ▶ Įsitikinkite, ar „Mobi-Lift“ rankenos yra iki galo įstatytos į cilindrinčius lizdus.
- ▶ Įsitikinkite, ar patalynė neįlindo tarp cilindrinio lizdo ir atraminės rankenos.

„Mobi-Lift®“ elementas yra pasirinktinis. Tai yra atraminė rankena, padidinanti paciento saugą jam keliantis iš lovos. „Mobi-Lift®“ – atraminė rankena, kurioje yra integruotas aukščio nustatymo mygtukas.- punktas 14.3 Pacientas gali pakelti ir nuleisti atraminę čiužinio platformą.


„Mobi-Lift“ rankenų naudojimas

Norėdami nustatyti „Mobi-Lift“ rankeną:

- ▶ Pakelkite rankeną aukšty, link lovos.
- ▶ Iki galo įstumkite rankeną į cilindrinį lizdą.

Norėdami nustatyti atraminės čiužinio platformos aukštį:

- ▶ Paspauskite  mygtuką bet kuriame valdymo elemente.
- ▶ Paspauskite mygtuką lovos aukščiui reguliuoti.

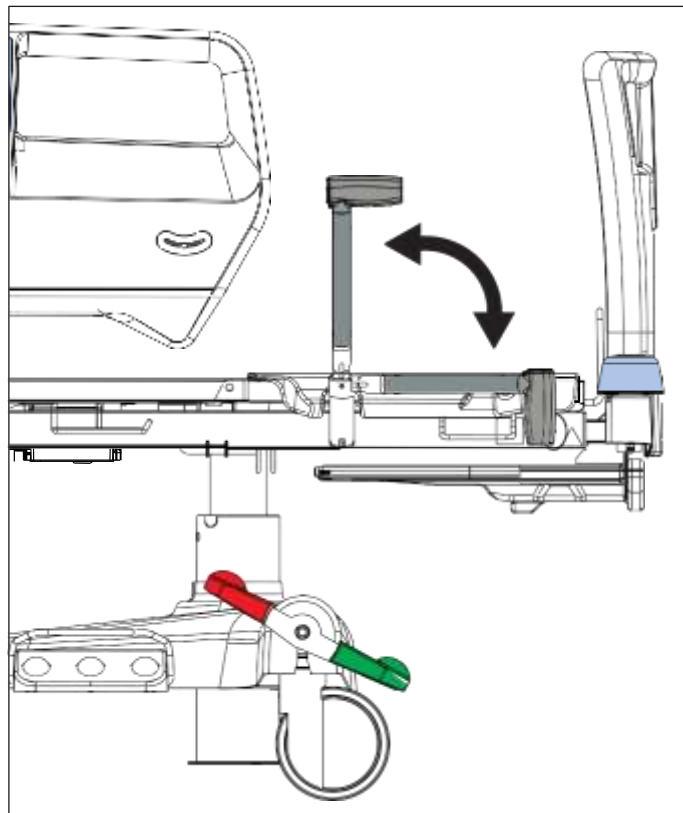

pav. „Mobi-Lift“ rankena
- Punktas 14.2

14.4 Stabdžių signalas (pasirinktinė įranga) - punktas 1.27

Jei lovoje įrengtas stabdžių signalas, o ši lova yra prijungta prie elektros tinklo, stabdžio signalas skamba tada, kai lovos stabdžiai nenustatyti./punktas 1.27.1; 1.27.2

14.5 „i-Brake®“ sistema (pasirinktinė įranga)

Lova gali būti įrengta su automatinio ratukų stabdžiu. Automatinis ratukų stabdys užkerta kelią pacientų ir darbuotojų sužalojimams dėl nenustatytų lovos stabdžių. Stabdžiai automatiškai įjungiami praėjus 60 sekundžių po to, kai lova įjungžiama į elektros tinklą, ir praėjus 60 sekundžių po to, kai jie buvo atleisti, bet lova nebuvo judinama. Stabdžius galima įjungti ir rankiniu būdu.- punktas 23

14.6 Įtraukiamas penktasis ratukas (pasirinktinė įranga)- punktas 15.3

Lovoje, važiuoklės centre gali būti įrengtas penktasis ratukas. Penktasis ratukas padeda vairuoti lovą ir manevruoti ilguose koridoriuose bei mažose patalpose. Įtrauktas penktasis ratukas netrukdo pasiekti po važiuokle esančius įtaisus.

14.7 „LINIS SafetyPort“ sistema (pasirinktinė įranga)

„LINIS SafetyPort“ yra medicinos prietaisų duomenų sistema, įgalinanti specifinių parametrų perkėlimą iš lovos į ligoninės informacijos sistemą. Į lovą integruoti jutikliai teikia galimybę nuolat stebėti saugos parametrus.

Duomenys iš visų į sistemą įjungtų lovų yra renkami ir vertinami vienu metu, viename centre.

Registruojami duomenys yra visiškai anoniminiai, o sistema nenaudoja paciento vardo ir pavardės arba identifikacinio numerio. Visi duomenys yra siunčiami automatiškai ir reguliariai atnaujinami. Be to, klientas gali konfigūruoti tuos duomenis, kuriuos jam reikia gauti.

14.8 „i-Drive Power“ sistema (pasirinktinė įranga)

„i-Drive Power“ sistema – bendrasis aprašymas

Lova gali būti įrengta su „i-Drive Power“ ratu. „i-Drive Power“ sistema padeda ligoninės darbuotojams pervežti pacientą vairuojant lovą mažiausiomis fizinėmis pastangomis.

„i-Drive Power“ ratas yra įtaisytas lovos centre po važiuoklės rėmu. „i-Drive Power“ sistema naudoja atskirą akumuliatorių bei įkroviklį ir yra nepriklausoma nuo lovos funkcijų, todėl šiam akumuliatoriui išsikrovus jūs vis tiek galite naudoti lovos funkcijas. Lovoje įrengtas vienas „i-Drive“ valdiklis. „i-Drive“ sistema orientuota į tiesią lovą judėjimą.

„i-Drive Power“ saugos nurodymai

- ▶ Rūpestingai laikykitės nurodymų.
- ▶ Pasirūpinkite, kad lovą valdytų tik kvalifikuoti darbuotojai.
- ▶ Pasirūpinkite, kad pervežimo metu šoniniai turėklai būtų pakelti.
- ▶ Niekada nespauskite lovos padėties nustatymo mygtukų pervežimo metu.
- ▶ Niekada nespauskite pagreitinios priekinės eigos mygtuko varydami nuolydžiu žemyn. Naudoti pagreitinios priekinės eigos mygtuką yra rekomenduojama varant nuolydžiu aukštyn, nes taip judėti veiksmingiau.
- ▶ Ypatingų atsargumo priemonių reikia imtis varant atbuline eiga. Visada išlaikykite atstumą nuo lovos ir niekada nespauskite atbulinės eigos mygtuko, kai varote nuolydžiu žemyn arba aukštyn.
- ▶ Nevežkite naudodami laisvosios pavaros funkciją, kai nuolydis yra didesnis nei 1 laipsnis, nebent lovą būtų galima suvaldyti pasitelkus užtekinai personalo narių.
- ▶ Varant žemyn nuolydžiu, kuris yra didesnis nei 6 laipsnių, reikės atitinkamų fizinių pastangų.
- ▶ Niekada nepalikite lovos su aktyvinta „i-Drive Power“ sistema be išmokytų darbuotojų priežiūros.
- ▶ Visada naudokite įprastą mechaninių stabdžių sistemą lovai sustabdyti ir stabilizuoti.
- ▶ Varydami lovą su „i-Drive Power“, būkite labai atidūs. Žiūrėkite, ar arti nėra žmonių ir objektų, ir venkite susidūrimų su jais atsargiai vairuodami, ypač pasirinkdami atitinkamą greitį.
- ▶ Prieš naudodami „i-Drive Power“ įsitinkite, ar lova yra atjungta, o lovos stabdžiai atleisti.
- ▶ Paspauskite avarinio pavaros sustabdymo mygtuką, jei reikia nedelsiant nutraukti judėjimą (pvz., išvengti susidūrimo su kitais asmenimis arba objektais).
- ▶ Pastatę lovą, įtraukite „i-Drive Power“ ratą į važiuoklę. Taip apsisaugosite nuo netinkamo naudojimo atleidžiant ir nustatant lovos stabdžius.
- ▶ „i-Drive Power“ elektromagnetinis stabdys yra skirtas tik lovai laikinai sustabdyti, o ne laikyti pastatytą ilgesnį laiką.
- ▶ Išjunkite „i-Drive Power“ akumuliatorių prieš pastatydami lovą laikyti ilgą laiką arba perveždami.
- ▶ Paspauskite avarinio įtraukimo mygtuką po važiuoklės dangčiu „i-Drive Power“ ratui įtraukti, jei „i-Drive Power“ sistema sugenda. Taip bus galima nustumti lovą į saugią vietą rankiniu būdu, nenaudojant „i-Drive Power“.
- ▶ Įtraukite „i-Drive Power“ ratą į važiuoklę kiekvieną kartą, kai ketinate pastumti lovą šonu.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į akumuliatoriaus būsenos LED indikatorius ir atitinkamai planuokite, ar pervežimui jungsite „i-Drive Power“. Dėl nepakankamos akumuliatoriaus įkrovos pervežimo metu gali kilti netikėtų keblumų ir pavojų.
- ▶ Baigę vežti, visada prijunkite lovos kištuką, kad įkrautumėte akumuliatorių ir paruoštumėte lovą varyti naudojant „i-Drive Power“.
- ▶ „i-Drive Power“ akumuliatorių reikia keisti kas 2 metus, siekiant išlaikyti tinkamas „i-Drive Power“ funkcijas.

Naudojimo nurodymai



ĮSPĖJIMAS!

Neatsargiai vairuojant kyla pavojus susižaloti!

- ▶ Visada vairuokite saugiai ir apdairiai.
- ▶ Stebėkite, ar kelyje nėra kliūčių, ir stenkitės nieko neužkliudyti.
- ▶ Įsitinkite, ar nėra žmonių ten, į kuriuos juda lova.
- ▶ Manipuliuokite apdairiai valdydami lovą, kad neužvažiuotumėte ant darbuotojų ar pacientų.



ATSARGIAI!

Didžiausia prošvaiva po lovą yra 11,3 cm!

- ▶ Stebėkite, ar kelyje nėra kliūčių, ir stenkitės nieko neužkliudyti.

Paskirtis.

- ▶ Lovo pervežimas (su pacientu arba be jo), atliekamas ligoninės darbuotojų.

Naudojimas ne pagal paskirtį:

- ▶ Važiavimas ant lovos
- ▶ Kitoks naudojimo būdas, neaprašytas naudojimo instrukcijoje
- ▶ Kai naudoja kitas asmuo, ne išmokyti darbuotojai

PASTABA. Lovoje galima pervežti tik po vieną pacientą; jos negalima naudoti kitiems daiktams vežti (išskyrus lovos priedus, įtvirtintus savo padėtyje).

PASTABA. Informacijos apie naudojimo būdus, kurie nėra apibūdinti skyriuje „Naudojimo nurodymai“ aukščiau, teiraukitės iš LINET®.

Manipuliavimas



ATSARGIAI!

Dėl netinkamos „i-Drive Power“ pagrindinio valdymo skydelio kabelio padėties kabelis gali būti pažeistas!

▶ Įsitikinkite, ar pagrindinio valdymo skydelio jungiamasis kabelis yra ištiestas tinkamai.




ATSARGIAI!


Materialinė žala dėl netinkamo naudojimo!

▶ Nieko nekabinkite ant pagrindinio valdymo skydelio ir jo kabelio!


1. „Safety Sense“ (liečiamasis jutiklis)
2. Pagrindinis valdymo skydelis
3. Pagrindinio valdymo skydelio kabelis – tinkama kabelio padėtis
4. Įjungimo skydelis

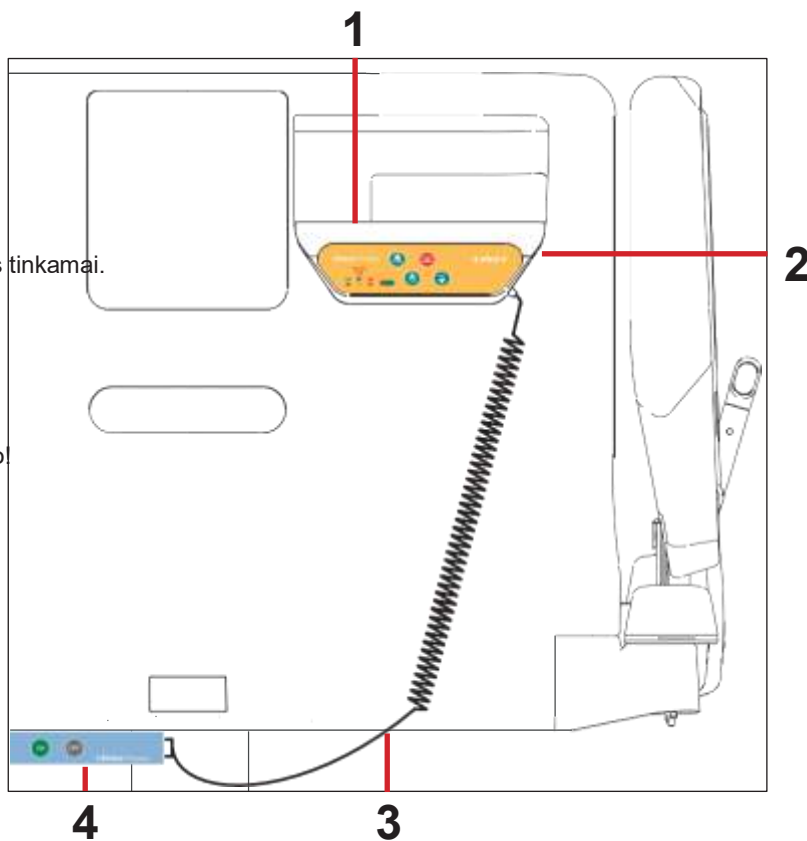

pav. Pagrindinio valdymo skydelio padėtis

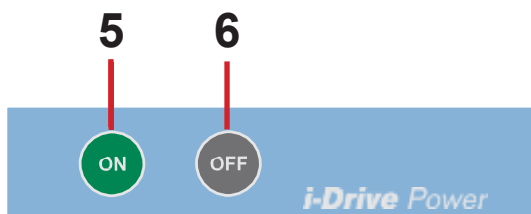

pav. Įjungimo skydelis (4)

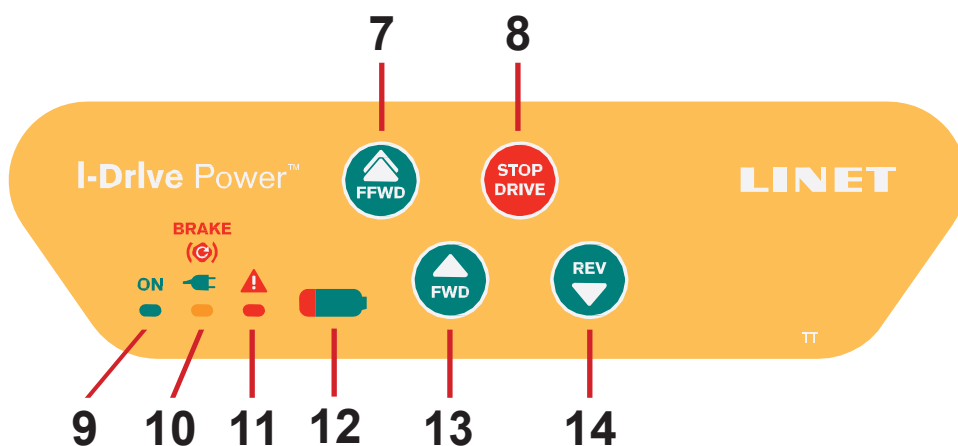

pav. Pagrindinis valdymo skydelis (2)

5. ON mygtukas („i-Drive“ rato įjungimo mygtukas)
6. OFF mygtukas („i-Drive“ rato įtraukimo ir išjungimo mygtukas)
7. PAGREITINTOS PRIEKINĖS EIGOS mygtukas
8. PAVAROS SUSTABDYMO mygtukas
9. ON (įjungimo) LED
10. Tinklo maitinimo LED (lova yra prijungta prie elektros tinklo arba lovos stabdžiai nustatyti)
11. Trikties LED
12. Įkrovos būsenos ir trikties LED
13. PRIEKINĖS EIGOS mygtukas
14. ATBULINĖS EIGOS mygtukas

PASTABA. „i-Drive Power“ valdikliu negalima valdyti lovos funkcijų. Valdykite lovą naudodami lovos valdymo elementus.

PASTABA. Pagrindinis valdymo skydelis yra papildytas liečiamuoju jutikliu (1); jūsų ranka visada turi liesti „i-Drive Power“ valdymo skydelį, kad būtų galima naudoti sistemos funkcijas. Atleidus ranką, „i-Drive Power“ sistema sustos.

PASTABA. „i-Drive“ rato pakėlimas ir nuleidimas valdomas elektriniu būdu per „i-Drive“ įjungimo skydelį.

14.8.1 „i-Drive Power“ įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti „i-Drive Power“:

1. Patikrinkite, ar įjungtas „i-Drive Power“ pagrindinis jungiklis.
2. Paspauskite įjungimo mygtuką  įjungimo skydelyje. „i-Drive“ ratas nusileis, o žalias indikatorius ims mirksėti.


Norėdami išjungti „i-Drive Power“:

1. Įtraukite „i-Drive“ ratą paspaudę  mygtuką įjungimo skydelyje.
2. Išjunkite „i-Drive“ naudodami pagrindinį jungiklį.


Avarinis „i-Drive Power“ rato įtraukimas:

1. Paspauskite bet kurį  mygtuką lovoje.
2. Išjunkite „i-Drive Power“ naudodami pagrindinį jungiklį.
3. Paspauskite „i-Drive Power“ avarinio įtraukimo mygtuką, esantį apatinėje važiuoklės pusėje, po etikete.

PASTABA. Naudokite avarinį įtraukimą, jei akumuliatorius išsikrauna arba sutrinka pavaros veikimas, kad galėtumėte nustumti lovą į saugią vietą rankiniu būdu, nejudindami „i-Drive Power“.

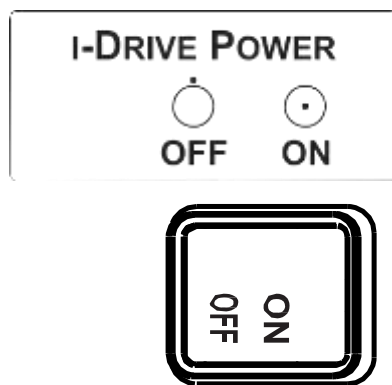

pav. „i-Drive Power“ pagrindinis jungiklis su etikete

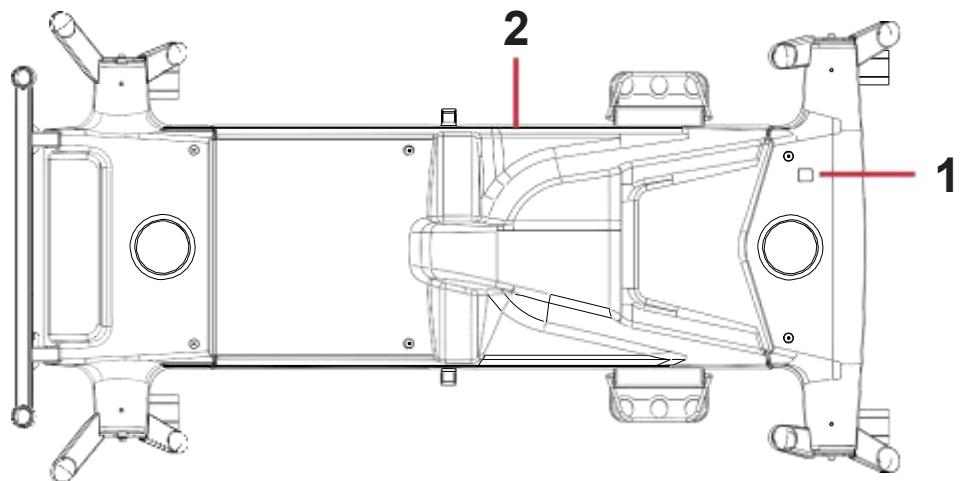

1. „i-Drive Power“ pagrindinis jungiklis
2. „i-Drive Power“ avarinio įtraukimo mygtukas

TO RETRACT THE I-DRIVE POWER WHEEL IN EMERGENCY:

1. PRESS ANY GO BUTTON ON THE BED
2. SWITCH OFF THE MAIN POWER SWITCH
3. HOLD THE EMERGENCY RETRACTION BUTTON UNDER THE CHASSIS COVER



pav. „i-Drive Power“ avarinio įtraukimo mygtuko etiketė

14.8.2 Mechanizuota pvara



ATSARGIAI!

Materialinė žala dėl netinkamo vežimo ir netyčinio pajudėjimo!

- ▶ Prieš perstumdami įsitikinkite, ar lova atjungta nuo elektros tinklo.
- ▶ Prieš perstumdami įsitikinkite, ar pagalbinio lizdo kištukas (jei yra) atjungtas nuo elektros tinklo.
- ▶ Prieš surinkdami, išrinkdami ir atlikdami techninę priežiūrą, pasirūpinkite, kad ratukai būtų užblokuoti (pvz., prieš atlikdami „i-Drive Power“ sistemos techninę priežiūrą).
- ▶ Įsitikinkite, ar ratukai užblokuoti, jei lova yra užimta.
- ▶ Perveždami pakabinkite elektros tinklo kabelį ant atitinkamo lovos kablo.

1. Patikrinkite, ar įjungtas „i-Drive Power“ pagrindinis jungiklis.
2. Paspauskite mygtuką  įjungimo skydelyje. „i-Drive“ ratas nusileis, o  LED ims mirksėti.
3. Uždėkite ranką ant „Safety Sense“ liečiamojo jutiklio (1) ir paspauskite  mygtuką,  mygtuką arba  mygtuką. Tam, kad galėtumėte naudoti „i-Drive Power“, jūsų ranka turi būti uždėta ant „Safety Sense“ jutiklio; jei ranką nuimsite, „i-Drive Power“ sustos.
4. „i-Drive“ variklis iš karto sustabdomas, o elektrinis stabdys įjungiamas paspaudus raudoną  mygtuką stabdant arba iškilus avarinei situacijai.
5. „i-Drive Power“ valdymo sistema automatiškai išjungiamas, o elektrinis stabdys įjungiamas, jei nė viena „i-Drive“ funkcija yra nenaudojama per 3 minutes. Tai signalizuoja žalias LED , užgęstantis po 3 minučių.

PASTABA. „i-Drive Power“ nėra suprojektuota varyti aukštyn arba žemyn nuolydžiu, didesniu nei 6° arba ilgesniu nei 20 m. Varant aukštyn arba žemyn lovą, kurios apkrova atitinka pilnutinę SDA, reikia personalo narių pagalbos.

PASTABA. Kai „i-Drive“ ratas yra nuleistas, lovos neįmanoma pastumti šonu. Paspauskite  mygtuką ratui įtraukti, atblokuokite ratukus nustatydami neutralią padėtį ir tada pastumkite lovą bet kuria reikalinga kryptimi.

14.8.3 Stabdymas

1. Palaikykite nuspaustą  mygtuką, kad sustabdytumėte iš karto.
-arba-
 2. Palaikykite nuspaustą  mygtuką, kad sustabdytumėte lėtai (jei judate atbuline eiga, stabdymui paspauskite  mygtuką).
-arba-
 3. Nuimkite ranką nuo liečiamojo jutiklio srities, ir „i-Drive Power“ automatiškai įjungs stabdį.
- PASTABA.** Visada, kai baigiate arba nutraukiate pervežimą, nustatykite lovos stabdžius naudodami ratukų valdymo svirtį.
- PASTABA.** „i-Drive“ elektromagnetinis stabdys nėra skirtas laikyti lovą sustabdytą ilgesnį laiką.
- PASTABA.** Kritinėje situacijoje (pvz., įsibėgėjus važiuojant žemyn statėsiu nuolydžiu) „i-Drive“ dvigubo stabdymo sistema neleidžia greitėti ir sulėtina lovos judėjimą žemyn. Tačiau tai neužtikrina, kad lova sustos savaime be personalo narių pastangų (naudojant  mygtuką ir ratukų valdymo svirtį).

PASTABA. Važiuojant nuolydžiu žemyn, įmanoma veiksmingai pristabdyti – paspausti priešingos krypties mygtuką ir taip sulėtinti judėjimą.

14.8.4 Laisvosios pavaros funkcija

„i-Drive“ variklyje yra įdiegta laisvosios pavaros funkcija, kuri aktyvinama paspaudus priekinės eigos  ar  arba atbulinės eigos  mygtukus (kol naudotojas yra uždėjęs ranką liečiamojo jutiklio srityje).

Laisvosios pavaros funkcija išjungiamas, o stabdys įjungiamas, kai pakeičiama judėjimo kryptis. Ši funkcija yra skirta sumažinti pavojams, kylantiems važiuojant nuolydžiu.

Akumulatorius


Akumulatoriaus įkrovos būsenos:

1. Kai šis indikatorius mirksi, akumulatorius yra iš esmės išsikrovęs. (LED1)
2. 50 % (LED2)
3. 75 % (LED3)
4. 100 % – akumulatorius yra įkrautas (LED4)

Norėdami įkrauti akumuliatorių:

- Prijunkite lovos pagrindinį kabelį prie elektros tinklo šaltinio.
- „i-Drive“ sistema bus įkraunama (jei akumuliatorius išsikrovė, įkrovimas gali užtrukti iki 9 valandų).

PASTABA. Akumulatoriaus įkrovos vertės yra tik informuojamojo pobūdžio. Akumulatoriaus naudojimo trukmė sutrumpėja, jei akumuliatoriui leidžiama visiškai išsikrauti.

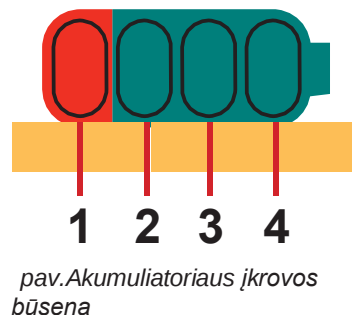

Trikčių signalizacija

Sistema yra apsaugoma nuo trikčių būsenų atliekant sustabdymą bei pavaros sistemos stabdžių nustatymą ir atsižvelgiant į atitinkamą signalizaciją. Greitai mirksintis trikties indikatorius ir akumulatoriaus indikatorius nurodo trikties būseną. Kai kurie defektai yra panaikinami automatiškai (pvz., pavaros perkaitimas). Kai pavara arba elektronika perkaista, duodamas trumpas garso signalas, o tada pavara užblokuojama.

Klaida	LED1	LED2	LED3	LED4
Perkaito pavara	IŠJ.	IŠJ.	IŠJ.	IJ.
Perkaito elektronika	IŠJ.	IŠJ.	IJ.	IŠJ.
Stabdžių klaida	IŠJ.	IŠJ.	IJ.	IJ.
Ratas nevisiškai įtrauktas	IŠJ.	IJ.	IŠJ.	IŠJ.
5 V viršyta ribinė vertė	IŠJ.	IJ.	IŠJ.	IJ.
Įsiskverbimas į FET gaubtą	IŠJ.	IJ.	IJ.	IŠJ.
Perkaito valdymo grandinė	IŠJ.	IJ.	IJ.	IJ.
Valdymo grandinės klaida	IJ.	IŠJ.	IŠJ.	IŠJ.
Įstrigo įjungimo mygtukas	IJ.	IŠJ.	IŠJ.	IJ.
Įstrigo įtraukimo mygtukas	IJ.	IŠJ.	IJ.	IŠJ.
Mygtukas aktyvus po paleidimo	IJ.	IŠJ.	IJ.	IJ.

Lempučių indikatoriai

Indikatorius	Reikšmė
GO (įjungimo) indikatorius ▶ Nuolat šviečia ▶ Mirksi	Ranka uždėta ant liečiamojo jutiklio; pavaros ratas parengtas. Ranka neuždėta ant liečiamojo jutiklio; „i-Drive“ ratas neparengtas.
Trikties indikatorius ▶ Nuolat šviečia ▶ Mirksi	„i-Drive“ negalima įjungti („i-Drive“ ratas nėra nuleistas, ratukų valdymo svirtimi yra nustatyti stabdžiai, lova yra prijungta prie elektros tinklo). Sistemos triktis (tai nurodo akumulatoriaus būsenos indikatorius). -arba- Suveikė „i-Drive“ valdymo bloko šiluminė apsauga.

Techninė specifikacija

Parametras	Vertė
„i-Drive“ rato skersmuo	8,27 col.
Didž. pagreitinamos priekinės eigos greitis (lygus pagrindas, apkrauta lova)	4,43 km/h (±15 %)
Didž. priekinės eigos greitis (lygus pagrindas, apkrauta lova)	2,16 km/h (±15 %)
Didž. atbulinės eigos greitis (lygus pagrindas, apkrauta lova)	2,16 km/h (±15 %)
Didž. kilimo kampas	6°
Triukšmo lygis (įtraukiant pavaros ratą)	65 dB

Elektros įrangos specifikacija

Parametras	Vertė
Įėjimo įtampa, dažnis	230 V AC, 50/60 Hz 127 V AC, 50/60 Hz 120 V AC, 50/60 Hz 110 V AC, 50/60 Hz 100 V AC, 50/60 Hz
Akumulatoriaus įtampa	36 V DC, talpa: 12 Ah

Parametras	Vertė
Didžiausia įėjimo galia	300 W
Saugiklis	
230 V versija	2 x T1,6 A L 250 V
127 V versija	2 x T3,15 A L 250 V
120 V versija	2 x T3,15 A L 250 V
110 V versija	2 x T3,15 A L 250 V
100 V versija	2 x T3,15 A L 250 V

„i-Drive Power“ techninė priežiūra

Periodinę techninę „i-Drive Power“ priežiūrą bent kartą per vienerius metus turi atlikti kvalifikuotas priežiūros specialistas arba įgaliotoji priežiūros paslaugas teikianti organizacija. Daugiau apie techninę priežiūrą žr. skyriuje „Techninė priežiūra“.

Priežiūros specialistas turi patikrinti:

- akumuliatoriaus būklę ir galbūt pakeisti akumuliatorių (praėjus ne daugiau kaip trejiems naudojimui metams);
- pneumatinę spyruoklę – jei būtina, pakeisti (praėjus ne daugiau kaip trejiems naudojimui metams);
- „i-Drive Power“ ratą – jei būtina, pakeisti;
- kėlimo mechanizmą – jei būtina, sutepti;
- kabelius, valdymo elementus – jei būtina, pakeisti;
- „i-Drive Power“ veikimą.

14.9 „Safestop“ funkcija (pasirinktinė įranga)-punktas 24.1; 24.2

„Safestop“ apsaugo lovos naudotoją nuo sužalojimų dėl traiškymo nuleidus atraminę čiužinio platformą.

Jei atraminei čiužinio platformai leidžiantis ant važiuoklės pasitaiko kliūtis, judėjimas yra automatiškai sustabdomas.

„iBoard“ standartiniame ekrane rodoma **SAFE STOP +**  ir pasigirsta pyptelėjimas.

14.10 Stumiamosios rankenos (pasirinktinė įranga)



ĮSPĖJIMAS!

Stumiamosios rankenos yra nesuderinamos su „i-Drive Power“ sistema!

- Nenaudokite stumiamųjų rankenų su lova, kurioje yra įrengta „i-Drive Power“ sistema!



ATSARGIAI!


Pritaisydami stumiamąsias rankenas ant galvūgalio skersinio, laikykitės šių nurodymų:

- Pritaisyti stumiamąsias rankenas privalo liginės technikas, vadovaudamasis šia naudojimo instrukcija!
- Stumiamąsias rankenas galima pritaisyti tik ant galvūgalio skersinio!
- Stumiamųjų rankenų padėties pavaizduotos žemiau pateiktame paveikslėlyje!
- Atstumas tarp lizdinio laikiklio ir skersinio, statmeno galvūgalio skersiniui, yra 12 mm.
- Varžtų veržlės turi būti lovos pusėje!

Stumiamųjų rankenų pora yra skirta lovai stumti.


Stumiamosios rankenos nėra montuojamos kartu su galvūgalio plokšte.

Stumiamosios rankenos yra pritaisytos ant galvūgalio skersinio.

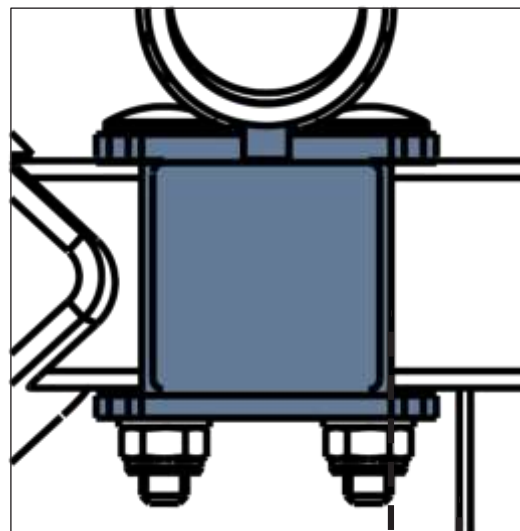

12 mm

pav. Atstumas tarp lizdinio laikiklio ir skersinio, statmeno galvūgalio skersiniui

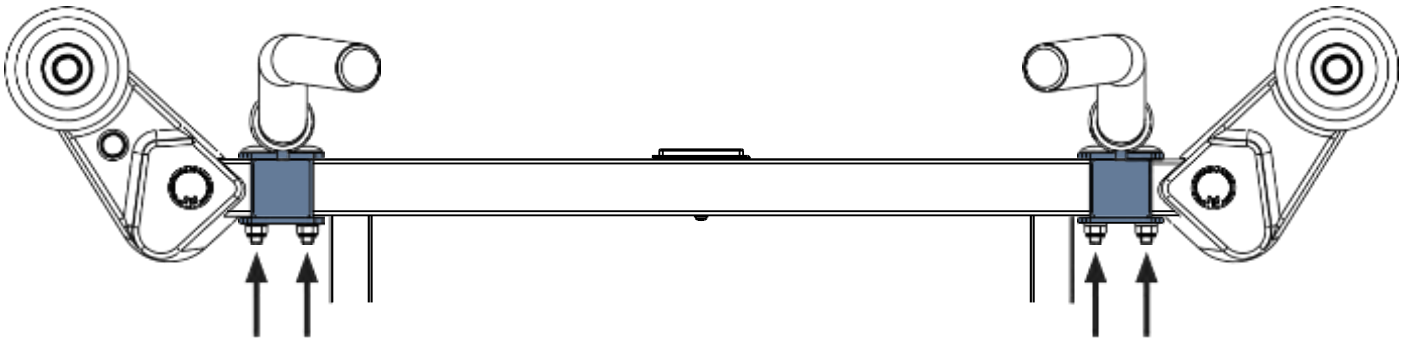


pav. Stumiamųjų rankenų pritaissymas ant galvūgalio skersinio (veržlių padėtys)

Stumiamųjų rankenų išėmimas iš lizdų:

- Ištraukite abi stumiamąsias rankenas iš nejudamai pritvirtintų lizdų galvūgalio skersinyje.

Stumiamųjų rankenų įstatymas į nejudamai pritvirtintus lizdus:

- Įstatykite abi stumiamąsias rankenas į nejudamai pritvirtintus lizdus galvūgalio skersinyje.

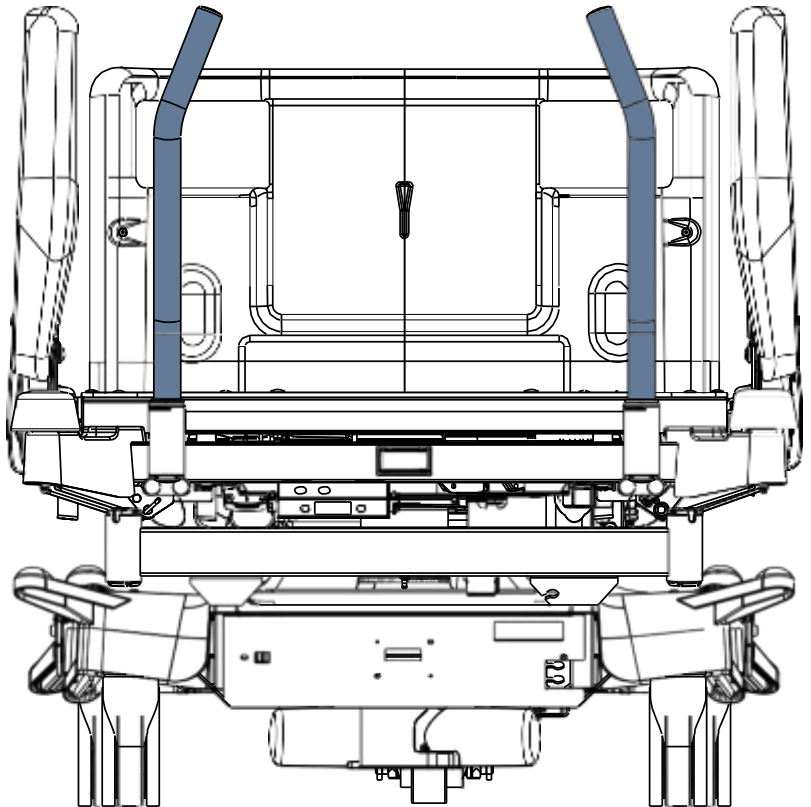

pav. „Eleganza 4“ lovos stumiamosios rankenos

14.11 Rentgenografija (pasirinktinė įranga)



ĮSPĖJIMAS!

Laikykitės didžiausių rentgeno kasetių matmenų!

- ▶ Didžiausi bet kokios rentgeno kasetės matmenys rentgeno kasetės laikikliui yra 46,5 x 39 x 1,8 cm!



ĮSPĖJIMAS!

Saugokitės, kad rentgeno kasetės nebūtų sugadintos!

- ▶ Nepalikite rentgeno kasetės rentgeno kasetės laikiklyje, jei rentgenografija nebus atliekama!



ATSARGIAI!

Saugokitės, kad rentgeno nuotraukos nebūtų sugadintos!



- ▶ Rentgeno nuotraukas darykite, kai lova yra nejudinama ir jokia lovos dalis nėra reguliuojama!
- ▶ Laikykitės šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų, kaip naudoti rentgeno kasetės laikiklį!

Lovos nugaros atrama kaip pasirinktinis elementas yra pagaminta iš presuotojo laminato ir praleidžia rentgeno spindulius. Lovoje, po nugaros atrama iš kairiojo šono yra įstatomas rentgeno kasetės laikiklis. Ši konstrukcija suteikia galimybę daryti paciento plaučių rentgeno nuotraukas neiškeliant paciento iš lovos.

Būtinai veiksmai prieš atliekant tyrimą

- ▶ Pasirūpinkite, kad pacientas gulėtų lovos centre.
- ▶ Įsitikinkite, ar nugaros atrama yra žemiausioje padėtyje, o šoniniai turėklai pakelti.
- ▶ Ištraukite rentgeno kasetės laikiklį.
- ▶ Įstatykite rentgeno kasetę horizontalioje padėtyje.
- ▶ Vėl įstatykite rentgeno kasetės laikiklį su rentgeno kasete, kad kasetės centro indikatorius būtų tiksliai po atraminės čiužinio platformos kraštu.
- ▶ Pakoreguokite rentgeno kasetės laikiklio padėtį krumpliniu mechanizmu, kad viršutinis rentgeno kasetės kraštas būtų tiksliai po paciento pečių linija. Tam, kad orientavimas būtų teisingas, atsižvelkite į etiketėje pateiktą skalę. Nurodykite paciento pečių linijos padėtį naudodami skalės skaičius. Padėkite rentgeno kasetės laikiklį taip, kad turėklo centras būtų ties atitinkamu skalės skaičiumi. -punktas 1.7.3
- ▶ Pareguliuokite rentgeno įrenginio parametrus ir padarykite nuotrauką.

PASTABA. Ši procedūra labiausiai reikalinga pacientams, kurie negali judėti dėl kritinės būklės (pavyzdžiui, vidinio kraujavimo) arba nestabiliems pacientams.

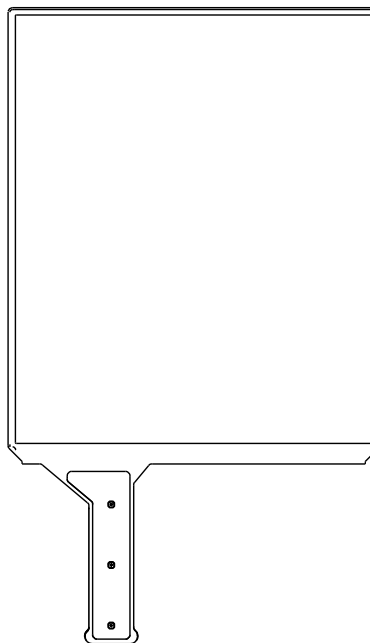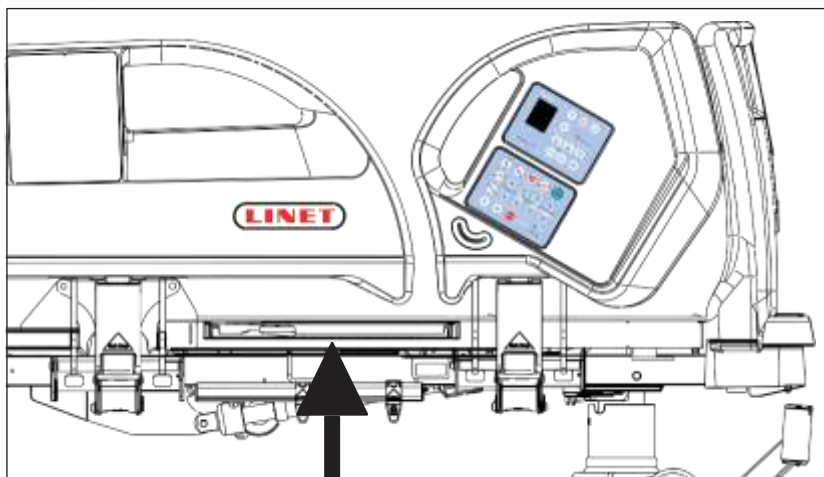

pav. Rentgeno kasetės laikiklis


14.12 Važiuklės dangtis




ATSARGIAI!

Materialinės žalos pavojus dėl objektų ant važiuklės dangčio!


► Nedėkite jokių daiktų ant važiuklės dangčio!

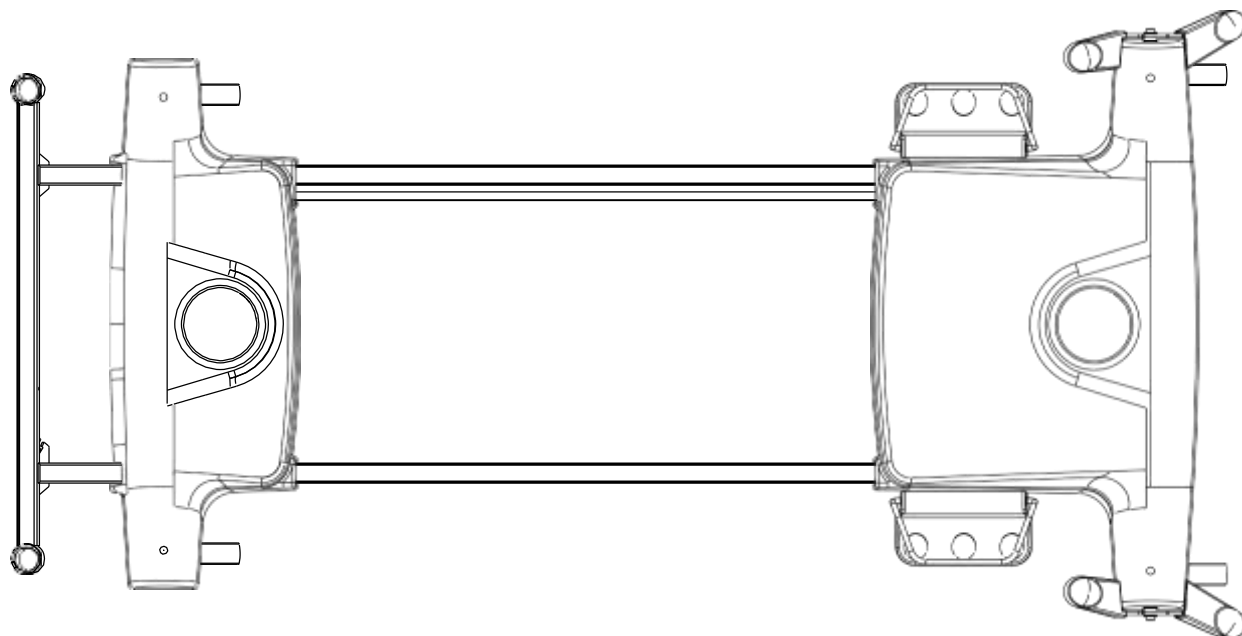

pav.2 dalių važiuklės dangtis (standartinė įranga)

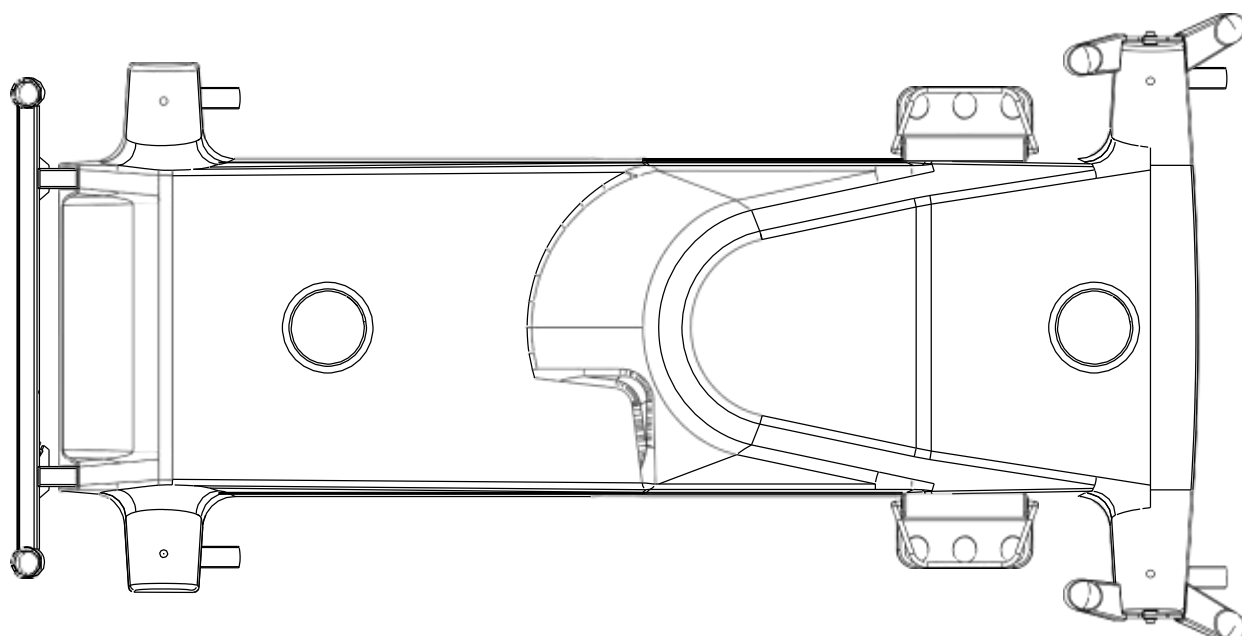

pav.1 dalies važiuklės dangtis (pasirinktinė įranga)

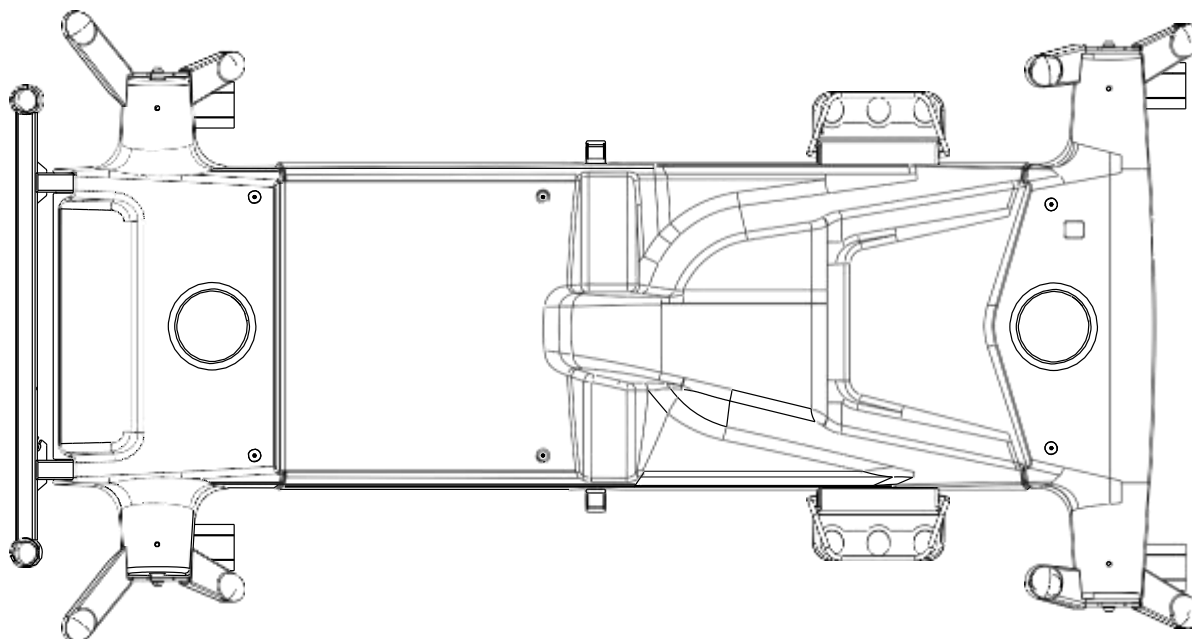

pav.3 dalių važiuklės dangtis (standartinė įranga)

14.13 USB jungtis (pasirinktinė įranga)- punktas 1.28.1; 1.28.2; 1.28.3



ĮSPĖJIMAS!

Netinkamai naudojant kyla pavojus susižaloti!

- Pasirūpinkite, kad į USB jungtį jungiami priedai būtų nepriekaištingos būklės! Lovos naudotojas atsako už tai, kad šis reikalavimas būtų įvykdytas.



ATSARGIAI!

Materialinės žalos pavojus dėl netinkamo naudojimo!

- Nejunkite kaitinimo elemento į USB jungtį! Lovos naudotojas atsako už tai, kad šis reikalavimas būtų įvykdytas.



ATSARGIAI!

Materialinės žalos pavojus dėl netinkamo valymo!


- Į USB prievadą neturi patekti skysčio!

Po USB jungtį yra iš abiejų šonų ties nugaros atrama; ji skirta mobiliems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams įkrauti. -punktas 1.28.2; 1.28.3

PASTABA. Didžiausia srovė šiam įtaisui yra 2 A.



pav.Pav. USB etiketė su elektros įrangos specifikacija

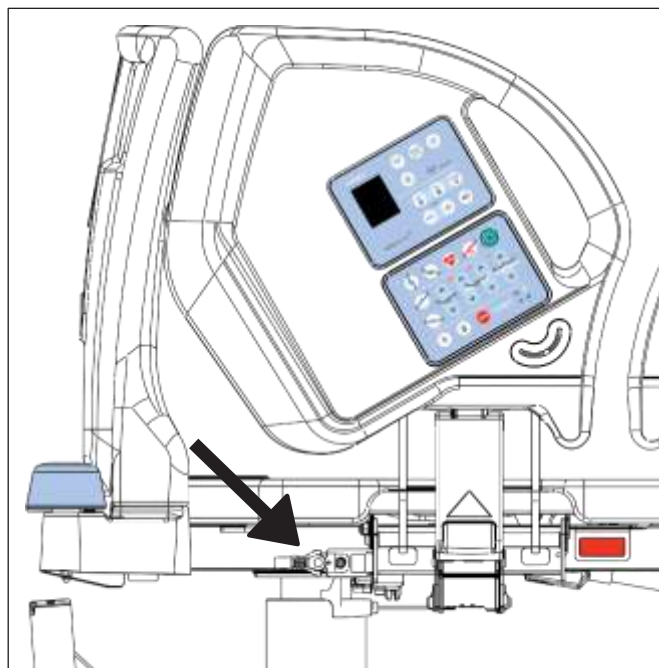

pav.USB jungtis šone ties nugaros atrama

15 Čiužinys

„Eleganza 4“ lova yra suprojektuota naudoti su LINET asortimento čiužiniais.



ATSARGIAI!

Dėl netinkamų čiužinio matmenų jis gali būti nesuderinamas su lova!

► Patikrinkite didžiausius patvirtintus čiužinio matmenis (žr. skyrių „Eleganza 4“ techninė specifikacija“).

Gamintojas rekomenduoja naudoti šiuos čiužinius su „Eleganza 4“ lova:

PASYVIEJI ČIUŽINIAI

- CliniCare 10
- CliniCare 20
- CliniCare 30

AKTYVIEJI ČIUŽINIAI

- CliniCare 100 HF
- Air2Care
- Virtuoso

15.1 Pasyvaus čiužinio montavimas

Ant „Eleganza 4“ lovai skirtų pasyviųjų čiužinių yra įtaisyti diržai su sagtimis (1), kad čiužinį būtų galima pritvirtinti prie atraminės čiužinio platformos.



pav. Pasyviojo čiužinio apačia


15.1.1 Diržai su šoninio atleidimo sagtimis

Norėdami pritvirtinti čiužinį ant atraminės čiužinio platformos:

- Perkiškite tris diržus per tris atitinkamas angas atraminės čiužinio platformos dangčiuose.
- Perveskite šiuos tris diržus po atraminės čiužinio platformos skersiniais.
- Užsekite tris šoninio atleidimo sagtis sujungdami įstatomąją ir gaubiančiąją dalis.

Norėdami nuimti čiužinį nuo atraminės čiužinio platformos:

- Atlaisvinkite tris sagtis suspausdami jas iš abiejų šonų ir atjungdami įstatomąją ir gaubiančiąją dalis.
- Ištraukite šiuos tris diržus iš po atraminės čiužinio platformos.
- Nuimkite čiužinį nuo atraminės čiužinio platformos.

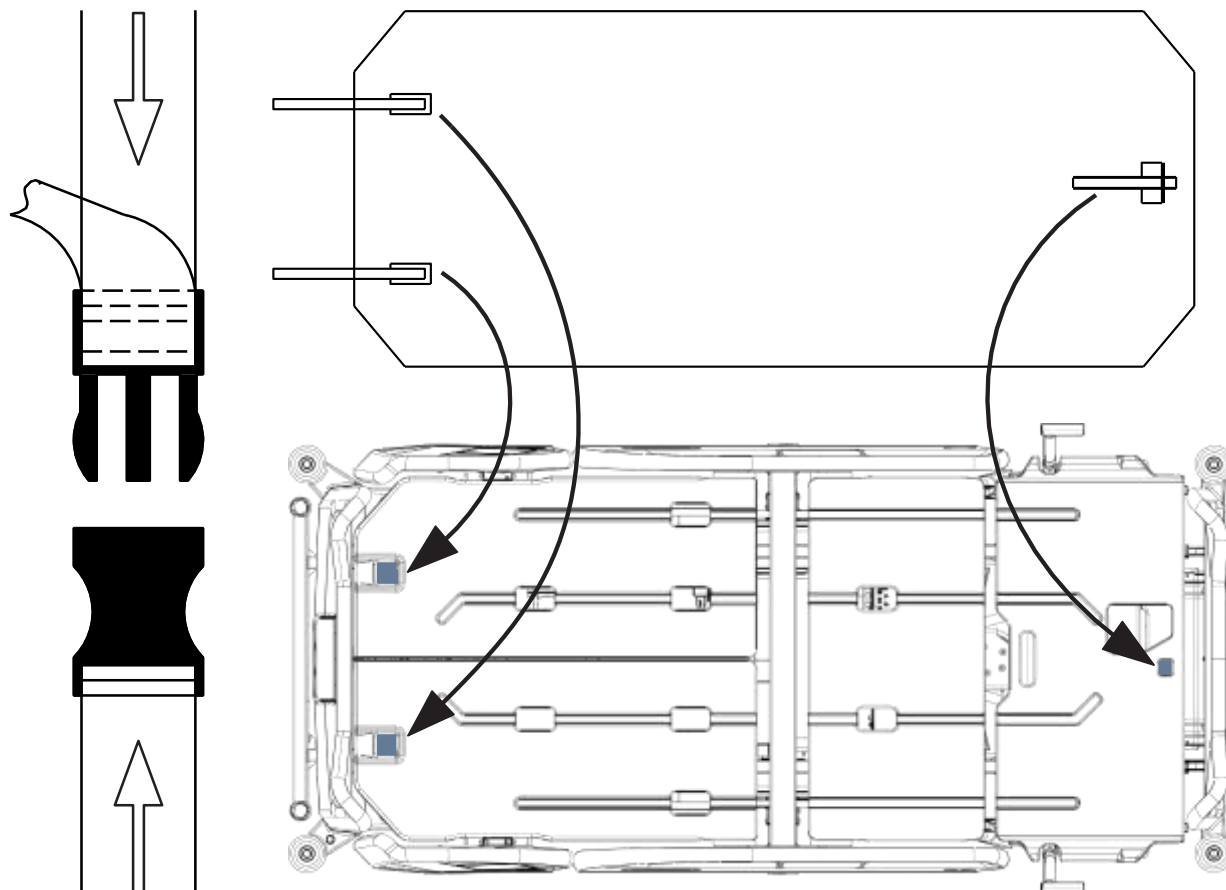

pav. Pasyviojo čiužinio tvirtinimas diržais prie „Eleganza 4“ lovos atraminės čiužinio platformos

15.2 Aktyviojo čiužinio montavimas



ĮSPĖJIMAS!

Rūpestingai laikykitės suderinamo aktyviojo čiužinio naudojimo instrukcijos!



ATSARGIAI!

Netinkamai pritvirtinus suderinamą aktyvųjį čiužinį prie atraminės čiužinio platformos, kyla materialinės žalos pavojus!

- Nustatykite lovą į kraštinę (stačią) kardiologinės pagalbos padėtį ir tik tada užsekite visus pripūsto čiužinio diržus prie atraminės čiužinio platformos!

Montavimo nurodymai:

- Nuimkite kitą čiužinį, jei jis yra ant lovos.
- Prieš dėdami čiužinį ant atraminės čiužinio platformos, pasitikslinkite jo matmenis ir orientavimą.
- Padėkite SVB ant lovos kojūgalio plokštės arba ant grindų.

15.2.1 Diržai su šoninio atleidimo sagtimis

Norėdami pritvirtinti čiužinį ant atraminės čiužinio platformos:

- Pripūskite čiužinį, kurį ketinate tvirtinti prie atraminės čiužinio platformos.
- Nustatykite lovą į kraštinę (stačią) kardiologinės pagalbos padėtį.
- Perkiškite keturis diržus per keturias atitinkamas angas atraminės čiužinio platformos dangčiuose, o du diržus – per priedų laikiklius po blauzdų atramos dangčiu.
- Užsekite visas šoninio atleidimo sagtis sujungdami įstatomąją ir gaubiančiąją dalis.

Norėdami nuimti čiužinį nuo atraminės čiužinio platformos:

- Atlaisvinkite visas sagtis suspausdami jas iš abiejų šonų ir atjungdami įstatomąją ir gaubiančiąją dalis.
- Ištraukite visus diržus iš po atraminės čiužinio platformos.
- Nuimkite čiužinį nuo atraminės čiužinio platformos.