

## Charisma ppF / Adhesive SC

### Naudojimosi instrukcija

Savaime kietėjantis, fluoridą išskiriantis dvikomponentis mokrostiklo kompozitas dantų plombavimui, susidedantis iš bazinės ir katalizatoriaus pastų, taip pat surišimo skysčio. Danties substancija absorbuoja fluoro jonus, kurie sumažina danties emalės tirpumą rūgštyse ir taip sumažina antrinio karieso riziką.

Pastos spalvos:

A10, OA20, A30, B20.

Sudėtis

Produktas sukurtas akrilato pagrindu.

Charisma ppF sudėtyje užpildų yra 68 % viso svorio,

Ba-AL-F silikatinis stiklas ( 0,02 - 2µm),

Aukštos idispersijos silicio dioksidas (0,02 – 0,07µm).

Adhesive SC sudėtyje užpildų yra 23 % viso svorio.

Panaudojimas

- I ir II klasių plombavimas pagal Black, jei ertmės ribojasi su emale.
- III, IV ir V klasių plombavimas.
- Traumuotų ir įskilusių dantų fiksavimas.
- Vainiko atstatymas.

Šalutinis poveikis

Kai ertmės gilios ir nėra padėto pamušalo, gali atsirasti pulpos dirginimas.

Sąveika su kitais vaistais

Charisma ppF kombinacijoje su eugenolio turinčiais preparatais (pvz. eugenolio turinčios pamušalų medžiagos) gali atsirasti kontraindikacijų (eugenolis pakenkia polimerizacijai).

Klinikinis panaudojimas

Iš pradžių išvalykite dantį poliravimo pasta. Ertmės preparavimui ir pažeisto dantino padengimui galioja bendros kompozitinio plombavimo terapijos taisyklės. Kai ertmės yra gilios, pulpai artimą dantiną po pirminio padengimo kalcio hidroksido preparatu apsaugoti stiklo jonomerinio cemento pamušalu. Prieš dėdami medžiagą, užsidėkite koferdamą.

Panaudojimas kaip plombavimo medžiagos

1. Po preparavimo ir pamušalo įdėjimo išvalykite ir išdžiovinkite ertmę.
2. Uždėkite Esticid Gel ant emalės sienelių ir palikite 30-60 sekundžių.
3. Ėsdinimo gelį rūpestingai nuskalaukite.
4. Ertmę gerai nundžiovinkite alyvos neturinčiu oru. Išėsdintos vietos negali būti užterštos.
5. Adhesive SC bazinę ir katalizatoriaus skystį sumaišykite santykiu 1:1 .

Maišymo laikas : 10 sekundžių

Darbo laikas : 70 – 90 sekundžių

Kietėjimo laikas : 80-120 sekundžių

6. Sumaišytą Adhesive SC uždėkite tolygiai ir leiskite sukietėti.
7. Charisma ppF sumaišykite santykiu 1 : 1. Pastas maišykite intensyviai, paspausdami. Norėdami išvengti pašalinio užteršimo vainikėlyje, bazinės ir katalizatoriaus pastos dozes paimkite skirtingomis mentelės pusėmis. Maišydami venkite oro puslių.

Maišymo laikas : 30-45 sekundžių

Darbo laikas : 2,5 – 2,75 min.

Kietėjimo laikas : 2,5 – 2,75 min.

8. Uždėkite Charisma ppF ir leiskite sukietėti. Rekomenduojama naudoti matricą, po sukietėjimo ją nuimkite.
9. Tolimesnis darbas tęsiamas iš karto po pilno Charisma ppF sukietėjimo. Stambesniai apdirbimui naudokite deimantinius borus, kurių grūdelių dydis apie 20  $\mu\text{m}$ ., švelniai apdirbimui ir poliravimui naudokite silikoninius polyrus, švelnius šlifavimo diskelius, užbaigimo juosteles.

#### Apsaugos nurodymai

Venkite kontakto su oda ir akimis. Jei įvyko kontaktas su medžiaga, gausiai skalaukite vandeniu ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

Charisma ppF sudėtyje yra polimerizuojamų monomerų (akrilatai), kurie jautriems pacientams gali sukelti odos dirglumą. Produkto akrilato pagrindu venkite atsiradus panašioms dirglumo požymiams arba esant žinomoms alergijoms.

#### Laikymo nurodymai

Pasibaigus galiojimo terminui, medžiagos nenaudokite. Pakuotę po panaudojimo tuoj pat uždarykite. Pakuotes laikykite šaldytuve. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

#### Įpakavimo formos

##### Rinkinys:

po 12 gr Charisma ppF bazinės ir katalizatoriaus pastų,  
po 3 ml Adhesive SC bazinės ir katalizatoriaus skysčių,  
2,5 ml Esticid Gel,  
priedai.