

REF 11662970 122

6 x 380 mL

## Lithuanian

## Paskirtis

Sistemos tirpalas, skirtas valyti imunologinių analizatorių Elecsys 2010 ir **cobas e 411** aptikimo įrenginį.

CleanCell naudojamas kartu su Elecsys tyrimo reagentais.

CleanCell gali būti naudojamas su visomis reagentų partijomis.

## Santrauka

CleanCell naudojamas atliekant toliau nurodytas užduotis:

- Mėgintuvėlių sistemos ir matavimo kameros valymas po kiekvieno matavimo
- Elektrodų kondicionavimui

## Reagentai – darbiniai tirpalai

6 x 380 mL matavimo kameros valymo tirpalas

KOH 176 mmol/L (atitinka pH 13.2); detergentas ≤ 1 %.

## Atsargumo priemonės ir įspėjimai

Skirtas naudoti in vitro diagnostikai.

Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratoriniais reagentais.

Visos atliekos turi būti tvarkomos laikantis vietos reikalavimų.

Saugos duomenų lapas pateikiamas profesionaliems naudotojams paprašius.

Šiame rinkinyje yra komponentų, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 67/548/EEB ir 99/45/EEB skirstomi į šias klases:

CleanCell:

C - KOROZINIS, R 35, S 26, S 36/37/39, S 45 (KOH)

Galima smarkiai nudegti. Patekus į akis nedelsiant skalaukite

akis dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į medikus. Dėvėkite

tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių/veido apsaugą.

Nelaimingų atsitikimų atveju arba jei pasijutote blogai, nedelsiant

kreipkitės į medikus (jei įmanoma, parodykite gaminio etiketę).

Kontaktinis telefonas: visos šalys: +49-621-7590, JAV: +1;-800-428-2336.

Dirbdami su visų rūšių reagentais ir mėginiais (mėginiais, kalibratoriais

ir kontrolinėmis medžiagomis) venkite putų susidarymo.

## Reagentų paruošimas

Turinys yra paruoštas naudojimui. **Venkite putų susidarymo.**

## Laikymo sąlygos ir stabilumas

Laikyti 15-25 °C temperatūroje.

Stabilumas:

neatidarius, 15-25 °C temperatūroje: iki nurodytos galiojimo datos

analizatoriuose, atidarius: iš viso 72 valandas (3 dienas)

analizatoriuose, kai laikomi atidaryti ir uždaryti: 4 savaitės (ne

ilgiau negu 72 valandas atidarius)

## Pateiktos medžiagos

- CleanCell

## Reikalingos (bet nepateikiamos) medžiagos

- Elecsys 2010 arba **cobas e 411** imunologiniai analizatoriai. Apie papildomai reikalingas medžiagas skaitykite atitinkamame naudotojo vadove.

## Tyrimas

Prieš naudojimą palaikykite buteliukus analizatoriuje, atitinkamoje pozicijoje, ne trumpiau kaip 1 valandą. Atidarykite dangtelį. Jeigu analizatorius nenaudojamas ilgiau kaip 3 valandas, buteliukus reikia uždaryti (kad išvengtumėte garavimo poveikio).

Atkreipkite dėmesį: šie simboliai yra naudojami Roche laboratorinių sistemų ženklavimui.



Naudoti iki



Partijos kodas



Rinkinio turinys



Gamintojas



In vitro diagnostikos medicinos priemonė



Temperatūros ribojimas (Laikyti)



Šis produktas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/79 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus.



Korozinis



Kataloginis numeris



Žiūrėti naudojimo taisykles

Išsamesnės informacijos rasite reikiamo analizatoriaus naudotojo vadove arba atitinkamo tyrimo produkto informacijoje.

Reikšmingi papildymai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėje.  
© 2011, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim  
www.roche.com

