

Testas baltymų likučių nustatymui ant instrumentų ir paviršių



Funkcija:

- Baltymų likučių nustatymas per 5 minutes
- Paruoštas naudoti testas
- Spalvos pasikeitimas į mėlyną parodo baltymų likučių buvimą
- Dažus surišantis metodas, leidžiantis nustatyti baltymų likučius iki 1 µg be inkubavimo
- Nėra sąveikos su gliutaraldehidu ar peracto rūgštimi

Naudojimas:

Pyromol-Test remiasi dažų surišimo metodu, kuris yra naudojamos ir klinikinėje biochemijoje baltymui nustatyti.

Kraujyje yra didelis kiekis baltymų, kurių pėdsakus galima aptikti šio testo pagalba.

Tamponėliu rušluostykite tiriamą plotą, įmeskite jį į testo buteliuką ir po 5 minučių įvertinkite rezultatą.

Vertinimas:

Mėlyna dėmė ant tamponėlio reiškia, kad ant tiriamojo paviršiaus yra baltymų likučių.

Pastaba: užteršti instrumentai kelia infekcijos pavojų ir turi būti nenaudojami. Ant instrumentų neturi būti jokių medžiagų likučių!

MAKE IT VISIBLE!

Laikymo sąlygos:

- Laikykite apsauginiame maišelyje +2- +25 °C temperatūroje.
- Saugokite nuo šviesos ir karščio
- Galiojimo laikas 12 mėnesių.

Gamintojas:
Pereg GmbH, Vokietija



Ilgaliotas išskirtinis atstovas Lietuvoje:

"SANOVUS", UAB
Daugėlišio g. 32-301, LT-09300 Vilnius, Lietuva
Tel.: 8 5 2450 415, faksas: 8 5 2706 201
El. p. adresas: info@sanovus.lt

Naudojimo instrukcijos

Produkto pavadinimas / Prekinis pavadinimas

Pyromol-Test

Produkto aprašymas / Numatytas tikslas

Prietaisai Pyromol-Test naudojami baltymų likučiams ant chirurginių instrumentų ir paviršių aptikti. Prietaisus naudoja medicinos specialistai ir apmokyti CSSD darbuotojai CSSD ligoninių ir medicinos praktikos skyriuose.

Naudojimo instrukcijos



1. Drėgni paviršiai tamponuojami sausu medvilniniu tamponu. Sausi paviršiai tamponuojami sudrėkinus tamponą švaraus vandens lašeliu.
2. Tamponu kruopščiai nuvalykite mėginį. Sutelkite dėmesį į vietą, kurioje įtariamas likutis (jungtys, plyšiai, matomos dėmės ar spalvos pakitimas). Naudokite ilgesnius tamponus tuščiaviduriams instrumentams.
3. Įmeskite tamponą į buteliuką, uždarykite ir palikite pastovėti 5 minutes. Patikrinkite, ar tampono spalva nepasikeitė į mėlynai žalią, rodančią baltymų likučius ant tiriamo paviršiaus. Jei yra baltymų likučių, spalva gali pasikeisti po 1 minutės. Ilgesnis laukimo laikas suteiks aiškesnį rezultatą ir stipresnę spalvą.
4. Užrašykite rezultatą kokybės užtikrinimui. 1 µg baltymų likučių ant tampono atsiras maža mėlynai žalia dėmė. Didelis tirpių baltymų kiekis gali paversti visą bandomąjį tirpalą mėlynai žaliu.

PASTABA: lanksčių chirurginių instrumentų atveju kraujo likučiai dažniausiai būna jungčių viduje, kur jų negalima paimti tamponu. Šiuo tikslu dezinfekuojančio plautuvo valymo efektyvumui patikrinti turėtų būti naudojami TOSI indikatoriai.

Veikimo charakteristikos

Testo rinkinys gali aptikti 1 µg baltymų. Baltymų likučiams aptikti naudojamas dažų surišimo metodas.

Įrangos gedimo / veikimo pasikeitimų atveju

Saugūs tik visiškai švarūs instrumentai. Pyromol-Test parodytas likutis rodo neefektyvų valymo procesą.

Atsargumo priemonės:

- Pakuotę atidarykite atsargiai ir su testu elkitės atsakingai.
- Nevalgykite ir negerkite darbo metu. Nerūkykite. Laikykite testą atokiau nuo maisto.
- Venkite sąlyčio su oda ir akimis.
- Saugokite nuo šviesos, karščio ir cheminių medžiagų.
- Naudokite akių apsaugą (akinius, saugančius nuo purslų).
- Dėvėkite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
- Garų ar aerozolio atveju naudokite kvėpavimo takų apsaugas.
- Nenaudokite pakartotinai.
- Naudoti tik pagal paskirtį.
- Prieš interpretuodami rezultatus, atidžiai perskaitykite instrukcijas.

Saugūs deriniai su įrenginiais / įranga

Naudokite tik tamponus, tiekiamus su Pyromol-Test.

Derinių apribojimai

Kontaktas su šarminėmis medžiagomis gali duoti klaidingai teigiamą rezultatą. Ketvirtinės amonio druskos (naudojamos kai kuriose dezinfekavimo priemonėse) duos klaidingai teigiamą rezultatą. Pirštų atspauduose gali būti baltymų dalelių ir jie gali duoti klaidingai teigiamą rezultatą.

Kiekvieną bandymo rinkinį sudaro:

- 20 vienkartinio naudojimo testų baltymų likučiams ant prietaisų ir paviršių aptikti.
- O Pyromol-Test buteliukas
- O Tamponas

Speciali laikymo ir/ar tvarkymo būklė

- Laikykite nuo +2°C iki +25°C
- Laikykite uždaroje originalioje pakuotėje.
- Laikykite apsaugotą nuo šviesos, karščio ir cheminių medžiagų.

Šalutinis poveikis:

Apie visus su prietaiso naudojimu susijusius sunkius atvejus turi būti pranešta gamintojui ir šalies narės, kurioje jūs esate, atsakingai institucijai.

Saugus prietaiso šalinimas

Išmeskite Pyromol-Test pagal galiojančius vietinius reglamentus.

Naudojimo instrukcijos versija ir išleidimo

Versija: 2.0 Data: 22.07.2025



Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Vokietija

67070-20