

RINN XCP-ORA®

POZICIONAVIMO SISTEMA

Pilnas rinkinys su sąkandžiu, skirtas
RVG 5100/ 6100/ 6500 jutikliams

Priekiniams ir galiniams
dantims

Sąkandžiui



Geltonas: galiniams

Raudonas:
sąkandžiui

Mėlynas: Priekiniams


DENTSPLY
RINN

VERTIKALUS/ Priekiniams dantims

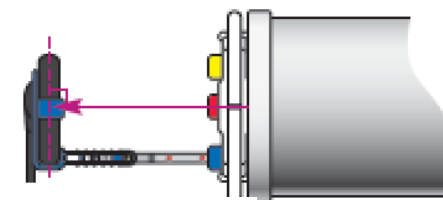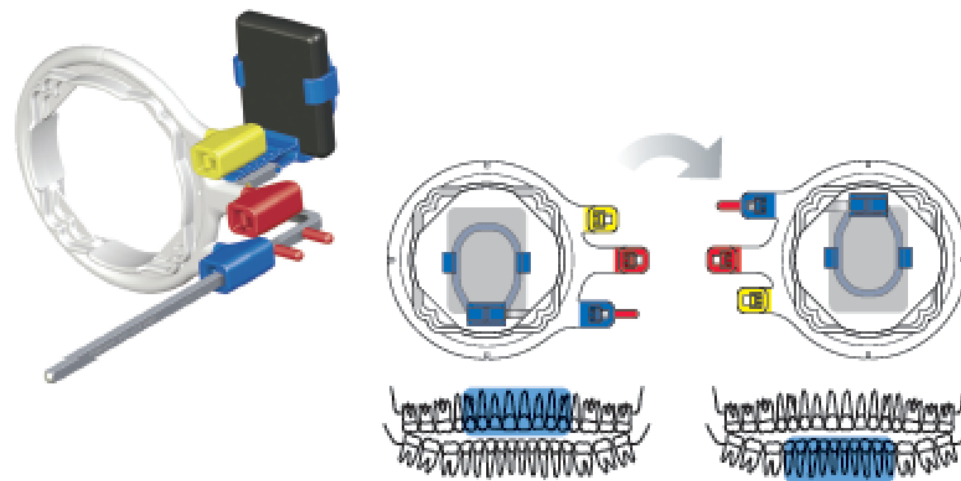


Įprastas lygiavimas

PASTABA: priklausomai nuo gomurio,
paciento patogumui sukandimo laikiklis
gali būti palenkiamas. Tokiu atveju
rentgeno vamzdį lygiuokite su vertikaliu
laikikliu 5-10° kampu.

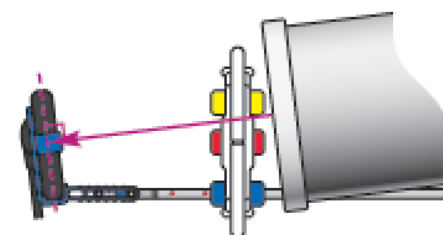


Lygiavimas, pritaikytas sukandimo
palenkimui

HORIZONTALUS/ Galiniamas dantims

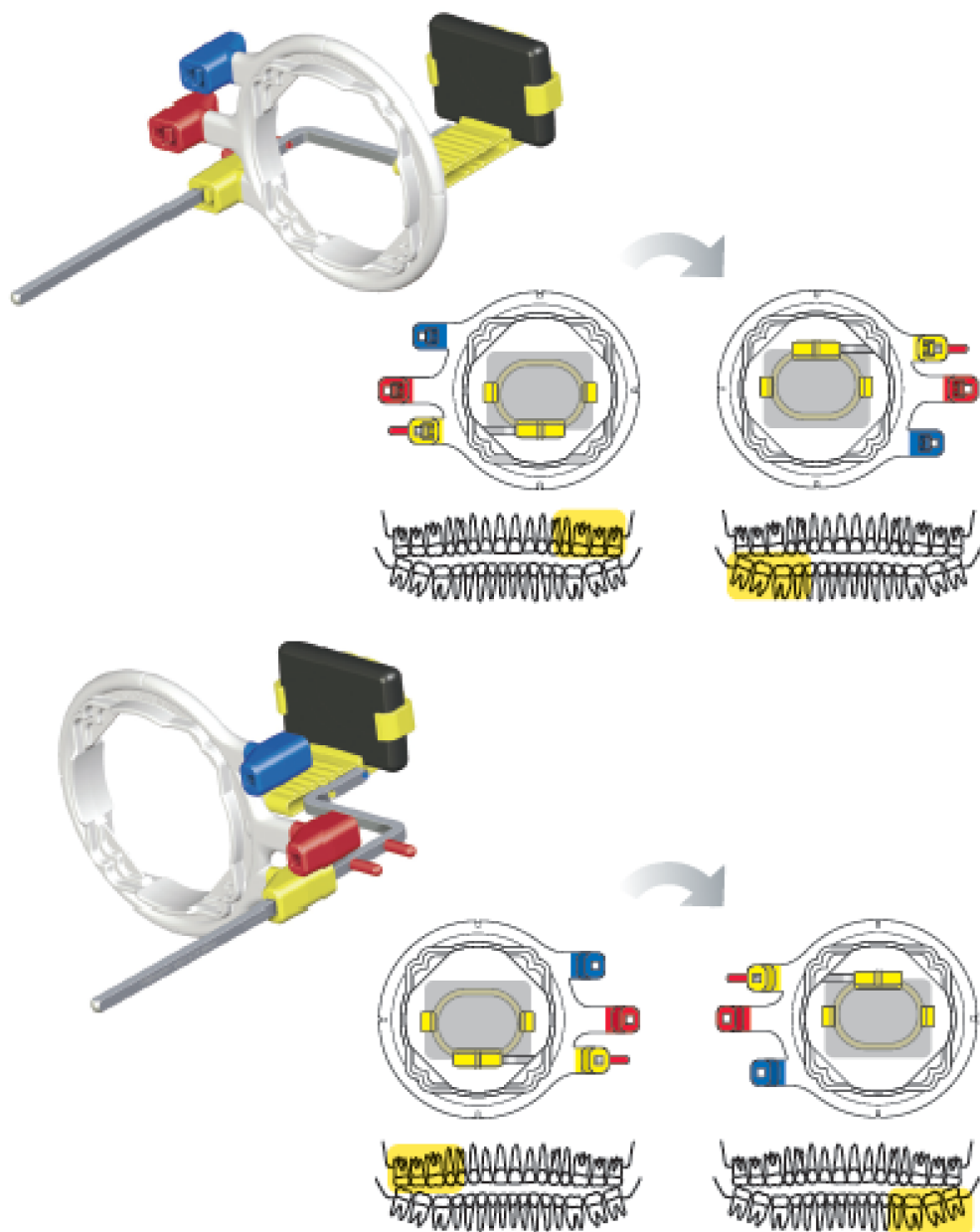

SAKANDŽIUI

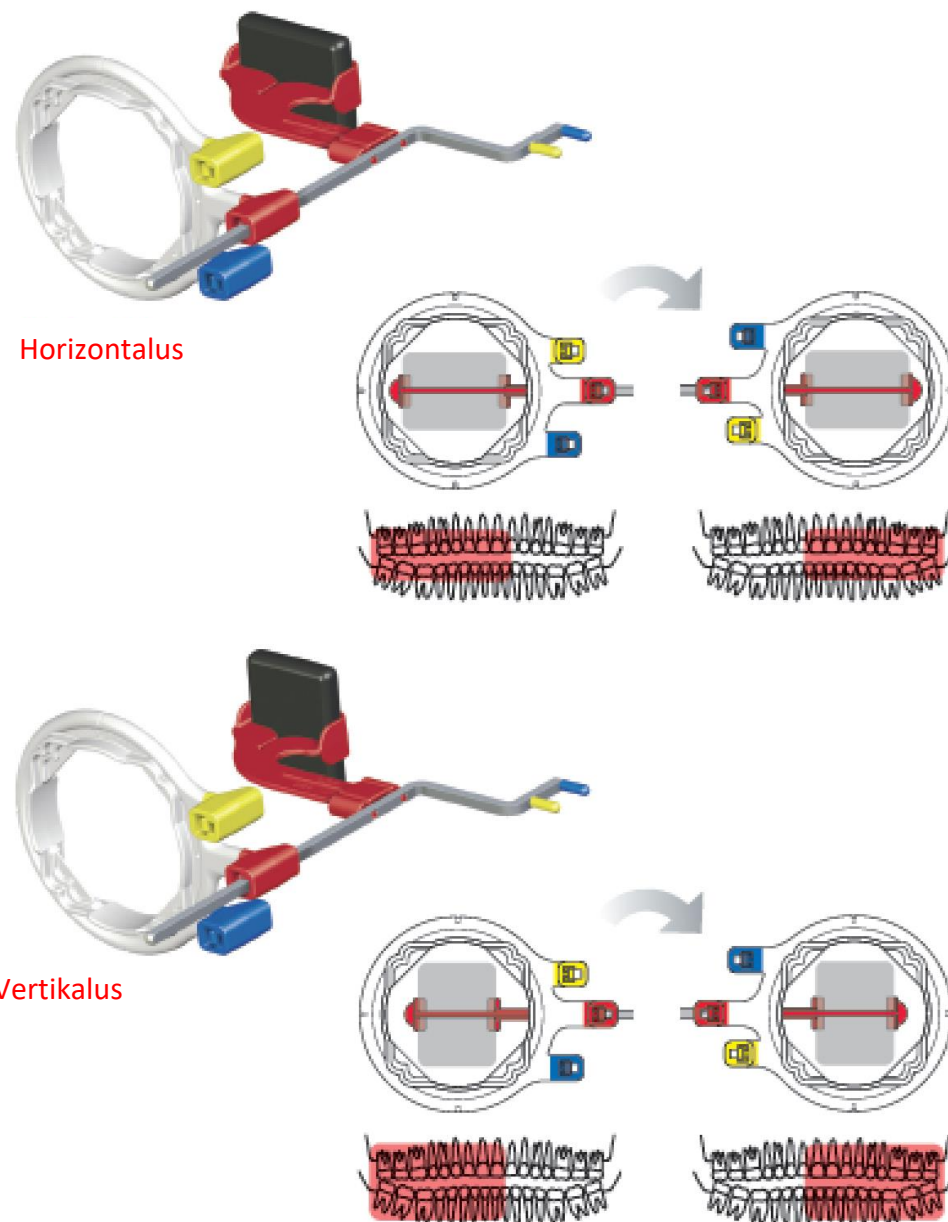

Lietuvių

Įspėjimas: U.S. Federaliniai įstatymai riboja šio įrenginio pardavimą ne licenzijuotiems odontologijos specialistams.

Naudojimas: XCP-DS skirti skaitmeniniams jutikliams, naudojimui su intraoraliniu rentgeno aparatu. XCP-ORA žiedas bei laikiklis skirti pozicionuoti bei lygiuoti intraoralinį rentgeno aparatą.

Kontraindikacijos: Nėra žinoma.

Perspėjimai: Prieš naudodami **sterilizuokite**. Alternatyvių sterilizacijos ar dezinfekcijos metodų užtikrinimas yra naudotojo atsakomybė. Dėl neteisingos sterilizacijos galima kryžminis užteršimas.

Atsargumo priemonės: Atidžiai sekite sterilizacijos instrukcijas, kad sterilizacijos metu nepažeistumėte plastiko dalių.

Nepageidaujama reakcija: Nėra žinoma.

Detali instrukcija:

1. Įdėkite pozicionavimo strypą į žiede atitinkama spalva pažymėtą kanalą.
2. Įdėkite laikiklį, atsižvelgdami į nuotraukos atlikimo sritį. Teisingai sujunkite, nuotraukos darymo vieta turėtų būti centruota (žiūrint pro laikiklį).
3. Pozicionuokite laikiklį paciento burnoje bei prislinkite žiedą prie paciento veido.
4. Sulygiuokite rentgeno vamzdį.
5. Atlikite ekspoziciją.
6. Atlikite 1-5 žingsnius norėdami atlikti kitos srities nuotrauką.

Valymo ir sterilizacijos instrukcijos:

1. Išrinkite laikiklių sistemą: atkirkite laikiklį, žiedą ir strypą norėdami autoklavuoti gerai.
2. Nuvalykite nešvarumus su karštu vandeniu ir muilu.
3. Įdėkite visus laikiklių komponentus į sterilizavimo maišelius ir įdėkite į vidurinį autoklavo dėklą, toliau nuo autoklavo sienelių ir kaitinimo elemento. Plastikinės dalys turėtų būti atskirtos nuo metalinių, taip apsaugant jas nuo galimo lydymosi ar deformavimo.
4. Pasirinkite autoklavo ciklą 270°F (132 °C) 10 minučių, slėgis 30 PSI (206,8 kPa). Neviršykite 273°F (134 °C) temperatūros.
5. Norėdami išlaikyti laikiklius sterilius, laikykite juos maišeliuose iki sekančio panaudojimo.

Laikymas: laikykite kambario temperatūroje (18-25°C/ 65-77°F).

**Visuomet
naudokite
vienkartinius
jutiklių
maišelius**



Surinkimas

