




13 dalis

Ki  eninis imtuvas VP15

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Nr. 8

Specialiai sukurta kurtiesiems ir asmenims su klausos negalia.

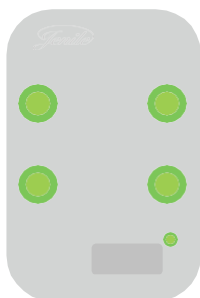

Vertimas geras



Visi šioje pakuotėje
esantys produktai jau yra
tarpusavyje sujungti.


Turiny s :

- 4 :** Pakuotės turinys
- 5-10 :** Kišeninis imtuvas VP15

Pakuotės turinys



A

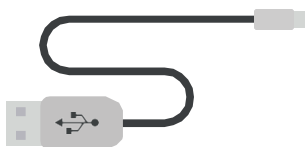

B




C

Nr. 7

- A - Nešiojamas imtuvas
- B - USB laidas
- C - Naudojimo instrukcija

Kišeninis imtuvas VP15

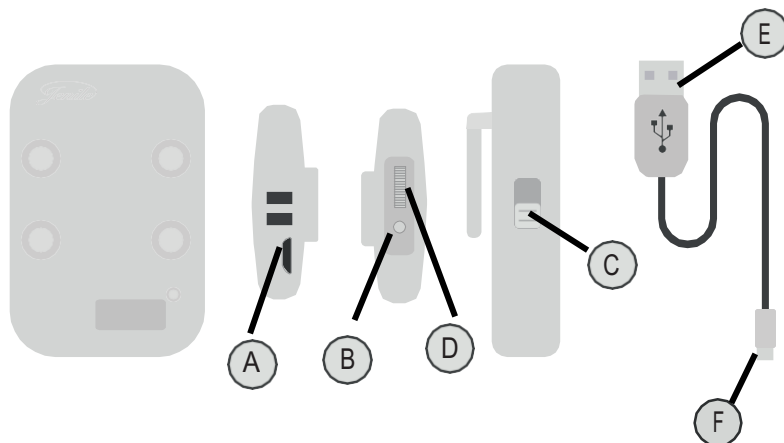

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (A) - Mikro USB jungtis | (D) - Vibracijos intensyvumo reguliatorius |
| (B) - Ryšio (sujungimo) mygtukas | (E) - USB jungtis |
| (C) - Įjungimo / Išjungimo mygtukas | (F) - Mikro USB jungtis |

Techninė specifikacija

Nr.2 Bevielis

Pakraunama baterija

Kišeninio imtuvo svoris : 60g

Nr. 5 Atstumas tarp siųstuvų ir imtuvo: 200 metrų atviroje erdvėje

Nr. 7 Maitinimas : 3.7V 2200mAh ličio baterija

Krovimo įtampa: 4.2V

Budėjimas: <4,5mA

Veikimas : <800mA Radio

Radijo dažnis : 433Mhz


Iššifravimo formatas : MCU

Nr. 6 Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis) : 6x8x1,3cm


Veikimo laikas: 1 mėnuo (priklausomai nuo naudojimo intensyvumo)

Naudojimas


- Nr.2** Kišeninis imtuvas gali priimti signalą iš įvairių Jenile siųstuvų (durų skambutis, dūmų detektorius ir kt.). Apie gautą signalą pranešama 4 vibracijos ritmais ir 4 spalvomis, kurie leidžia atskirti signalą perdavusio siųstuvo tipą.
- Nr.6**

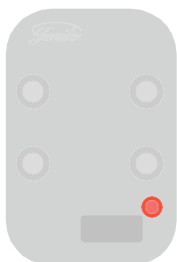

Raudona šviesa : baterija išsikrauna, pakraukite ją

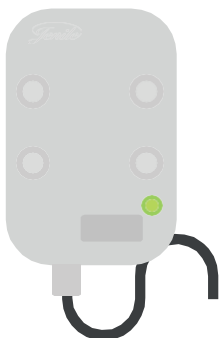

Žalia šviesa : baterija kraunasi

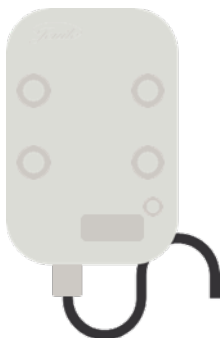


Nėra šviesos: baterija pakrauta

Įspėjimas : Šviesa gali nedegti ir tuo atveju, kai baterija yra visiškai išsikrovusi. Tuomet yra būtina ją pakrauti.


Testavimas

Atlikti kišeninio imtuvo testavimą yra labai paprasta. Jeigu imtuvas neveikia taip, kaip nurodyta toliau, susisiekitė su pardavėju.

Norėdami patikrinti, ar imtuvas veikia, paspauskite durų skambutį ar dūmų detektoriaus testavimo mygtuką ar kito siųstuvo aktyvavimo / testavimo mygtuką.

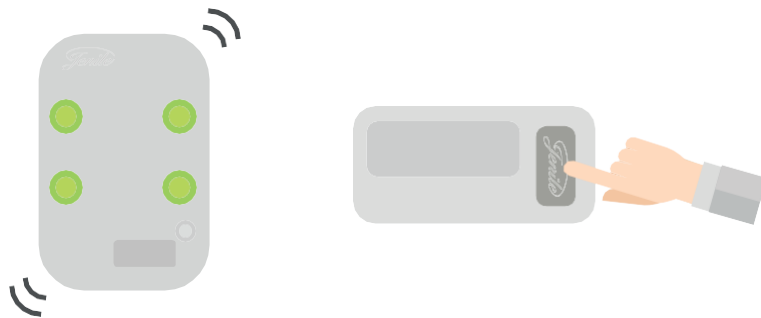


Jeigu imtuvas pradeda šviesti, bet nėra vibracijos, naudodami vibracijos reguliatorių (D), pabandykite nustatyti kitokį vibracijos lygį.

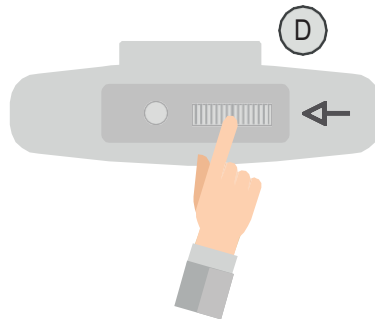



Jeigu imtuvas nepradeda šviesti, patikrinkite, ar baterija nėra išsikrovusi. Prijungus maitinimo (USB) laidą, imtuvo apatinės dalies dešinėje pusėje esantis šviesos indikatorius praneša apie baterijos pakrovimo lygį (žr. 6 psl.).

Nustatymai


Norėdami sujungti imtuvą su naujais Jenile produktais (šioje pakuotėje esantys prietaisai jau yra sujungti!), vadovaukitės žemiau pateikta instrukcija:

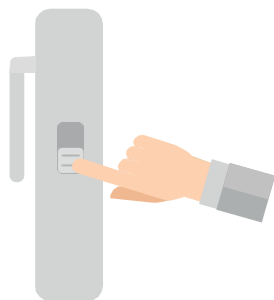


1. Įjunkite imtuvą (padėtis "ON").

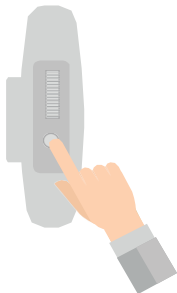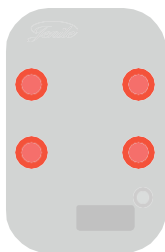

2. Paspauskite ryšio (sujungimo) mygtuką (C), kol imtuvas pradės šviesti raudonai (ISPĖJIMAS: nelaikykite paspaudę mygtuko imtuvui pradėjus šviesti, nes atjungsite imtuvą nuo visų anksčiau sujungtų prietaisų).

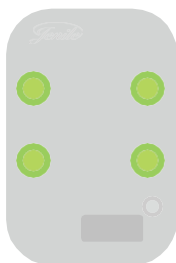


3. Kol imtuvas šviečia raudonai, aktyvuokite siųstuvą (paspauskite durų skambutį, dūmų detektoriaus testavimo mygtuką ar kito prietaiso aktyvavimo / testavimo mygtuką ar pan.).

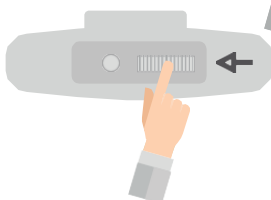


4. Sujungus imtuvą su prietaisu, nustatykite norimą vibracijos lygį.


3 galimybės:

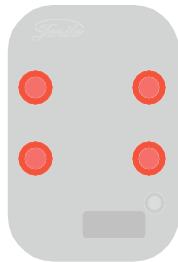

Įmtuvas šviečia raudonai, bet nevibruoja: sujungimas nepavyko, pabandykite dar kartą, vadovaudamiesi šią instrukcija.

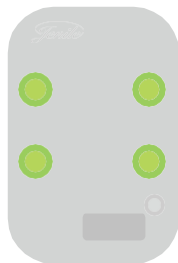

Įmtuvas šviečia visomis spalvomis: sujungimas pavyko.

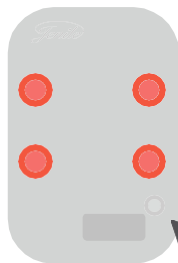


3 times

Įmtuvas sumirksi raudonai 3 kartus, bet nešviečia aktyvavus siųstuvą: sujungimas nepavyko, nes per ilgai spaudėte ryšio (sujungimo) mygtuką. Įmtuvas yra atjungtas nuo visų prietaisų, juos reikia sujungti iš naujo.

Įspėjamieji signalai ir spalvos


Nešiojamas imtuvas VP15 gali būti naudojamas su visais Jenile siųstuvais.

Gavus įspėjamąjį signalą, imtuvas mirksės ir vibruos tuo pačiu metu. Imtuvo sklaidžiamos šviesos spalva ir vibracijos ritmas indikuoja signalo tipą:

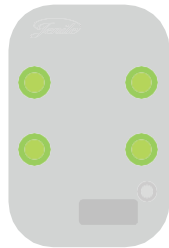


ŽALIA ir vidutinė vibracija (du kartai, 5 pakartojimai) : Skambučiai

- Durų skambučiai
- Video skambučiai
- Vartų video
- ...

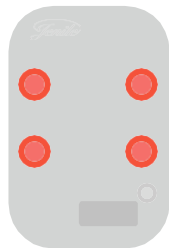


RAUDONA ir greita vibracija (3 kartai, 4 pakartojimai): Pavojaus signalai

- Dūmų detektorius
- Dujų detektorius,
- Vandens nuotekio detektorius
- ...

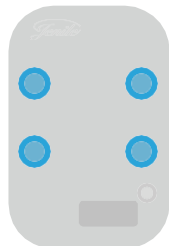

MĖLYNA ir lėta vibracija (1 kartas, 5 pakartojimai): Skambučiai

- Teksto žinutės
- Telefonas, faksas
- ...

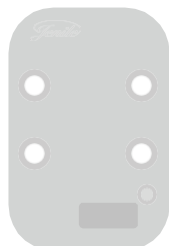

BALTA ir labai greita vibracija (4 kartai, 4 pakartojimai)

- Atidarytų durų/lango detektorius
- Judesio detektorius
- ...



www.jenile.com



Vertimas geras
M. K  rp  jien  