



05979943001V2.0

# Internal Standard Insert - ISE

cobas®

## Užsakymo informacija

| REF          | CONTENT   | Analizatorius (-iai), su kuriuo (-iais) galima naudoti reagentus |
|--------------|---|--|
| 05979854 190 | Internal Standard Insert - ISE (rinkinys iš 20) | Roche/Hitachi <b>cobas c 311</b> , <b>cobas c 501</b>            |

## Lietuvių

### Paskirtis

Internal Standard Insert - ISE yra skirtas naudoti kartu su Internal Standard Gen.2 buteliuku. Įdedamasis vamzdelis padeda išvengti Internal Standard garavimo. Jį naudoti rekomenduojama esant galimam ar patvirtintam Internal Standard garavimui.

### Santrauka

Internal Standard Insert yra plastikinis vamzdelis, kuris įsideda į Internal Standard Gen.2 buteliuką.

### Atsargumo priemonės ir įspėjimai

Skirtas naudoti in vitro diagnostikai.

Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Visos atliekos turi būti tvarkomos laikantis vietos reikalavimų.

### Laikymo sąlygos ir stabilumas

Internal Standard Insert neturi galiojimo datos. Nelaikykite Internal Standard Insert tiesioginiuose saulės spinduliuose. Laikykite kambario temperatūroje.

### Pateiktos medžiagos

Skaitykite skyriuje „Užsakymo informacija“

### Reikalingos (bet nepateikiamos) medžiagos


ISE Internal Standard Gen.2 (5 x 600 mL), kat. nr. 04522320190.

### Paruošimas

Įdedamąjį vamzdelį naudokite vadovaudamiesi žemiau nurodytais žingsniais.

#### 1 žingsnis

Naudokite **naują** vamzdelį kiekvienam buteliukui. Įdėkite vamzdelį taip, kaip parodyta paveikslėlyje ir lėtai stumkite į buteliuką. **Atkreipkite dėmesį:** Kad išvengtumėte Internal Standard išsiliejimo, stumdami žemyn neuždenkite vamzdelio angos.

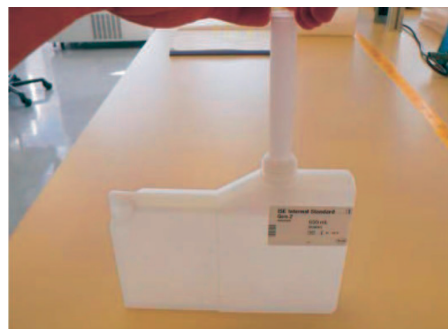

#### 2 žingsnis

Įsitikinkite, kad vamzdelis įstumtas į buteliuką, kiek įmanoma.




#### 3.1 žingsnis (cobas c 501 analizatoriui)

Patalpinkite buteliuką su vamzdeliu į jo vietą. Stumkite buteliuką į dešinę kiek įmanoma, pilnai iki sustojimo.



Neteisingas patalpinimas

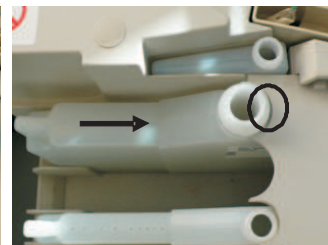

Teisingas patalpinimas

3.2 žingsnis (skirta **cobas c 311** analizatoriui)



#### 4 žingsnis

Kai buteliukas jau yra analizatoriuje, patikrinkite, kad vamzdelis yra teisingoje padėtyje.



Neteisingas patalpinimas



Teisingas patalpinimas

#### 5 žingsnis

Jeigu ketinate naudoti 2 buteliuką **cobas c 501** sistemose, Laikykitės tų pačių vamzdelio naudojimo instrukcijų.

**Pastaba:** Naudokite naują Internal Standard Insert kiekvienam Internal Standard Gen.2 buteliukui.

Šiuose informaciniuose lapeliuose kaip dešimtainės trupmenos skyriklis visada naudojamas taškas, skiriantis sveikąjį skaičių nuo dešimtainės trupmenos skaitmenų. Tūkstančių skyrikliai nenaudojami.

### Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardintų standarte ISO 15223-1.

CONTENT

Rinkinio turinys



Tūris po atskiedimo arba maišymo

GTIN

Visuotinis prekybos identifikacijos numeris (angl. Global Trade Item Number)

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėte.

© 2016, Roche Diagnostics



# Internal Standard Insert - ISE

cobas®



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim  
[www.roche.com](http://www.roche.com)



JAV platina:

Roche Diagnostics, Indianapolis, IN

JAV vartotojų techninė pagalba 1-800-428-2336

