

Multiclean / Sample Cleaner 1

cobas®

Užsakymo informacija

REF	CONTENT	Analizatorius (-iai), su kuriuo (-iais) galima naudoti rinkinį (-ius)
04880277 190	Multiclean (2 x 2 L)	Roche/Hitachi cobas c
04708725 190	Sample Cleaner 1 (SmpCln1) (12 x 59 mL)	Roche/Hitachi cobas c 311/501
05352991 190	Sample Cleaner 1 (SmpCln1) (12 x 20 mL)	Roche/Hitachi cobas c 502/701/702 Roche/Hitachi cobas c 513*

*neskirta JAV

Lietuvių

Paskirtis

Plovimo tirpalas, skirtas mėginių adatų plovimui Roche/Hitachi **cobas c** sistemose.

Santrauka

Mėginių adatų plovimas gali būti reikalingas dėl galimos sąveikos su kitais mėginiais. Šie specialūs plovikliai užtikrina mėginių veikimo patikimumą.

Reagentai - darbiniai tirpalai

Natrio hidroksido tirpalas 1 mol/L

Atsargumo priemonės ir įspėjimai

Skirta naudoti in vitro diagnostikai.

Laikykites įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Visos atliekos turi būti tvarkomos laikantis vietos reikalavimų. Saugos duomenų lapas pateikiamas profesionaliems naudotojams paprašius.

Skirta JAV: Tik specialiam naudojimui.

Šiame rinkinyje yra komponentų, kurie pagal reglamentą (EB) Nr. 2008/1272 skirstomi į šias klases:



Pavojus

H290 Gali esdinti metalus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Prevencija:

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Veiksmai, kurių reikia imtis:

P301 + P330 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
+ P331

P303 + P361 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
+ P353

P304 + P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
+ P310

P305 + P351 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
+ P338
+ P310

P390 Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Produktų saugumo žymėjimas parengtas vadovaujantis ES GHS gairėmis.

Kontaktinis telefono numeris: visos šalys: +49-621-7590, JAV: 1-800-428-2336

Reagentų paruošimas

Paruoštas naudojimui

Pastaba

Bėgant laikui buteliuko apačioje gali atsirasti nežymių spalvos pokyčių ar nuosėdų. Spalvos pokytis ar nuosėdos neturi poveikio reagentų veikimui.

Laikymo sąlygos ir stabilumas

Tinkamumo laikas 15-25 °C temperatūroje: Žr. galiojimo datą ant etikečių

04708725 190

Naudojamo analizatoriuje: 4 savaitės

05352991 190

Naudojamo analizatoriuje: 2 savaitės

04880277 190

Atidarius: 12 savaičių

Kuomet nenaudojate, laikykite Multiclean uždarytą.

Naudojamo **cobas c** analizatoriuje: 4 savaitės

Pateiktos medžiagos

Apie reagentus skaitykite skyriuje „Reagentai - darbiniai tirpalai“.

Reikalingos (bet nepateikiamos) medžiagos

Skaitykite skyriuje „Užsakymo informacija“

Roche/Hitachi analizatoriai ir tyrimų reagentai.

Apie papildomai reikalingas medžiagas skaitykite atitinkamame metodo lape ir naudotojo vadove.

Tyrimas

Naudokite Multiclean / Sample Cleaner 1 taip, kaip nurodyta atitinkamose sistemos reagentų naudojimo instrukcijose.

Išsamesnės informacijos ieškokite jus dominančio analizatoriaus naudotojo vadove, atitinkamuose pritaikymo aprašuose, produkto informacijoje ir visų reikiamų komponentų pakuočių informaciniuose lapeliuose.

Šiuose informaciniuose lapeliuose kaip dešimtainės trupmenos skyriklis visada naudojamas taškas, skiriantis sveikąjį skaičių nuo dešimtainės trupmenos skaitmenų. Tūkstančių skyrikliai nenaudojami.

Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardytų standarte ISO 15223-1.

CONTENT

Rinkinio turinys

REAGENT

Reagentas

CALIBRATOR

Kalibratorius



Tūris po atskiedimo arba maišymo

GTIN

Visuotinis prekybos identifikacijos numeris (angl. Global Trade Item Number)

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėje.

© 2016, Roche Diagnostics

Multiclean / Sample Cleaner 1

cobas®



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com



JAV platina:

Roche Diagnostics, Indianapolis, IN

JAV vartotojų techninė pagalba 1-800-428-2336