

HYDREX

HX Serowhites
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Vienkartinės plokštelės kraujo grupėms ir fenotipavimui
su 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 duobučių

PASKIRTIS

HX Serowhites yra skirtos pakeisti prieš naudojant stiklines plokšteles, kad būtų sumažintas užteršimo pavojus, kuris būdingas potencialiai užkrečiamų medžiagų manipuliavimui.
Naudoti tik in vitro diagnostikai.

APIBŪDINIMAS

HX Serowhites pagamintos iš specialiai paruošto baltos spalvos polimero, kuris leidžia spontaniškai kontaktuoti ir maišyti reagentams.

Yra 8 skirtingų tipų 100 vnt. vienkartinių plokščių: HX Serowhites 5, HX Serowhites 6, HX Serowhites 7, HX Serowhites 8, HX Serowhites 9, HX Serowhites 10, HX Serowhites 11, HX Serowhites 12.

Kiekviena plokštelė turi 5 eilutes, skiriasi tik (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) duobučių skaičius; skirta 5 pacientams.
HX Serowhites gali būti naudojamos kambario temperatūroje arba 37 ° C temperatūroje.

LAIKYMAS

HX Serowhites turi būti laikomos kambario temperatūroje (15-30 ° C) sausoje vietoje. Nepalikite produkto tiesioginėje saulės šviesoje.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Būtinai naudokite pirštines. Žmonių mėginiai ir bet kurie vienkartiniai produktai, su kuriais liečiasi šie mėginiai turėtų būti laikomi potencialiai infekcinėmis medžiagomis. Specialios apsaugos priemonės, sąlygos šalinti ir dezinfekuoti, turėtų būti įgyvendintos pagal vietines taisykles.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš reagentų užpylimą, pasirašykite naudojamų reagentų (Anti-A, Anti-B ir tt) identifikaciją virš pirmosios eilės duobučių.

Žemiau kiekvienos duobučių eilutės įrašykite paciento vardą ir/arba identifikacijos numerį.

Lentelės viršuje įrašykite bandymo datą ir laboranto vardą pavardę.

Atlikite testą pagal numatytą procedūrą, aprašytą reagentų pakuotėje. Lėtai pavartykite plokštelę ir įvertinkite aglutinaciją.

Rekomenduojama naudoti akrilo stiklo konteinerį, kuris palaiko serologinių plokštelių standumą ir drėgmę.

Tinkamas drėgmės kiekis, svarbus nustatant kraujo grupes, leidžiantis kraujo kūneliams neišdžiūti, kas yra svarbu gauti teisingus rezultatus.

APRIBOJIMAI

1. Negalima pakartotinai naudoti "HX Serowhites": jos yra vienkartinės.

2. Venkite bet kokio atsitiktinio sąlyčio su vandeniu.

Hydrex Diagnostics Sp. z o oo Sp. k., ul. Tomasz Zana 4, Varšava 04-313, Lenkija

2013 11 03

Naudojami simboliai:

Gamintojas

Katalogo numeris

Informacija naudojimo instrukcijoje.

Negalima pakartotinai naudoti

In vitro diagnostinis medicinos prietaisas

Laikyti 15-30 ° C temperatūroje

LOT Nr

Galiojimo pabaigos data

Prašome pateikti užsakymus:

Hydrex Diagnostics Sp. z o oo Sp. k., ul. Tomasz Zana 4, Varšava 04-313, Lenkija
tel. : +48 22 673 13 60, faksas: +48 22 673 13 54, el.paštas: info@hydrex.pl

vertinimas
Inga Kinkėvė
Konkursų ruošimo
vadybininkė

