

UŽPILDYMO ANGOS VALIKLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Įmonės pavadinimas: JS Medicina Electrónica SRL

Bendrinis pavadinimas: DIESTRO UŽPILDYMO ANGOS VALIKLIS

- **Paskirtis**

„UŽPILDYMO ANGOS VALIKLIS“ - tai gaminy, skirtas absorbuoti biologinės medžiagos likučius, nusodintus išorinėje kapiliarinio mėginio ėmimo dalyje.

Be to, siekiant apsaugoti vartotoją nuo sąlyčio su minėta biologine medžiaga, esant normaliam analizatoriaus veikimui.

„UŽPILDYMO ANGOS VALIKLIO“ veikimo laikas apskaičiuojamas 800 mėginių, kurių apskaičiuotas suvartojimas yra 100 mėginių dienos arba 3 mėnesiai, kai sunaudojama 10 mėginių.

- **Katalogo numeris: IN 0050**

- **Procedūra**

1. Kai analizatorius yra išjungtas, atidarykite priekinį skydelį.
2. Atsargiai pakelkite ištraukiamą pripildymo angą, kad pasiektumėte horizontalią padėtį, išimkite „UŽPILDYMO ANGOS VALIKLĮ“, kurį naudojote ir išmeskite pagal galiojančias galimai infekcines biologines atliekas.
3. Nuvalykite adatą vienkartinio audiniu arba rankšluosčiu, sudrėkintu intensyviu Diestro plovimo tirpalu.
4. Nuimkite naujo valymo modulio apsauginį sandariklį.
5. Pateikite naują „Diestro UŽPILDYMO ANGOS VALIKLĮ“ valiklį prieš kreipiančiąją padėtį, įsitikinkite, kad jis yra teisingoje padėtyje ir švelniai pastumkite jį, kol pateksite į centrinę analizatoriaus sienelę.
6. Į analizatorių įveskite įtraukiamą užpildymo angą.
7. Padėkite analizatoriaus priekį į savo padėtį ir toliau naudokite analizatorių.

- **Atsargumo priemonės ir utilizavimas**


Adata ir naudojamą „Diestro UŽPILDYMO ANGOS VALIKLIS“ gali turėti potencialiai užkrečiamų atliekų: būkite atsargūs, dėvėkite pirštines ir venkite purslų.

Išmeskite audinį arba rankšluostį ir naudojamą „Diestro UŽPILDYMO ANGOS VALIKLĮ“ valiklį pagal laboratorijoje galiojančias taisykles.

- **Sandėliavimas ir tvarkymas**

Laikykite užpildymo angos valiklį 5 ° C – 35 ° C temperatūroje, kambario temperatūroje.

Bet kuriuo metu dėvėkite pirštines.

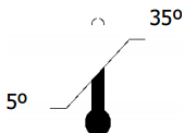

Obelis s.a
53 Boulevard Général Wahis
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail : mail@obelis.net



Fabricado por / Manufactured by
JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@jsweb.com.ar - Web: www.jsweb.com.ar
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964
Industria Argentina / Made in Argentina

Paskutinė peržiūra: 2016 m. sausis