

PACK DE CALIBRACION ISE

Soluciones calibradoras // Calibrations solutions

REF

IN 0100

Standard A
Standard B


IVD

Uso Previsto: Soluciones diseñadas para calibrar y lavar el equipo analizador de Iones Marca Diestro, en sus dos puntos de calibración. En el mismo Pack se alojan los residuos de las determinaciones y se provee una solución limpiadora para el mantenimiento del equipo. Determinaciones de Na^+ - K^+ - Cl^- - Ca^{2+} - Li^+ . El pack de calibración ISE Marca Diestro, esta destinado al uso en los analizadores marca DIESTRO únicamente.	Intended Use: Solutions designed to calibrate and wash the ion analyzer Brand Diestro on it two point calibration equipment. In the same Pack, residues determinations are housed and decontamination solutions for equipment maintenance are provided. Determinations of Na^+ - K^+ - Cl^- - Ca^{2+} - Li^+ . ISE Calibrating Pack brand DIESTRO, is designed for use in analyzers brand DIESTRO only.
Descripción del Producto: El pack esta compuesto por las siguientes soluciones: - Standard A: 1 botella x 800 ml.- - Standard B: 1 botella x 100 ml.- - Solución de lavado: 1 botella x 100 ml.-	Product Description: The pack consists of the following solutions: - Standard A: 1 bottle x 800 ml.- - Standard B: 1 bottle x 100 ml.- - ISE Cleaning Solution: 1 bottle x 100 ml.-
Principios Activos: El Pack de Calibración ISE, es una solución no biológica de formulación especial que se utiliza como calibrador del equipo. No contiene suero humano ni Bovino, es una solución acuosa.	Active Ingredients: ISE Calibrating Pack is a specially formulated non-biological solution that it is used as a calibrator of the electrolyte analyzer brand DIESTRO. Does not contain Human or bovine Serum, is an aqueous solution.
Conservación y manipulación: Conservar los frascos cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, en un rango de temperatura de 5°C a 35°C. No Congelar! USAR A TEMPERATURA AMBIENTE!	Storage and Handling: Store unopened flasks, not to exceed the expiration date, at 5°C - 35°C. Do not freeze. USE AT ROOM TEMPERATURE!
Procedimiento: 1.- Conectar el pack al equipo 2.- Usar a Temperatura ambiente 3.- Realizar la calibración 4.- Realizar un control de calidad del equipo con soluciones de referencia Diestro Trilevel y/o Diestro Control 5.- Proceder con las mediciones.	Procedure: 1- Connect Pack to the analyzer. 2- Use at ambient temperature 3- Make the calibration. 4- Make a quality control of the analyzer using control solutions: Diestro Trilevel and/or Diestro Control 5- Proceed with measurements
Precaución: Mantener correctamente cerrado el recipiente de desechos y realizar los lavados solicitados por el equipo	Caution: Keep the waste container properly closed and make washes requested by the analyzer.
Limitaciones: 1.- Estos productos están previstos para su uso como patrones de calibración y no deben usarse como control de calidad. 2.- Los resultados obtenidos son de interpretación médica.	Limitations: 1. - These products are intended for use as calibration standards and not to be utilized as quality control. 2.-The obtained values are for medical interpretation.
Valores esperados y resultados: Los intervalos esperados, impresos y contenidos en cada caja de producto, representan el intervalo esperado dentro del 95% de los resultados medios en el que deben situarse todos los analizadores.	Expected values and result: The expected ranges, printed and contained within each box of the product represent the expected range within 95% of mean results, where all analyzers should fall.
Precaución: Asegúrese que cada pack de calibración tenga su propio microchip de control conectado al equipo	Caution: Keep sure that each ISE Calibrating Pack its own control microchip connected to the analyzer.
Descarte: Elimine según las normas de higiene y seguridad ambientales vigentes en su laboratorio.	Disposal: Dispose of according to the safety and environmental regulations applicable at your laboratory
Rendimiento: Depende de la cantidad de electrolitos configurados y del modo de uso.	Performance: It depends upon the quantity of configured electrolytes and way of use.



IVD

50

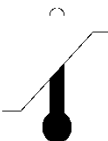

35°

EC

REP



Fabricado por / Manufactured by
JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@jsweb.com.ar - Web: www.jsweb.com.ar
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964
Industria Argentina / Made in Argentina

Fecha de última revisión / Last revision: 01/2016.-

RE 48.01 Rev.4