

PACK DE CALIBRACION ISE

Soluciones calibradoras // Kalibravimo tirpalų paketas

Standartas A
Standartas B

REF IN 0100

IVD

Uso Previsto: Soluciones diseñadas para calibrar y lavar el equipo analizador de Iones Marca Diestro, en sus dos puntos de calibración. En el mismo Pack se alojan los residuos de las determinaciones y se provee una solución limpiadora para el mantenimiento del equipo. Determinaciones de Na^+ - K^+ - Cl^- - Ca^{2+} - Li^+. El pack de calibración ISE Marca Diestro, esta destinado al uso en los analizadores marca DIESTRO únicamente.	Paskirtis: Skysčiai yra sukurti „Diestro“ prekės ženklo jonų analizatoriaus kalibravimui ir plovimui 2 balų kalibravimo įrangai. Toje pačioje pakuotėje yra likučių nustatymo priemonės ir skirti įrangos techninei priežiūrai nukenksminimo tirpalai. Na^+ - K^+ - Cl^- - Ca^{2+} - Li^+ nustatymas. Kalibravimo tirpalas. Prekės ženklo „DIESTRO“ paketas yra sukurtas naudojimui tik prekės ženklo „DIESTRO“ analizatoriuose.
Descripción del Producto: El pack esta compuesto por las siguientes soluciones: • Standard A: 1 botella x 800 ml.- • Standard B: 1 botella x 100 ml.- • Solución de lavado: 1 botella x 100 ml.-	Prekės aprašymas: Pakuotę sudaro šie tirpalai: • Standartinis A: 1 buteliukas x 800 ml. • Standartinė B: 1 butelis x 100 ml. • ISE valymo tirpalas: 1 buteliukas x 100 ml.
Principios Activos: El Pack de Calibración ISE, es una solución no biológica de formulación especial que se utiliza como calibrador del equipo. No contiene suero humano ni Bovino, es una solución acuosa.	Aktyvūs ingredientai: Kalibravimo tirpalo paketas yra specialiai parengtas nebiologinis tirpalas, naudojamas kaip „DIESTRO“ prekės ženklo elektrolitų analizatoriaus kalibratorius. Tirpale nėra žmogaus arba galvijų serumo, tai yra vandeninis tirpalas.
Conservación y manipulación: Conservar los frascos cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, en un rango de temperatura de 5°C a 35°C. No Congelar! USAR A TEMPERATURA AMBIENTE!	Saugojimas ir tvarkymas: Buteliai turi būti saugomi neatidaryti, negalima vartoti pasibaigus galiojimo terminui, turi būti laikomi 5°C - 35°C temperatūroje. Nešaldyti. NAUDOJAMAS KAMBARIO TEMPERATŪROJE!
Procedimiento: 1.- Conectar el pack al equipo 2.- Usar a Temperatura ambiente 3.- Realizar la calibración 4.- Realizar un control de calidad del equipo con soluciones de referencia Diestro Trilevel y/o Diestro Control 5.- Proceder con las mediciones.	Procedūra: 1. Prijunkite paketą prie analizatoriaus. 2. Naudokite aplinkos temperatūroje 3. Atlikite kalibravimą. 4. Atlikite analizatoriaus kokybės kontrolę naudodami kontrolinius tirpalus: „Diestro Trilevel“ ir (arba) „Diestro Control“. 5. Tęskite matavimus
Precaución: Mantener correctamente cerrado el recipiente de desechos y realizar los lavados solicitados por el equipo	Perspėjimas: Laikykite atliekų konteinerį tinkamai uždarytą ir atlikite reikiamus analizatoriaus plovimus.
Limitaciones: 1.- Estos productos están previstos para su uso como patrones de calibración y no deben usarse como control de calidad. 2.- Los resultados obtenidos son de interpretación médica.	Apribojimai: 1. - Šie gaminiai skirti naudojimui kaip kalibravimo standartai, jie negali būti naudojami kokybės kontrolei. 2.- Gautos vertės skirtos medicininei interpretacijai.
Valores esperados y resultados: Los intervalos esperados, impresos y contenidos en cada caja de producto, representan el intervalo esperado dentro del 95% de los resultados medios en el que deben situarse todos los analizadores.	Laukiamos vertės ir rezultatas: Laukiami diapazonai, atspausdinti ir pateikti kiekvieno gaminio dėžutėje, nurodo vidutinių rezultatų 95% tikėtiną intervalą, kurį turėtų atitikti visi analizatoriai.
Precaución: Asegúrese que cada pack de calibración tenga su propio microchip de control conectado al equipo	Atsargumo priemonės: Įsitikinkite, kad kiekviename kalibravimo tirpalo pakete („Calibrating Solution Pack“) yra mikroschema, prijungta prie analizatoriaus.
Descarte: Elimine según las normas de higiene y seguridad ambientales vigentes en su laboratorio.	Utilizavimas: Utilizuokite pagal savo laboratorijoje taikomus saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.
Rendimiento: Depende de la cantidad de electrolitos configurados y del modo de uso.	Veikimo savybės: Veikimo savybės priklauso nuo sukonfigūruotų elektrolitų kiekio ir naudojimo būdo.



IVD

50

35°

EC

REP



Fabricado por / Manufactured by
JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@jsweb.com.ar - Web: www.jsweb.com.ar
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964
Industria Argentina / Made in Argentina

Paskutinė peržiūros data: 2016 m. sausis

RE 48.01 Rev.4