

DILUYENTE DE ORINA ISE Ise Urine Diluent


REF IN 0300

IVD

Uso Previsto: Soluciones diseñadas para realizar la dilución de las muestras de orina a ser procesadas. La solución diluyente de orina, esta destinada al uso en los analizadores marca DIESTRO únicamente.	Intended Use: Solutions designed to dilute the urine when this is will be used as a sample. This urine diluent solution is designed to be used in DIESTRO brand analyzers only.
Presentación del Producto: Solución Diluyente: 1 botella x 150 ml.-	Product Description: Diluent Solution: 1 bottle x 150 ml.-
Principios Activos: El diluyente de orina, es una solución no biológica de formulación especial que se utiliza para la dilución de la muestra. No contiene suero humano ni Bovino ni Potasio, es una solución acuosa salina.	Active Ingredients: The Urine Diluent is a non-biological solution of special formulation that is used in the sample dilution. Does not contain Human or Bovine serum, is an aqueous solution.
Conservación y manipulación: Conservar los frascos cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, en un rango de temperatura de 5°C a 35°C. No Congelar! USAR A TEMPERATURA AMBIENTE!	Storage and Handling: Store unopened flasks, not to exceed the expiration date, at 5°C - 35°C. Do not freeze. USE AT ROOM TEMPERATURE!
Procedimiento: 1.- Tomar la muestra de orina 2.- Usar a Temperatura ambiente 3.- Realizar la dilución de la siguiente manera, 1 parte de orina y 4 partes de diluyente 4.- Se recomienda realizar un control previo del equipo con controles de orina 5.- Proceder con las mediciones	Procedure: 1- Take the urine sample. 2- Use at ambient temperature 3- Make the dilution in following way: 1 (ONE) part of Urine and 4 (FOUR) parts of diluent. 4- A previous Urine Control of the instrument is recommended. 5- Proceed with measurements
Precaución: Mantener correctamente cerrado el recipiente de desechos y realizar los lavados solicitados por el equipo	Caution: Keep the waste container properly closed and make washes requested by the analyzer.
Limitaciones: 1.- Estos productos están previstos para ser utilizados en los equipos marca Diestro.	Limitations: 1. - These products are intended for use in DIESTRO brand analyzers only.
Valores esperados y resultados: Valores normales clínicos o patológicos del paciente.	Expected values and result: Normal clinical or pathological values of the patient.
Precaución: Siempre pasar la solución de lavado intensivo posterior a la determinación	Caution: Always pass the ISE Cleaning Solution after the determination.
Descarte: Elimine según las normas de higiene y seguridad ambientales vigentes en su laboratorio.	Disposal: Dispose of according to the safety and environmental regulations applicable at your laboratory
Rendimiento: Depende del modo de uso.	Performance: It depends in the way of use.



IVD

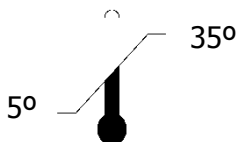

EC

REP



Fabricado por / Manufactured by
JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@jsweb.com.ar - Web: www.jsweb.com.ar
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964
Industria Argentina / Made in Argentina

Fecha de última revisión / Last revision: 01/2016.-