

SOLUCION DE LAVADO INTENSIVO ISE ISE Cleaning Solution

REF


IN 0400

IVD

Uso Previsto: Soluciones diseñadas para realizar la limpieza y descontaminación del equipo. La solución de lavado, esta destinada al uso en los analizadores marca DIESTRO únicamente.	Intended Use: Solutions designed to make the cleaning and decontamination of the analyzer. The ISE Cleaning Solution is designed to be used in the ion analyzer Brand DIESTRO only.
Presentación del Producto: Solución : 1 botella x 100 ml.-	Product Description: ISE Cleaning Solution: 1 bottle x 100 ml.-
Principios Activos: La Solución de lavado intensivo, es una solución no biológica de formulación especial que se utiliza para la limpieza del analizador DIESTRO. No contiene suero humano ni Bovino, es una solución acuosa.	Active Ingredients: ISE Cleaning Solution is a specially formulated non-biological solution that it is used for cleaning the electrolyte analyzer brand DIESTRO. Does not contain Human or bovine Serum, is an aqueous solution.
Conservación y manipulación: Conservar los frascos cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, en un rango de temperatura de 5°C a 35°C. No Congelar! USAR A TEMPERATURA AMBIENTE!	Storage and Handling: Store unopened flasks, not to exceed the expiration date, at 5°C - 35°C. Do not freeze. USE AT ROOM TEMPERATURE!
Procedimiento: 1.- Verificar el aviso del equipo para realizar la limpieza 2.- Usar a Temperatura ambiente 3.- Luego del aviso pasar la solución de limpieza por el equipo 4.- Se recomienda calibrar el equipo luego de la limpieza 5.- Proceder con las mediciones	Procedure: 1- Verify the notification of the analyzer to proceed with cleaning. 2- Use at ambient temperature 3- After notification, pass the ISE Cleaning Solution. 4- It is recommended to make a calibration after the cleaning. 5- Proceed with measurements
Precaución: Mantener correctamente cerrado el recipiente de desechos y realizar los lavados solicitados por el equipo	Caution: Keep the waste container properly closed and make washes requested by the analyzer.
Limitaciones: 1.- Estos productos están previstos para ser utilizados en los equipos marca Diestro.	Limitations: 1. - These products are intended for use in DIESTRO brand analyzers only.
Valores esperados y resultados: N/A	Expected values and result: N/A
Precaución: Siempre calibrar el equipo posterior a la limpieza	Caution: Always make a calibration subsequent cleaning.
Descarte: Elimine según las normas de higiene y seguridad ambientales vigentes en su laboratorio.	Disposal: Dispose of according to the safety and environmental regulations applicable at your laboratory
Rendimiento: Depende del modo de uso.	Performance: It depends in the way of use.



IVD

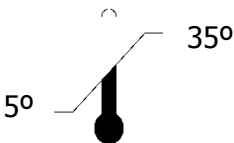

EC

REP



Fabricado por / Manufactured by
JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@jsweb.com.ar - Web: www.jsweb.com.ar
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964
Industria Argentina / Made in Argentina

Fecha de última revisión / Last revision: 01/2016.-