

SOLUCION ACONDICIONADORA DE SODIO

Na kondicionierius


REF IN 0600

IVD

Uso Previsto: Soluciones diseñadas para acondicionar el electrodo de sodio. El electrodo de sodio esta compuesto por un capilar de vidrio, luego del pasaje de sucesivas muestra de fluidos biológicos este capilar sufre las consecuencias observándose una pérdida de ganancia en el electrodo o valores bajos de sodio en las mediciones. La gran afinidad del acondicionador por el vidrio provoca una recuperación del electrodo. La solución acondicionadora del electrodo de sodio, esta destinada al uso en los analizadores marca DIESTRO únicamente.	Numatyta paskirtis: Tirpalai, skirti natrio elektrodui kondicionuoti. Natrio elektrodas susideda iš stiklo kapiliarų, po to, kai praeina vienas po kito einančių biologinių skysčių mėginys, šis kapiliaras patiria praradimą, kurį mato natrio elektrodas arba mažos matavimų vertės. Didelis afinitetas kondicionieriaus stiklui sukelia elektrodo regeneravimą. Natrio elektrodo kondicionavimo tirpalas skirtas naudoti tik DIESTRO markės analizatoriuose.
Presentacion del Producto: El Acondicionar de Sodio consiste en la siguiente presentación: • Solucion Acondicionadora: 1 botella x 20 ml.-	Produkto aprašymas: Na kondicionierius susideda iš tokio tirpalo: • Kondicionieriaus tirpalas: 1 buteliukas x 20 ml.
Principios Activos: El Acondicionador de sodio, es una solución no biológica de formulación especial que se utiliza para recuperar el electrodo de sodio. No contiene suero humano ni Bovino, es una solución acuosa.	Aktyvūs ingredientai: Natrio kondicionierius yra specialiai parengtas nebiologinis tirpalas, naudojamas kaip DIESTRO prekės ženklo elektrolitų analizatoriaus kalibratorius. Tirpale nėra žmogaus arba galvijų serumo, tai yra vandeninis tirpalas
Conservación y manipulación: Conservar los frascos cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, en un rango de temperatura de 5°C a 35°C. No Congelar! USAR A TEMPERATURA AMBIENTE!	Sandėliavimas ir tvarkymas: Buteliai turi būti saugomi neatidaryti, negalima vartoti pasibaigus galiojimo terminui, turi būti laikomi 5°C - 35°C temperatūroje. Nešaldyti. NAUDOJAMAS KAMBARIO TEMPERATŪROJE.
Procedimiento: 1.- Aviso del equipo o baja ganancia del electrodo de sodio pasar el acondicionador de sodio 2.- Usar a Temperatura ambiente 3.- Realizar la calibración posterior al uso 4.- Realizar un control de calidad del equipo con soluciones de referencia Diestro Trilevel y/o Diestro Control 5.- Proceder con las mediciones.	Procedūra: 1- Na kondicionierių naudokite pareikalavus prietaisui arba pastebėjus sumažėjusį natrio elektrodo signalą (sumažėjusi Na+ vertės). 2- Naudojimas kambario temperatūros. 3- Po to atlikite kalibravimą. 4- Patikrinkite analizatorių, naudodami kontrolinius tirpalus: Diestro Trilevel ir / arba Diestro Control 5- Atlikite matavimus
Precaución: Mantener correctamente cerrado el recipiente de desechos y realizar los lavados solicitados por el equipo	Perspėjimas: Laikykite atliekų konteinerį tinkamai uždarytą ir atlikite reikiamus analizatoriaus plovimus.
Limitaciones: 1.- Estos productos están previstos para ser utilizados en los equipos marca Diestro.	Apribojimai: 1. - Šie produktai skirti naudoti tik DIESTRO prekės ženklo analizatoriuose.
Valores esperados y resultados: Se espera un aumento de la ganancia del electrodo.	Laukiamos vertės ir rezultatas: Tikimasi, kad padidės natrio elektrodo signalas (padidės Na+ vertės).
Precaución: Siempre pasar la solución de lavado intensivo previo al uso del acondicionador de sodio	Perspėjimas: Visada praleisti ISE valymo tirpalą prieš Na kondicionierių.
Descarte: Elimine según las normas de higiene y seguridad ambientales vigentes en su laboratorio.	Utilizavimas: Utilizuokite pagal savo laboratorijoje taikomus saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.
Rendimiento: Depende del modo de uso.	Veikimo savybės: Tai priklauso nuo naudojimo būdo.



IVD

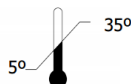

Fabricado por / Manufactured by
JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli
Provincia de Buenos Aires
República Argentina
Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707
Email: info@jsweb.com.ar
Web: www.jsweb.com.ar

Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda
Matricula Nacional N°13104
Matricula Provincial N°15964

Industria Argentina / Made in Argentina

EC REP

Obelis s.a
53 Boulevard Général Wahis
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail : mail@obelis.net