

DIESTRO-TRILEVEL

Soluciones de control de calidad

Quality control solutions

REF IN 0750

IVD


Nivel 1-2-3 Contenido: 3 niveles. Un frasco x 15 ml para cada nivel
Level 1-2-3 Contents: 3 Levels. One flask x 15 ml for each level.

Uso Previsto: DIESTRO-TRILEVEL es un control de electrolitos previsto para uso como material de control de las determinaciones de Na^+ - K^+ - Cl^- - Ca^{2+} - Li^+. El material de control Diestro-Trilevel esta destinado al uso en los analizadores marca DIESTRO únicamente.	Intended Use: DIESTRO-TRILEVEL an electrolyte control is intended for use as control material to monitor the measurement of Na^+ - K^+ - Cl^- - Ca^{2+} - Li^+. DIESTRO-TRILEVEL control material is intended for use only with Diestro Electrolyte Analyzers.
Descripción del Producto: Los controles de electrolitos DIESTRO-TRILEVEL están disponibles en tres (3) niveles: Nivel 1: Valores bajos para Na^+ - K^+ - Li^+ - Cl^-; valores altos para Ca^{2+} (Etiqueta roja) Nivel 2: Valores normales (Etiqueta amarilla) Nivel 3: Valores altos para Na^+ - K^+ - Li^+ - Cl^-; valores bajos para Ca^{2+} (Etiqueta azul)	Product Description: DIESTRO-TRILEVEL electrolyte controls are available in three (3) levels: Level 1: low values for Na - K - Li + CL-; high values for Ca2 (red label) Level 2: normal values (yellow label) Level 3: high values for Na - K - Li + CL-; low values for Ca2 (Blue label)
Principios Activos: El control de electrolitos DIESTRO-TRILEVEL, es una solución no biológica de formulación especial que simula niveles de actividad de electrolitos en plasma humano. No contiene suero humano ni Bovino, es una solución acuosa.	Active Ingredients: DIESTRO-TRILEVEL electrolyte controls are a specially formulated non-biological solution that simulates electrolyte activity levels in human plasma. Does not contain Human or bovine Serum, is an aqueous solution.
Conservación y manipulación: Conservar los frascos cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, en un rango de temperatura de 5°C a 35°C. No Congelar! Una vez abiertos conservar en heladera y consumir dentro de los 30 días. USAR A TEMPERATURA AMBIENTE!	Storage and Handling: Store unopened flasks, not to exceed the expiration date, at 5°C - 35°C. Do not freeze. Once open keep in refrigerator and consume within 30 days. USE AT ROOM TEMPERATURE!
Procedimiento: 1.- Antes de su uso agitar levemente el frasco 2.- Usar a Temperatura ambiente 3.- Dosifique en un tubo de ensayo la cantidad que va a usar y vuelva a cerrar el frasco. No regrese el excedente de solución al frasco original. 4.- Realice las mediciones desde el tubo en el modo Control de Calidad, siguiendo las instrucciones de uso del Manual del operador del Analizador de Electrolitos DIESTRO.	Procedure: 1- Before to use shake slightly the flask. 2- Use at ambient temperature 3- Quote in a test tube the quantity you need and then close the flask. Do not return the surplus material to the original flask. 4- Do the measurements from the tube in the quality control mode following the instructions given in the operator's Manual of the Diestro Analyzer.
Precaución: El uso de recipientes de muestra heparinizados para la introducción de DIESTRO-TRILEVEL puede originar valores de electrolitos ligeramente diferentes de los valores esperados.	Caution: Use of heparinized sample tubes for introduction of DIESTRO TRILEVEL may result in values of electrolytes that are slightly different that the target values.
Limitaciones: 1.- Estos productos están previstos para su uso como control de calidad y no deben usarse como patrones de calibración. 2.- Los valores enumerados solo se aplican a los valores de lote indicados. 3.- Estos controles se utilizan como ayuda en la evaluación del rendimiento de la instrumentación para medir electrolitos y no deben considerarse sustitutos de otros aspectos del control de calidad.	Limitations: 1. - These products are intended for use as quality control and not to be utilized as calibration standards. 2.-The listed values apply only to the indicated lot numbers. 3.-These controls are used to aid in the evaluation of the performance of electrolyte instrumentation and should not be considered as a substitute for other aspects of total quality control.
Valores esperados y resultados: Los intervalos esperados, impresos y contenidos en cada caja de material de control, representan el intervalo esperado dentro del 95% de los resultados medios en el que deben situarse todos los analizadores.	Expected values and result: The expected ranges, printed and contained within each box of control material represent the expected range within 95% of mean results, where all analyzers should fall.
Precaución: Los intervalos esperados para los tres (3) niveles de controles son específicos de cada lote. Asegúrese de que los números de lote de la hoja prospecto concuerdan con los del frasco de control de calidad.	Caution: The expected ranges for all 3 (three) levels of controls are lot specific. Make sure that the lot numbers on the insert sheet match those on the quality control flask.
Descarte: Elimine según las normas de higiene y seguridad ambientales vigentes en su laboratorio.	Disposal: Dispose of according to the safety and environmental regulations applicable at your laboratory
Rendimiento: Depende de la cantidad de electrolitos configurados y del modo de uso.	Performance: It depends upon the quantity of configured electrolytes and way of use.

	Analizador / Analyzer	Na ⁺ mmol/L	K ⁺ mmol/L	Cl ⁻ mmol/L	Ca ⁺⁺ mmol/L	Li ⁺ mmol/L
Nivel / Level 1  016  2018-01	Diestro 103 / 103+	116 - 126	1.7 - 2.3	74 - 86	1.40 - 1.62	0.22 - 0.36
	Diestro 103A / 103A+	116 - 126	1.7 - 2.3	74 - 86	1.40 - 1.62	0.22 - 0.36
	Diestro 103AP V2, V3, V4	116 - 126	1.7 - 2.3	74 - 86	1.40 - 1.62	0.22 - 0.36
Nivel / Level 2  016  2018-01	Diestro 103 / 103+	136 - 146	3.5 - 4.5	93 - 105	0.90 - 1.10	0.81 - 1.17
	Diestro 103A / 103A+	136 - 146	3.5 - 4.5	93 - 105	0.90 - 1.10	0.81 - 1.17
	Diestro 103AP V2, V3, V4	136 - 146	3.5 - 4.5	93 - 105	0.90 - 1.10	0.81 - 1.17
Nivel / Level 3  016  2018-01	Diestro 103 / 103+	154 - 166	7.4 - 8.6	112 - 124	0.45 - 0.61	1.17 - 1.77
	Diestro 103A / 103A+	154 - 166	7.4 - 8.6	112 - 124	0.45 - 0.61	1.17 - 1.77
	Diestro 103AP V2, V3, V4	154 - 166	7.4 - 8.6	112 - 124	0.45 - 0.61	1.17 - 1.77



IVD

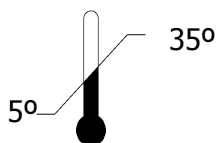

Fabricado por / Manufactured by
JS Medicina Electrónica S.R.L.
 Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli
 Provincia de Buenos Aires
 República Argentina

Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707
 Email: info@jsweb.com.ar
 Web: www.jsweb.com.ar

Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda
 Matricula Nacional N°13104
 Matricula Provincial N°15964

Industria Argentina / Made in Argentina

EC REP

Obelis s.a
 53 Boulevard Général Wahis
 1030 Brussels, BELGIUM
 Tel: +(32) 2. 732.59.54
 Fax: +(32) 2.732.60.03
 E-Mail : mail@obelis.net