

DIESTRO VAMZDELIŲ RINKINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Įmonės pavadinimas: JS Medicina Electrónica SRL

Bendrinis pavadinimas: DIESTRO

Katalogo numeriai: RE0319; RE0320; RE0321; RE0322; RE0323; RE0324; RE0325; RE0326; RE0327; RE0328; RE0329; RE0330; RE0331

- **Paskirtis**

Atsarginių vamzdelių komplektas yra suprojektuotas ir skirtas naudoti DIESTRO elektrolitų analizatoriui, toliau išvardintų tirpalų ir mėginių pernešimui į skirtingus vidinius taškus: reagentų, žmogaus kraujo, serumo, plazmos ir šlapimo.

- **Sandėliavimas ir tvarkymas**

Laikyti 5 ° C – 35 ° C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

- **Procedūra**


1. Atjunkite pakuotės vamzdelius.
2. Ištuštinkite visus vidinius analizatoriaus vamzdelius
3. Atjunkite analizatoriaus maitinimo šaltinį nuo įtampos linijos.
4. Atidarykite analizatoriaus priekinį skydelį.
5. Atjunkite visus vidinius vamzdelius ir pakeiskite juos naujais.
6. Prijunkite pakuotės vamzdelius prie analizatoriaus.
7. Įjunkite įrangą ir atlikite valymą.
8. Atlikite dviejų taškų kalibravimą ir patikrinkite, ar kreivių reikšmės yra teisingos.



* Atlikite šią operaciją naudodami pirštines ir akinius

- **Utilizavimas**

Utilizuoti pagal saugos ir aplinkosaugos reikalavimus, taikomus jūsų laboratorijoje.

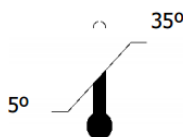

Obelis s.a
53 Boulevard Général Wahis
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail : mail@obelis.net



Fabricado por / Manufactured by
JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@jsweb.com.ar - Web: www.jsweb.com.ar
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964
Industria Argentina / Made in Argentina

Paskutinė peržiūra: 2016 m. sausis