

DuraLock-C

Sudėtis:

DuraLock-C yra skaidrus ir sterilus 46,7% natrio citrato tirpalas vandens pagrindu, kurio pH nuo 5,0 iki 8,0. Laikantis aseptikos taisyklių išfasuotas steriliuose vakuose po du 3 ml. švirkštus, užpildytus 2,5 ml. skysčio.

Naudojimo paskirtis:

DuraLock-C skirtas bet kurio tipo intraveninių kateterių užpildymui, su kateteriu susijusių trombozių ir infekcijų profilaktikai.

Apibūdinimas:

Natrio citratas ekstrakorporinėje kraujo apykaitoje suriša kalcio jonus į tirpų kompleksą - antikoaguliacinis efektas. Kalcis yra aktyvus krešėjimo kaskados faktorius, vietiskai neutralizuojamas natrio citratu apsaugant kraują nuo krešumo faktorių (X faktoriaus, protrombino) aktyvavimo ir nutraukiant fibrino formavimąsi. Sisteminė antikoaguliacija šiuo būdu negali būti pasiekta. Ca^{2+} jonai gali reguliuoti veiklą genų, atsakingų už mikroorganizmų dauginimąsi bei išlikimą. Taigi, surišant Ca^{2+} jonus tirpalo poveikio zonoje pasireiškia antimikrobinis efektas.

Išpėjimai:

Nenaudokite tirpalo, jei pažeistas vokas arba švirkštas!

Nenaudokite, jei tirpalas neskaidrus ar pakitusios spalvos!

Tirpalą gali naudoti tik kvalifikuotas bei tinkamai apmokytas personalas!

Tik vienkartiniam naudojimui. Atsikratykite nepanaudotų porcijų!

DuraLock-C negali būti naudojamas jokioms intraveninėms injekcijoms ar kaip priedas infuzijai!

DuraLock-C skirtas tik kateterių užpildymui!

DuraLock-C naudojamas tiksliais dozėmis, nurodytomis ant kateterio (žiūrėti kateterio gamintojo instrukciją)!

Dozė, didesnė už kateterio gamintojo nurodytą kateterio užpildymo tūrį - kontraindikuotina!

Pašalinis poveikis:

Tirpalą naudojant tik kateterių užpildymui nėra pastebėta jokių pašalinių poveikių. DuraLock-C atsitiktinai patekus į veną, gali pasireikšti parestезinis ir/ar disgezinis poveikis.

Naudojimo instrukcija:

Visuomet turi būti laikomasi aseptikos taisyklių.

Prieš ir po kiekvieno gydymo seanso atidžiai apžiūrėkite kateterį, prailginimo linijas ir Luer'io tipo spaustukus dėl galimų įtrūkimų ar sujungimų sandarumo praradimo.

Prieš pradedant naują gydymo procedūrą vienkartinį švirkštu aspiruokite DuraLock-C iš kateterio spindžio, kuriuo jis buvo užpildytas po buvusios procedūros.

Praplaukite kiekvieną kateterio spindį 5mL sterilaus 0,9% natrio chlorido tirpalu.

Laikydami švirkštą Luer lock galu viršuje:

Atsargiai nuimkite kamštelį.

Pašalinkite oro burbuliukus, švelniai pirštais spragtelint per švirkštą, kol visi oro burbuliukai nuslinks aukštyn.

Lėtai spausdami stūmoklį išstumkite visus oro burbulus.

Lėtai spauskite stūmoklį iki reikiamo užpildyti tūrio (gamintojo nurodyto ant kateterio atšakos spaustuko).

Lėtai injekuokite turimą DuraLock-C kiekį į kateterį (per 5-10 sek.).