

# LOFTEX®-SERVETĖLĖS

## SERVETĖLĖS VALYMU IIR DEZINFEKCIJAI

Saugiam ir higieniniam daiktų bei paviršių valymui / dezinfekcijai ligoninėse, slaugos namuose, medicinos praktikoje, laboratorijose, virtuvėse, sanitarinėse patalpose, farmacijos ir maisto pramonėje.

Naudojimo vietos: vietos, kuriose yra ir nėra infekcijos rizikos, ar yra tikėtina infekcijos rizika. Impregnuotos paviršių dezinfekcijos tirpalu servetėlės LOFTEX -Wipes, gali būti naudojamos iki 28 dienų.

### Naudojimas:

1. Dėvėkite pirštines ir dezinfekuokite darbo paviršių.
2. Atidarykite dangtelį ir lėtai įpilkite apie 2,0 - 2,5l paruošto naudoti dezinfekcinio tirpalo iš viršaus nuo servetelių centro link kraštų.
3. Ištraukite servetėlę iš centro ir iškiškite pro dangtelio viduryje esančią angą.
4. Saugiai uždėkite dangtelį, palikdami šiek tiek iškištos servetėlės per angą, kad būtų patogų ištraukti.
5. Paženklinkite etiketę markeriu. Maždaug po 20 min. LOFTEX –Wipes servetėlės bus pilnai sudrėkusios ir paruoštos naudoti.
6. Po paruošimo ir atidarymo LOFTEX servetėlės reikia sunaudoti per 28 dienas. Neskirta naudoti invazinių medicinos prietaisų dezinfekcijai. Perskaitykite pasirinkto dezinfektanto naudojimo instrukciją. Nenaudokite išdžiūvusių/išsausėjusių servetelių.
7. Išmesti pasibaigus naudojimui arba kibirėlį dezinfekuoti ir naudoti toliau.

115 servetelių,  
dydis: 25x30cm

**Importuotojas: UAB „Goodpoint“**

Birželio 23-iosios g. 23F,

LT-50220, Kaunas, Lietuva

El.p.: [info@medsauga.lt](mailto:info@medsauga.lt) / [www.gpoint.lt](http://www.gpoint.lt)

# LOFTEX<sup>®</sup>-SERVETĖLĖS



## Valymo/dezinfekavimo servetėlių kibirėlis Po panaudojimo uždaryti!

Produktas:

Ser. Nr.:

Darbinio tirpalo koncentracija:

%

Veikimo laikas:

min.

Paruošimo data:

Galiojimo data:

