

Liekamasis peroksidas

SteriCheck[®]

Pasirinkimas akivaizdus - cheminis testas, naudojamas atliekant dializę.

SteriCheck[®] Liekamasis peroksidas

Nustato liekamojo peroksido kiekį skalavimo vandenyje.

SteriCheck produkto kodas 821971

SteriCheck liekamojo peroksido reagento juostelėmis galima nesudėtingai ir tiksliai išmatuoti dializės aparatams ir dializės sistemoms, dezinfekuotoms peroksidu / peracto rūgštimi, plauti naudotame vandenyje esančio liekamojo peroksido kiekį. Greitas kokybinis atrankos metodas, naudojant *SteriCheck* juosteles, padeda aptikti liekamuosius dezinfekanto kiekius, jei jų koncentracija yra didesnė kaip 1 mg / l (mg / l yra milijoninė dalis arba ppm); jis naudojamas nustatyti, ar dezinfekcinė medžiaga buvo tinkamai išskalauta iš aparato. 15 sekundžių trunkantis kokybinio tyrimo metodas gali būti naudojamas, kai:

- reikia greitai aptikti kiekius nuo 0 iki 10 mg / l;
- kai tik reagentu apdorota juostelės dalis išimama iš tirpalo, iš karto galima pamatyti spalvos pokytį;
- reikia koreguoti aparato dozuojamos dezinfekcinės medžiagos kiekį, kuris ilgainiui tampa nepriimtinas.

Peracto rūgšties koncentracijos gerokai mažesnės nei vandenilio peroksido, todėl matuojamas bendras liekamasis peroksido kiekis.

Jeigu testo rezultatas yra 3 mg / l ir didesnis, aparatą reikia išplauti dar kartą.

Pakuotėje yra buteliukas su 100 reagento juostelių ir produkto naudojimo vadovas 12 kalbų.

Aš, vertėjas (-a) *Ana Karbacia*
esu susipažinęs (-usi) su LR BK 235 straipsniu, kuriame
nustatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisingą vertimą.

Parašas *[Signature]*